



CONDRESS®

Colágeno en polvo en aerosol

Características

- Fácil de usar: aplicación no traumática.
- Acelera el proceso de curación: proporciona soporte físico-mecánico.
- Genera una barrera protectora: mantiene un ambiente húmedo fundamental para el proceso de cicatrización.
- Presenta acción hemostática.
- Simplifica los procedimientos de control y evita lesionar el tejido de granulación: el producto se absorbe tras su aplicación, por lo que no requiere limpiar la lesión de residuos en la próxima aplicación.

Descripción

CONDRESS® es un dispositivo médico a base de colágeno equino en polvo en aerosol, de uso tópico, para el tratamiento de lesiones cutáneas.

El colágeno es conocido por estimular la reparación tisular, acelerando los procesos cicatrizales:

- Actúa como conductor en procesos de reparación tisular.
- Proporciona soporte estructural.
- Controla la diferenciación, migración y síntesis de numerosas proteínas celulares.
- Favorece la formación de fibroblastos, tejido de granulación y colágeno nativo.
- Facilita la hemostasia y estimula la angiogénesis.

La fórmula especial del dispositivo garantiza una barrera protectora en la lesión y favorece el proceso natural de curación. CONDRESS forma una capa de gel en el lecho de la herida que es reabsorbida lentamente por el tejido subyacente y permite mantener un ambiente húmedo constante sobre el lecho de la herida.

Composición

CONDRESS se obtiene mediante proceso de extracción no desnaturalizante ni antigenizante, por lo que, no sufre procesos químicos de reticulación. Exento de los riesgos relacionados con EEB (Encefalopatía Espongiforme Bovina).

Componente	Composición
Colágeno tipo I	Origen equino, liofilizado y estéril.
Propelente	Butano.

Instrucciones de uso

No utilice el producto si la zona de la lesión presenta infección local: limpie la zona a tratar antes del tratamiento.

Rocíe una cantidad de producto suficiente para cubrir completamente la lesión. Puede aplicar una o más capas de polvo sobre toda la zona lesionada con intervalos breves, manteniendo el spray a aproximadamente a 15 cm de la lesión. Fije el producto con una gasa estéril, un vendaje no oclusivo o una tirita. En los niños, los pliegues cutáneos y los pañales pueden servir como vendaje.

El eventual exceso de producto aplicado es eliminado naturalmente por la piel (incluso íntegra), sin afectar la eficacia del tratamiento. No es necesario eliminar el producto residual resultante de la aplicación anterior.

Uso hemostático: A pesar de sus excelentes propiedades hemostáticas, el colágeno no debe sustituir los procedimientos de ligadura o compresión directa en caso de hemorragias severas. Las terapias anticoagulantes no interfieren con su utilización.

El dispositivo puede ser reutilizado después de la primera aplicación hasta que el producto se haya acabado.

En caso de distribución imperfecta del polvo, quite la válvula distribuidora y lávela con agua tibia. Seque la válvula y vuelva a colocarla, dirigiendo el pulverizador hacia fuera.

Indicaciones

Prevención y tratamiento de irritaciones cutáneas, eritemas causados por pañales, maceraciones debidas a la incontinencia y eritemas solares.

Tratamiento de lesiones y úlceras de la piel, heridas, abrasiones y quemaduras menores.

Uso hemostático. Se ha demostrado que el colágeno de tipo 1 induce la adhesión pero no la agregación plaquetaria, por lo tanto, CONDRESS está indicado como hemostático local durante la cirugía. Su eficacia hemostática ha sido demostrada en diferentes tipos de cirugía, incluyendo la arterial, carótida, vascular y general.

Advertencias y Precauciones

Uso tópico externo; no ingerir. No utilice el producto con exfoliantes tópicos o agentes deshidratantes.

Contraindicaciones / Efectos Secundarios

No utilice el producto en pacientes con historia familiar confirmada de reacciones anafilactoides o hipersensibilidad a los componentes. Se recomienda no utilizar el producto en pacientes con sensibilidad o alergia al colágeno.

La aplicación del producto a una distancia inferior a la recomendada puede causar una sensación de enfriamiento, transitoria e inocua, que pasa rápidamente sin provocar daños a la piel. No se han detectado ni han sido reportados fenómenos de sensibilización debidos al uso tópico prolongado del producto.

El dispositivo no influye sobre la conducción de vehículos ni sobre el uso de maquinaria.

No se conocen contraindicaciones para el uso durante el embarazo o la lactancia.

Presentación

Código Producto	Descripción
66801370	CONDRESS Spray 75ml

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON n° 0373 CE n° QPZ-1660-13 Clase CE III 	 No contiene ftalatos	 Radiación gamma	 5 años   	 EURORESEARCH S.C.L Euroresearch s. r. l. - Via Larga, 2 - 20122 MILÁN (Italia) Distribuidor Smith & Nephew, S.A.U. ISO 9001:2008

Curación de Heridas · Smith & Nephew, S.A.U · Frutuós Gelabert, 2-4. 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel. Atención Cliente: 902 30 31 60 · Fax. Atención cliente: 902 30 31 70 ·A-28123297 • educacionAWM@smith-nephew.com · www.smith-nephew.com