



INTRASITE° CONFORMABLE

Apósito de tejido no tejido
impregnado en hidrogel

Características

- Rehidrata de forma suave el tejido necrótico
- Acción desbridante efectiva
- Absorbe el exceso de exudado
- Mantiene un ambiente húmedo que promueve la cicatrización de la herida
- Mantiene el gel en contacto íntimo con la superficie de la herida
- Baja adherencia a la superficie de la herida
- Suave y conformable
- Indicado para el tratamiento de heridas superficiales, profundas, abiertas o socavadas

Descripción

Apósito de tejido no tejido impregnado con un hidrogel amorfo y transparente, limpiador y regenerador de la úlcera, desbridante y absorbente.

Composición

Componente	% de composición
Polímero de carboximetilcelulosa sódica	2,3
Propilenglicol	20,0
Agua purificada	77,7
Soporte	Tejido no tejido de viscosa / poliéster

Modo de acción

INTRASITE° CONFORMABLE combina las ventajas del INTRASITE° GEL con un apósito de tejido no tejido que facilita el tratamiento de heridas superficiales, cavitadas, abiertas o socavadas. El soporte de tejido no tejido asegura que el gel permanece en contacto con la totalidad de la superficie de la herida.

• Elimina tejido necrótico y esfacelado

INTRASITE° CONFORMABLE elimina esfacelos y tiene una acción desbridante suave pero efectiva a través de la absorción de esfacelos y exudado y de la rehidratación del tejido necrótico.

• Adaptable

INTRASITE° CONFORMABLE se adapta fácilmente a las formas difíciles. Facilita el llenado delicado de heridas profundas permitiéndoles cicatrizar desde su base y proporcionando una barrera física que previene el cierre en falso de la herida.


• Curación en ambiente húmedo

INTRASITE° CONFORMABLE mantiene el ambiente húmedo en la superficie de la herida, previene la adherencia y permite realizar los cambios de apósito fácilmente y sin dañar tejido neoformado.

Instrucciones de uso

1. Limpiar previamente la lesión con solución salina estéril.
2. Abrir el sobre.
3. Retirar el apósito completamente y desplegar si fuera necesario.
4. Dependiendo del tipo de herida, aplicar el apósito rellenando sin presionar o cubrir la herida.
5. Cubrir con un apósito secundario adecuado, como por ejemplo un film de poliuretano (OPSITE° FLEXIGRID) o un apósito absorbente (ALLEVYN°).
6. Para cambiar el apósito, retirar suavemente con unas pinzas e irrigar la herida con solución salina estéril. Si se hace difícil retirar INTRASITE° CONFORMABLE, mojar la zona con agua estéril o solución salina para facilitar su retirada. Asegurar que todo el apósito ha sido retirado.

Se recomienda cambiar el apósito por lo menos cada 3 días, e inspección diaria en caso de úlceras infectadas.

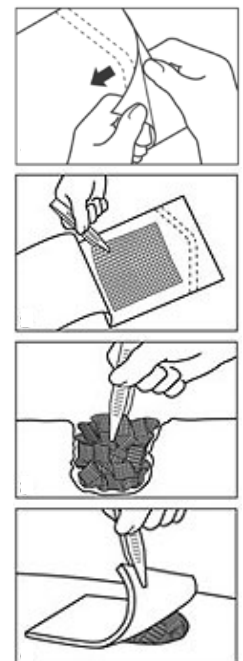

Indicaciones

Tratamiento de lesiones abiertas superficiales o profundas, como úlceras por presión, úlceras venosas de pierna, úlceras de pie diabético, quemaduras, lesiones por radiación, lesiones quirúrgicas que cicatrizan por segunda intención, piel escoriada, fístulas y úlceras fungosas.

Facilita el tratamiento de heridas cavitadas para evitar su cierre en falso.

Precauciones

Sensibilidad conocida a INTRASITE° CONFORMABLE o alguno de sus componentes. No ingerir. Evite el uso en pezones agrietados. Debe utilizarse con cuidado en las zonas cercanas al ojo.

Presentación

Código Producto	Descripción	Unidades x envase	Unidad mínima de venta	Código EAN envase	Código Nacional
66000724	INTRASITE° CONFORMABLE 10 x 20 cm	5 ud.	5 ud.	5000223446888	490730
66000325	INTRASITE° CONFORMABLE 10 x 20 cm	10 ud.	10 ud.	5000223422523	
66000326	INTRASITE° CONFORMABLE 10 x 40 cm	10 ud.	10 ud.	5000223422530	

Especificaciones técnicas

Elasticidad:	600 mín. (Nm ² a 5 Hz)
pH:	5,5 - 8,0
Coefficiente de viscosidad:	200 – 660 (Pa.s ⁿ)
Absorción de fluidos:	mín. 60 ml. (0,9% w/v NaCl/100 g.)
Contenido en sólidos:	2,1-3,3 (% w/w)
Esterilización:	Calor húmedo

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON n° 0086 CE n° CE00356 Clase CE IIb, estéril 		 Calor húmedo	 2 años  	 Smith & Nephew Medical Limited Hull HU3 2BN England. Distribuidor Smith & Nephew, S.A.U. ISO 9001:2008

Curación de Heridas · Smith & Nephew, S.A.U · Fructuós Gelabert, 2-4. 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel. Atención Cliente: 902 30 31 60 · Fax. Atención cliente: 902 30 31 70 · A-28123297 • educacionAWM@smith-nephew.com · www.smith-nephew.com