



# ALLEVYN<sup>◇</sup> LIFE

Apósito multilobular con indicador de cambio y capa enmascaradora para el tratamiento de heridas exudativas

## Características

- Exclusivo diseño multilobular, permite una adaptación más segura que los apósitos tradicionales, incluso en áreas difíciles.
- Capa opaca que reduce el impacto visual del exudado y proporciona un indicador visual para los cambios de apósito.
- Capa central que bloquea el exudado en su interior, incluso bajo presión.
- Capa de espuma de poliuretano con una elevada capacidad de absorción que retiene el exudado.
- Película exterior impermeable que actúa como barrera bacteriana, previniendo la contaminación de la lesión.
- No se adhiere al lecho de la lesión, minimizando el trauma durante los cambios de apósito.
- Puede retirarse y recolocarse sin perder sus propiedades adherentes.
- Minimiza el riesgo de maceración de la piel.

## Descripción

El apósito ALLEVYN® LIFE tiene una estructura multicapa de diseño avanzado, que combina una capa absorbente compuesta por un foam hidrocélular y una capa superabsorbente, entre una capa perforada de contacto con la herida de gel de silicona y un film exterior impermeable altamente transpirable y permeable al vapor de agua. El film, además de ser impermeable, ayuda a prevenir la contaminación bacteriana de la herida. ALLEVYN® LIFE incorpora, además, una capa central enmascaradora que ayuda a disimular las manchas de exudado.

En protocolos de reducción de la presión para la prevención de UPP, ALLEVYN® LIFE ha demostrado su eficacia como ayuda a dispositivos específicos para dicha función.

## Composición

La tabla describe los componentes de ALLEVYN Life:

Capa	Composición
Film de alta evaporación	Film de Poliuretano
Capa enmascaradora	Trilaminar: Fibras PET, capa adhesiva y polipropileno
Capa bloqueadora superabsorbente	Fibras de celulosa con partículas poliacrilato
Foam hidrocélular	Espuma de poliuretano
Capa de contacto adhesiva de silicona	Film de poliuretano con adhesivo de gel de silicona

## Modo de acción

El apósito ALLEVYN® LIFE tiene una estructura multicapa, de diseño avanzado, que facilita una gestión dinámica de los fluidos. Proporciona la humedad óptima, en el lecho de la herida, que promueve la cicatrización y que puede contribuir a reducir el riesgo de maceración. La superficie de contacto de ALLEVYN® LIFE con la herida está recubierta con una capa adhesiva de silicona suave que asegura una retirada atraumática en los cambios de apósito. ALLEVYN® LIFE puede retirarse y recolocarse sin perder sus propiedades adherentes, aunque sigue siendo necesario comprobar que no se arrugue o estire. ALLEVYN® LIFE puede permanecer in-situ sin necesidad de utilizar sujeción secundaria, lo que facilita la colocación y retirada del apósito.

## Instrucciones de uso

1. Limpie la herida conforme a los procedimientos normales.
2. Seleccione el tamaño de apósito adecuado.
3. Prepare y limpie la piel alrededor de la herida, eliminando el exceso de humedad. El vello sobrante debería recortarse para asegurar un buen contacto con la herida.
4. Retire una parte del material protector de ALLEVYN® LIFE y coloque el lado adhesivo del apósito sobre la piel. Alise el apósito sobre la herida comprobando que no queden arrugas.
5. Retire el resto del material protector y alise el apósito. Asegúrese de que solamente la zona de la almohadilla este colocada sobre el lecho de herida.
6. ALLEVYN® LIFE puede utilizarse para la cicatrización de heridas en zonas difíciles como talones y codos. Las lengüetas en las esquinas del apósito pueden solaparse durante la colocación del apósito asegurando que no queden arrugas o que el apósito se estire.



## Indicaciones

Tratamiento por segunda intención de heridas superficiales en fase de granulación, heridas crónicas o agudas exudativas, heridas de espesor total o parcial como: úlceras por presión, úlceras de pierna, heridas infectadas, úlceras de pie diabético, heridas malignas, heridas quirúrgicas, quemaduras de primer y segundo grado, zonas donantes, desgarros de la piel, úlceras fúngicas.

ALLEVYN® LIFE puede utilizarse en combinación con INTRASITE® GEL para heridas necróticas o necrosadas. ALLEVYN® LIFE está indicado para pieles frágiles.

## Precauciones

El apósito ALLEVYN® LIFE no debe utilizarse junto con agentes oxidantes como soluciones de hipoclorito (p. ej. EUSOL) o peróxido de hidrógeno, ya que estos pueden descomponer el componente de poliuretano absorbente del apósito.

Si se produce rojez o sensibilidad discontinuar el uso.

No corte el apósito ya que los componentes internos del apósito podrían contaminar la herida dando como resultado una cicatrización más lenta. Las propiedades antibacterianas del apósito también podrían verse comprometidas lo que podría dar como resultado una infección.

ALLEVYN® LIFE no está indicado para aliviar la presión por sí mismo, a estos efectos, debería utilizarse siempre en combinación con otros dispositivos de alivio de presión.

ALLEVYN® LIFE es un producto de un solo uso. Si se utiliza en más de un paciente podrían producirse contaminaciones cruzadas e infecciones. Una vez abierto el envase la barrera estéril empieza a deteriorarse, por ello los apósitos no utilizados no deben ser conservados para su aplicación posterior.

## Tamaño de apósitos

	S	M	L	XL
Medida del apósito (cmxcm)	10.3 x 10.3	12.9 x 12.9	15.4 x 15.4	21 x 21
Medida del area absorbente (cmxcm)	5.1 x 5.1	7.6 x 7.6	10.2 x 10.2	15.4 x 15.4
Superficie del apósito (cm <sup>2</sup> )	93.3	146.3	211.3	391.9
Superficie del area absorbente (cm <sup>2</sup> )	22.7	51.8	92.9	210.6

## Presentación

Código Producto	Descripción	Unidades x envase	Unidad mínima de venta	Código EAN envase	Código nacional
66801067	ALLEVYN LIFE 10,3 x 10,3 cm	10	10	5000223477998	
66801068	ALLEVYN LIFE 12,9 x 12,9 cm	10	10	5000223478025	
66801069	ALLEVYN LIFE 15,4 x 15,4 cm	10	10	5000223478056	
66801070	ALLEVYN LIFE 21 x 21 cm	10	10	5000223478087	
66801742*	ALLEVYN LIFE 15,4 x 15,4 cm	3	3	8470004730258	473025.8
66801743*	ALLEVYN LIFE 21 x 21 cm	3	3	8470004918458	491845.8

\* Reembolsable por la Seguridad Social

## Especificaciones técnicas

<b>Capacidad de absorción:</b>	mín. 94 g/100cm <sup>2</sup>
<b>Extensibilidad:</b>	1,9 kgf/cm
<b>Permeabilidad al vapor de agua:</b>	1000 – 3500 g/m <sup>2</sup> 24 horas

### RESULTADOS DE ENSAYO Biotecnal ES-311.734 (EI)

**Capacidad de absorción y velocidad:** Biotecnal ES-311.734 (EI) Basado en UNE-EN 13726-1:2003

24 horas: 1,42 g/cm<sup>2</sup>      48 horas: 1,48 g/cm<sup>2</sup>

**Capacidad de retención de exudado:** Biotecnal ES-311.734 (EI) Basado en UNE-EN 13726-1:2003

24 horas: 1,42 g/cm<sup>2</sup>      48 horas: 1,53 g/cm<sup>2</sup>

**Capacidad de evaporación:** Biotecnal ES-311.734 (EI) Basado en UNE-EN 13726-2:2003

24 horas: 0,05 g/cm<sup>2</sup>      48 horas: 0,08 g/cm<sup>2</sup>

**Conformabilidad:** Biotecnal ES-311.734 (EI) Basado en UNE-EN 13726-4:2003

Extensibilidad:                  Sentido 1: 7,2 N/cm                  Sentido 2: 7,3 N/cm

Estiramiento permanente: Sentido 1: 1 N/cm                  Sentido 2: 0,3 N/cm

**Repelencia al agua (capacidad hidrofoba):** Biotecnal ES-311.734 (EI) Basado en UNE-EN 13726-3:2003

Correcto

**Control del olor:** Biotecnal ES-311.734 (EI) Basado en UNE-EN 13726-6:2003

3,30 horas

**Medidas:** Biotecnal ES-311.734 (EI) Basado en UNE-EN 13726:2003

Área total:                                  395,36 g/cm<sup>2</sup>

Área capa absorbente:                  208,32 g/cm<sup>2</sup>

Medidas compresa+soporte:          21,2 x 21 cm

Medidas compresa:                      15,5 x 15,4 cm

**Barrera bacteriana- ensayo en seco:** Biotecnal ES-311.734 (EI) Basado en UNE-EN ISO 22612

Correcto, el producto actúa como barrera bacteriana

**Barrera bacteriana- ensayo en húmedo:** Biotecnal ES-311.734 (EI) Basado en UNE-EN ISO 22610

Correcto, el producto actúa como barrera bacteriana

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON n° 0086 CE n° CE00356 Clase CE  IIb, estéril			 3 años  	 <b>Smith &amp; Nephew Medical Limited</b> Hull HU3 2BN England.  <b>Distribuidor</b> Smith & Nephew, S.A.U. ISO 9001:2008

Curación de Heridas · Smith & Nephew, S.A.U · Fructuós Gelabert, 2-4. 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel. Atención Cliente: 902 30 31 60 · Fax. Atención cliente: 902 30 31 70 · A-28123297 • educacionAWM@smith-nephew.com · www.smith-nephew.com