



CUTICERIN[◊]

Gasa impregnada para heridas superficiales

Características

- Baja adherencia.
- Minimiza el dolor en los cambios de apósito, reduce el riesgo de que el tejido de granulación crezca a través del apósito.
- Permeable al aire.
- Permite el paso del exudado.
- Mantiene la herida elástica, evita contracturas en la cicatriz.

Descripción

Gasa impregnada compuesta de un tejido de acetato suave, con impregnación grasa y neutra, en diferentes tamaños. Esto reduce el riesgo de que el tejido de granulación crezca a través del apósito.

Composición

Componentes

Gasa de tejido de acetato de viscosa.

Recubrimiento hidrofóbico con base de petrolato a partir de una mezcla de alcohol de lanolina sin fragancia.

Modo de acción

Los apósitos de gasa no deben adherirse a la herida, ya que con ello se perjudica el crecimiento de tejido de granulación, es doloroso el cambio de apósito y se alarga el proceso de curación.

Los poros del tejido no quedan obstruidos por la impregnación, con lo que el exudado atraviesa libremente la gasa y puede ser absorbido por el apósito.

La impregnación tiene una utilidad adicional: la herida se mantiene elástica, con lo que se evitan contracturas en la cicatriz como consecuencia de la sequedad.

Instrucciones de uso

1. Abrir el sobre y retirar el apósito con pinzas o usando guantes.
2. Colocar el apósito suavemente sobre la herida.
3. Cubrir con una compresa absorbente para recoger el exceso de exudado.
4. Fijar con una venda o gasa adhesiva.

Indicaciones

Tratamiento de heridas superficiales exudativas, en especial: quemaduras, abrasiones, lesiones por radiación y zonas donantes.

Presentación

Código Producto	Descripción	Unidades x envase	Unidades x embalaje	Unidad mínima de venta	Código EAN envase
66045560	7,5 cm x 7,5 cm	50	20	50	84411359902266
66045561	7,5 x 20 cm	50	20	50	84411359902259

Especificaciones técnicas

Gasa de tejido de acetato de viscosa:

Color:	Blanco.
Número de hilos en el urdimbre:	21 ±2 /cm
Número de hilos en la trama:	30 ±3 /cm
Gramaje:	120 ±15 g/m ² .

Impregnante Aquaphor:

Color:	Amarillo claro.
--------	-----------------

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante	
ON n° 0086 CE n° CE00356 Clase CE IIa, estéril 			 3 años  	  25° 	 Smith & Nephew Medical Limited Hull HU3 2BN England. Distribuidor Smith & Nephew, S.A.U. ISO 9001:2008

Curación de Heridas · Smith & Nephew, S.A.U · Fructuós Gelabert, 2-4. 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel. Atención Cliente: 902 30 31 60 · Fax. Atención cliente: 902 30 31 70 · A-28123297 • educacionAWM@smith-nephew.com · www.smith-nephew.com