



# INTRASITE<sup>◇</sup> GEL

Hidrogel de acción limpiadora y regeneradora

## Características

- Proporciona un ambiente húmedo a la lesión, estimulando su curación.
- Rehidrata de forma suave el tejido necrótico.
- Acción desbridante efectiva.
- Absorbe el exceso de exudado.
- Fácil aplicación y cambio.
- No adherente.
- Acción bacteriostática.
- No daña el tejido viable ni la piel periulceral.

## Descripción

INTRASITE® GEL es un hidrogel transparente y amorfo formado por cadenas poliméricas entrelazadas de carboximetilcelulosa parcialmente hidratadas y propilenglicol.

## Composición

Polímero de carboximetilcelulosa sódica, propilenglicol y agua purificada.

Componente	% de composición
Polímero de carboximetilcelulosa sódica	2,3
Propilenglicol	20,0
Agua purificada	77,7

## Modo de acción

INTRASITE® GEL utiliza las ventajas comprobadas de la cura en ambiente húmedo, siendo capaz de eliminar los restos necróticos, el exceso de exudado y regenerando el tejido de granulación.


**Absorción del exudado:** en la fase inflamatoria del proceso de curación de la herida, la escara está formada por la acumulación de células muertas en el exudado. Mediante el drenaje del exceso de exudado de la superficie de la herida, INTRASITE® GEL detiene la acumulación de restos celulares y evita la formación de la escara.

**Acción autolítica:** si la escara ya está formada, la acción rehidratante del gel la elimina lenta y eficazmente sin dañar el tejido sano neoformado. El desbridamiento autolítico depende de la superficie global de la herida a humedecer.

**Regeneración del tejido:** INTRASITE® GEL crea un ambiente húmedo que permite una rápida granulación y epitelización.

## Instrucciones de uso

1. Limpiar la lesión con solución salina estéril y secar cuidadosamente la piel perilesional.
2. Retirar el tapón protector de la boquilla.
3. Limpiar el extremo de la boquilla del envase con una gasa antiséptica adecuada.
4. Romper la boquilla con una ligera presión lateral.
5. Introducir el gel en la lesión. Para ello presionar la base del envase, procurando que el extremo de la boquilla no entre en contacto con la lesión. Aplicar una capa de gel de aproximadamente 5 mm de espesor sobre la superficie de la lesión. Desechar el gel sobrante.
6. Cubrir la lesión con el apósito secundario adecuado (p.ej. ALLEVYN®, OPSITE®, MELOLIN® o CARBONET®). La elección del apósito adecuado depende de las características de la herida y la frecuencia de cambio.

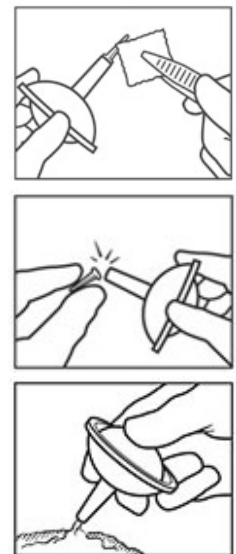

## Indicaciones

Indicado para la eliminación de tejido necrótico en lesiones superficiales, profundas o socavadas; por ejemplo, úlceras por presión, úlceras de pierna, úlceras de pie diabético, lesiones malignas, quemaduras, lesiones quirúrgicas, escaldaduras, laceraciones, rozaduras, amputaciones y úlceras fungosas.

También para el tratamiento de lesiones cavitadas en estado de granulación, piel escoriada y quemaduras provocadas por radiación.

Puede utilizarse en heridas infectadas bajo supervisión médica.

## Precauciones

Sensibilidad a INTRASITE° GEL o a alguno de sus ingredientes (propilenglicol).

Para uso externo solamente. Usar con precaución en las zonas cercanas al ojo y en heridas profundas con aberturas estrechas (fistulas) y en cavidades donde la retirada del gel pueda ser dificultosa.

## Contraindicaciones

Quemaduras de tercer grado.

## Presentación

Código Producto	Descripción	Unidades x envase	Unidad mínima de venta	Código EAN envase	Código Nacional
7311	INTRASITE GEL 15 g	10	10	5000223415778	
66000240	INTRASITE GEL 15 g	5	5	5000223415778	456202.6
7313	INTRASITE GEL 25 g	10	10	5000223415785	

## Especificaciones técnicas

**Peso total:** mín. 15 g / 25 g.

**pH:** 6,0 – 8,0

**Coefficiente de viscosidad:** 200 – 600 (Pa.s<sup>n</sup>)

**Absorción de fluidos:** mín. 60 ml. (0,9% w/v NaCl/100 g.)

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON n° 0086 CE n° CE00356 Clase CE IIb, estéril 		 Autoclave	 3 años  	 <b>Smith &amp; Nephew Medical Limited</b> Hull HU3 2BN England.  <b>Distribuidor</b> Smith & Nephew, S.A.U. ISO 9001:2008

Curación de Heridas · Smith & Nephew, S.A.U · Fructuós Gelabert, 2-4. 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel. Atención Cliente: 902 30 31 60 · Fax. Atención cliente: 902 30 31 70 · A-28123297 · educacionAWM@smith-nephew.com · www.smith-nephew.com