



IODOSORB° POWDER

Polvo de cadexómero de yodo

Características

- Limpia el lecho de la lesión.
- Absorbe esfacelos, debris y exudado.
- Efectivo ante un amplio espectro de microorganismos.
- Liberación prolongada de yodo, de forma continua, manteniendo los niveles de yodo en la lesión.
- Promueve la cicatrización de la lesión.
- Fácil de aplicar.
- Se retira fácilmente, sin dañar el epitelio neoformado.
- Ayuda a eliminar el olor.
- El cambio de color del polvo indica el momento en que el producto puede retirarse.
- Eficaz frente al Biofilm.

Descripción

IODOSORB® POWDER es un polvo estéril marrón oscuro que está compuesto de cadexómero (microesferas de almidón modificado) con yodo. Las esferas de cadexómero son biodegradables. IODOSORB® POWDER absorbe el exceso de exudado y de esfacelos del lecho de la lesión y reduce los microorganismos sobre la superficie de la lesión. Al hacer esto, se transforma en un gel blando y húmedo.

Producto recomendado por la revisión Chrocrane como eficaz para tratar el Biofilm, mostrando una reducción logarítmica (log 10 CFU/ml) de 7 frente al mismo.

Composición

1g de polvo contiene 991 mg de cadexómero y 9 mg de yodo

Componente	% de composición
cadexómero	99,1 %
yodo	0,9 %

Modo de acción

Iodosorb es un apósito antimicrobiano único, que incorpora la tecnología de las microesferas inteligentes del cadexomero para controlar el exudado de la herida y procurar una liberación sostenida de yodo.

Acción bactericida: El Iodo es liberado de forma balanceada permitiendo una acción bactericida sostenida

Acción desbridante: El cadexómero absorbe el exudado y el tejido muerto del lecho de la herida, introduciendolos en su interior.

Controla el exudado: Cuanto más exudado es absorbido por las microesferas inteligentes, más rápido desbrida y más yodo es liberado a la herida.

De esta manera permite acelerar la fase inflamatoria de la cicatrización.

Instrucciones de uso

1. Lavarse las manos bien antes y después del uso. Utilizando guantes, limpiar la lesión y el área de alrededor con un chorro suave de agua o solución salina. NO SECAR la superficie de la lesión.
2. Aplicar IODOSORB® POWDER sobre la superficie de la lesión hasta formar una capa de 3 mm de profundidad, con la misma forma de la lesión. Tapar la lesión completamente con un apósito secundario apropiado (Tipo ALLEVYN®). Aplicar un vendaje de compresión si fuera apropiado. Después de la aplicación debe tirarse el sobrante de IODOSORB® POWDER.

Una sola aplicación de IODOSORB® POWDER no debe superar los 50 g (equivale a 16 sobres de 3 g) y nunca debe aplicarse más de 150 g a la semana (equivale a 50 sobres de 3 g).

Cambios de Iodosorb Powder

1. IODOSORB° POWDER debe cambiarse cuando esté saturado con el exudado procedente de la lesión y haya liberado todo el yodo. Esto se indica mediante la pérdida de color, normalmente de dos a tres veces a la semana. Si la lesión exuda mucho pudiera ser necesario realizar cambios más frecuentes.. Si fuera necesario, humedecer el apósito durante unos minutos y luego retirarlo.
2. Con cuidado retirar IODOSORB° POWDER utilizando un chorro suave de agua o solución salina.
3. Con cuidado absorber el exceso de líquido, de haberlo, dejando la superficie de la lesión ligeramente húmeda antes de volver a aplicar IODOSORB° POWDER.

Indicaciones

IODOSORB° POWDER está indicado para el tratamiento tópico de lesiones que exudan crónicamente. IODOSORB° POWDER puede utilizarse debajo de una terapia de compresión. IODOSORB° POWDER puede utilizarse en úlceras infectadas. Cuando el producto se utiliza en úlceras infectadas, la infección debe ser inspeccionada y tratada según el protocolo clínico local.

Precauciones durante el uso

El contenido del sobre sólo debe utilizarse en un paciente.

No utilizar IODOSORB° POWDER cerca de los ojos, oídos, nariz o boca.

El producto es para uso externo solamente.

IODOSORB° POWDER puede ocasionar un ligero dolor (escozor, picor) pasajero la primera hora después del tratamiento. Esto significa que el polvo está comenzando a limpiar la lesión.

Ocasionalmente, IODOSORB° POWDER puede hacer que la piel perifulceral se inflame o enrojezca. Esta es una condición pasajera. Si los síntomas persisten o si el paciente experimenta otros síntomas, deberá contactar con el facultativo.

El contacto con la piel perifulceral/piel intacta debe reducirse al mínimo.

Es posible que se forme una corteza adherente si se deja que IODOSORB° POWDER se seque.

Una sola aplicación de IODOSORB° POWDER no debe superar los 50 g (equivale a 16 sobres de 3 g) y nunca debe aplicarse más de 150 g a la semana (equivale a 50 sobres de 3 g).

La duración del tratamiento no debe ser superior a los 3 meses.

Advertencias

Hay riesgo posible de interacción con el litio, lo que da como resultado una posibilidad mayor de que se produzca hipotiroidismo.

NO utilizar IODOSORB° POWDER concomitantemente con antisépticos de mercurio o taurolidina.

Si el paciente debe realizarse pruebas tiroideas deberá informar al facultativo.

Contraindicaciones

IODOSORB® POWDER no debe usarse sobre tejido necrótico seco o en pacientes con sensibilidad conocida al yodo o a cualquiera de los otros componentes.

No utilizar IODOSORB® POWDER en niños, mujeres embarazadas o lactantes ni en pacientes con trastornos de la glándula tiroides o disfunción renal. (ej. Tiroiditis de Hashimoto o nódulos no tóxicos de bocio).

Presentación

Código Producto	Descripción	Unidades x envase	Unidad mínima de venta	Código EAN envase
66001286	Iodosorb Powder (sobres 3g)	7 sobres/caja	1 caja	5000223457662

Especificaciones técnicas

Capacidad de absorción: 1 gr. de IODOSORB® POWDER absorbe 6 ml. de exudado

Cantidad de Yodo liberada: 0,9 mg./gr.

Efecto bactericida Reducción logaritmica de numero de colonias
 $\log_{10} \text{CFU/ml} = 7 - 9$

**Efecto bactericida mínimo eficaz= 3

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON n° 0086 CE n° CE00356 Clase CE III 			  	 Smith & Nephew Medical Limited Hull HU3 2BN England. Distribuidor Smith & Nephew, S.A.U. ISO 9001:2008

Curación de Heridas · Smith & Nephew, S.A.U · Fructuós Gelabert, 2-4. 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel. Atención Cliente: 902 30 31 60 · Fax. Atención cliente: 902 30 31 70 · A-28123297 • educacionAWM@smith-nephew.com · www.smith-nephew.com