



Concepto para la terapia del linfedema

Tratamiento eficaz del linfedema
Una guía para profesionales de la medicina

Headquarters
medi GmbH & Co. KG
Medicusstraße 1
95448 Bayreuth
Germany
T +49 921 912-0
F +49 921 912-781
export@medi.de
www.medi.de/en

medi Bayreuth España SL
C/Canigó 2-6 bajos
Hospitalet de Llobregat
08901 Barcelona
Spain
T +34 93 260 04 00
F +34 93 260 23 14
medi@mediespana.com
www.mediespana.com



98C09/04.2019

Concepto de terapia de linfología de medi

Tratamiento eficaz del linfedema



Tratamiento individual para cada paciente de linfedema

1 Fase de descongestión

circaid reduction kit

2 Fase de transición

Algunos pacientes se benefician de un período de uno a tres meses de gestión de la transición antes de progresar a una terapia a largo plazo.

circaid juxtafit

3 Fase de mantenimiento

Consideración de criterios paciente-individuo

Necesidad de colores, diseños, gran variedad de variantes

Desafíos con las medias de compresión (por ejemplo, ponerse, quitarse la ropa)



Compresión adicional de noche

Recomendación de productos

mediven flat knit (e. g. mediven 550 leg)

circaid juxtafit

circaid graduate

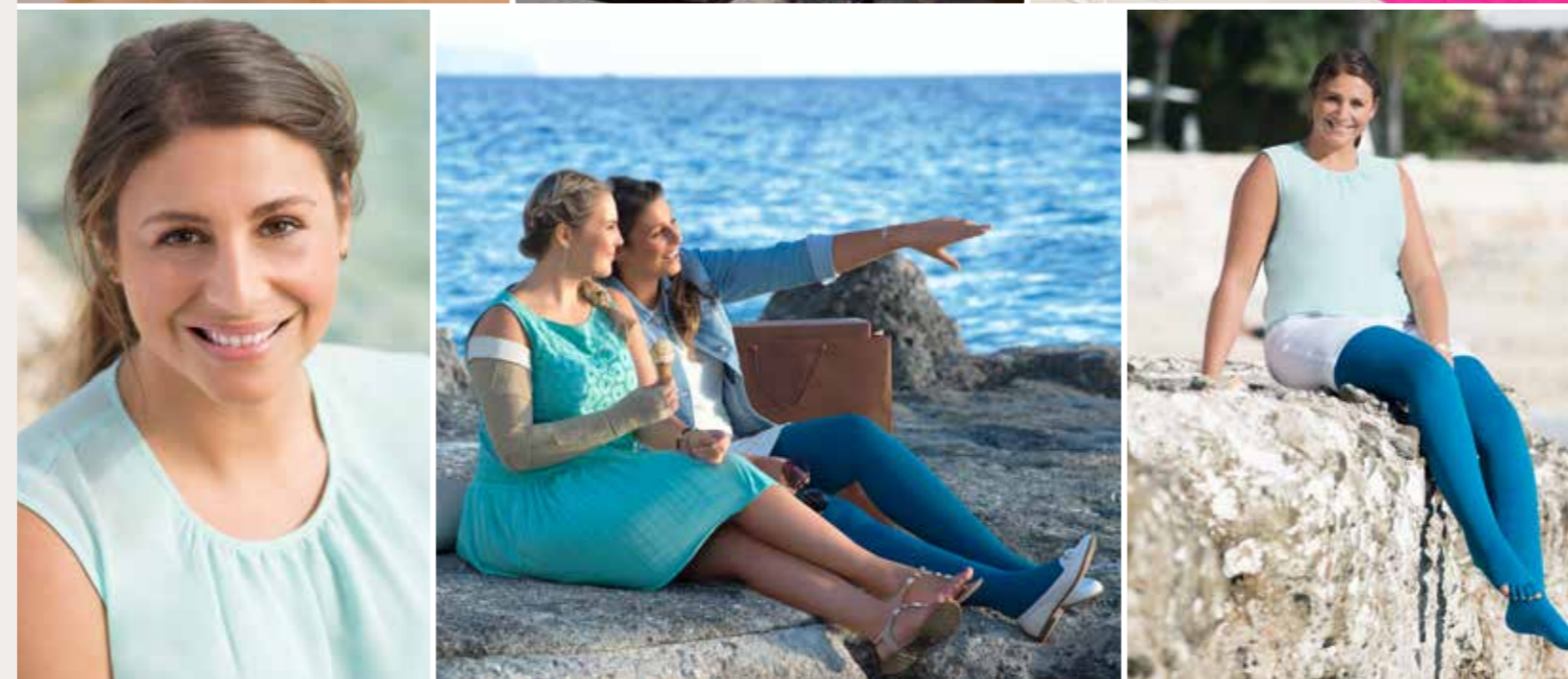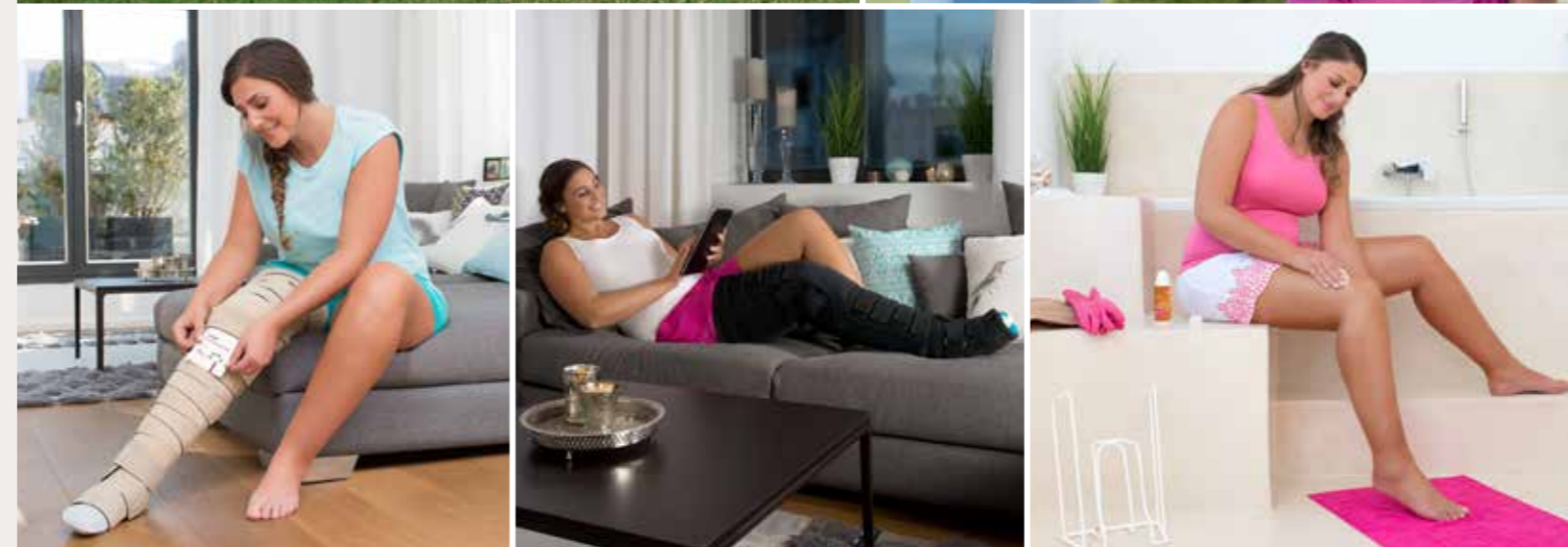

medi GmbH & Co. KG
Medicusstraße 1
D-95448 Bayreuth / Germany
T +49 921 912-0
F +49 921 912-781
export@medi.de
www.medi.de/en

medi Australia Pty Ltd
83 Fennell Street
North Parramatta NSW 2151
Australia
T +61 2 9890 8696
F +61 2 9890 8439
sales@mediaustralia.com.au
www.mediaustralia.com.au

medi Austria GmbH
Adamgasse 16/7
6020 Innsbruck
Austria
T +43 512 57 95 15
F +43 512 57 95 15 45
vertrieb@medi-austria.at
www.medi-austria.at

medi Belgium bvba
Posthoornstraat 13/1
3582 Koersel
Belgium
T +32 11 24 25 60
F +32 11 24 25 64
info@medibelgium.be
www.medibelgium.be

medi Brasil
Rua Cristovan de Vita, n.º 260, Un. 30,
Centro Logístico Raposo Tavares,
Vila Camargo
Vargem Grande Paulista - SP
CEP 06730-000
Brasil
T +55 11 3500 8005
sac@medibrasil.com
www.medibrasil.com

MAXIS a.s.,
medi group company
Slezská 2127/13
120 00 Prague 2
Czech Republic
T +420 571 633 510
F +420 571 616 271
info@maxis-medica.com
www.maxis-medica.com

medi Danmark ApS
Vejløgardsvej 59
2665 Vallensbaek Strand
Denmark
T +45 70 25 56 10
F +45 70 25 56 20
kundeservice@sw.dk
www.medit danmark.dk

medi France
Z.I. Charles de Gaulle
25, rue Henri Farman
93297 Tremblay en France Cedex
France
T +33 1 48 61 76 10
F +33 1 49 63 33 05
infos@medi-france.com
www.medi-france.com

medi UK Ltd.
Plough Lane
Hereford HR4 OEL
Great Britain
T +44 1432 37 35 00
F +44 1432 37 35 10
enquiries@mediuk.co.uk
www.mediuk.co.uk

medi Hungary Kft.
Bokor u. 21.
1037 Budapest
Hungary
T +36 1371 0090
F +36 1371 0091
info@medi.hu
www.medi.hu

medi Italia s.r.l.
Via Giuseppe Ghedini, 2
40069 Zola Predosa (BO)
Italy
T +39 051 6 13 24 84
F +39 051 6 13 29 56
info@medi-italia.it
www.medi-italia.it

medi Nederland BV
Heusing 5
4817 ZB Breda
The Netherlands
T +31 76 57 22 555
F +31 76 57 22 565
info@medi.nl
www.medi.nl

medi Norway AS
Vestheimvegen 35
4250 Kopervik
Norway
T +47 52 84 45 00
F +47 52 84 45 09
post@medinorway.no
www.medinorway.no

medi Polska Sp. z o.o.
Zygmunta Starego 26
44-100 Gliwice
Poland
T +48 32 230 60 21
F +48 32 202 87 56
info@medi-polska.pl
www.medi-polska.pl

medi Bayreuth Unipessoal Lda.
Rua do Centro Cultural, no. 43
1700-106 Lisbon
Portugal
T +351 21 843 71 60
F +351 21 847 08 33
medi.portugal@medibayreuth.pt
www.medi.pt

medi Trading (Shanghai) Co. Ltd.
Unit 1806, Floor 18,
Sandhill Plaza No. 1
2290 Zuchongzhi Road
200131 Shanghai
People's Republic of China
T +86 1366 1668 687
F +86 2161 7696 07
infocn@medi.cn

medi RUS LLC
Business Center NEO GEO
Butlerova st., 17
117342 Moscow
Russia
T +7 495 374-04-56
F +7 495 374-04-56
info@medirus.ru
www.medirus.ru

medi Bayreuth España SL
C/Canigó 2 – 6 bajos
Hospital de Llobregat
08901 Barcelona
Spain
T +34 93 260 04 00
F +34 93 260 23 14
medi@mediespana.com
www.mediespana.com

medi Sweden AB
Box 6034
192 06 Sollentuna
Sweden
T +46 8 96 97 98
F +46 8 626 68 70
info@medi.se
www.medi.se

Medi Turk
Ortopedi Medikal İç ve Dis Tic. AS
Kültür mah. çaldıran sok.14 / 3
06420 Çankaya / Ankara
Turkey
T +90 312 435 20 26
F +90 312 434 22 82
info@medi-turk.com
www.medi-turk.com

medi Ukraine LLC
Tankova Str. 8, office 35
Business-center 'Flora Park'
Kiev 04112
Ukraine
T +380 44 591 11 63
F +380 44 392 73 73
info@medi.ua
http://medi.ua

medi Orient M.E.A. ZCC
TAURUS GROUP
Suite No. M01 Wasel Al Mamzar Bldg.
Al Wuhida Road, Al Mamzar
P.O.BOX NO. 91464
DUBAI, UAE
United Arab Emirates
T +971 4 2557344
F +971 4 2557399
md@taurusgroup.net

medi USA L.P.
6481 Franz Warner Parkway
Whitsett, N.C. 27377-3000
USA
T +1 336 4 49 44 40
F +1 888 5 70 45 54
info@mediusa.com
www.mediusa.com



Liderando el futuro de la terapia compresiva

Una ventaja para el tratamiento. Conceptos de asistencia sanitaria convincentes. Productos efectivos

medi World of Compression: orientados al futuro más de 65 años de experiencia en el campo de la compresión. Su socio para las más altas exigencias de asistencia conforme a la normativa con elevada concordancia del paciente. Demos forma juntos al futuro y creemos experiencias positivas de la marca, ¡para usted y sus pacientes!

Conceptos de tratamiento convincentes

Confianza en un tratamiento eficaz de las enfermedades linfáticas, combinando las fases de descongestión, transición y mantenimiento.

Trate a sus pacientes con soluciones personalizadas, conformes a la normativa y económicas. Ofreciendo productos eficaces para mejorar la concordancia y la satisfacción de los pacientes.

Concepto de terapia de linfología de medi

Tratamiento eficaz del linfedema



Grandes resultados de reducción durante la terapia linfática descongestiva.

• circaid® reduction kit



Dispositivo de compresión efectivo a lo largo de la fase de transición.

• circaid® juxtafit®




Dispositivos de compresión para mantener los mejores resultados de la terapia.

• mediven® flat knit
• circaid® juxtafit®
• circaid® graduate

medi. I feel better.



Fases de tratamiento conforme a las normas

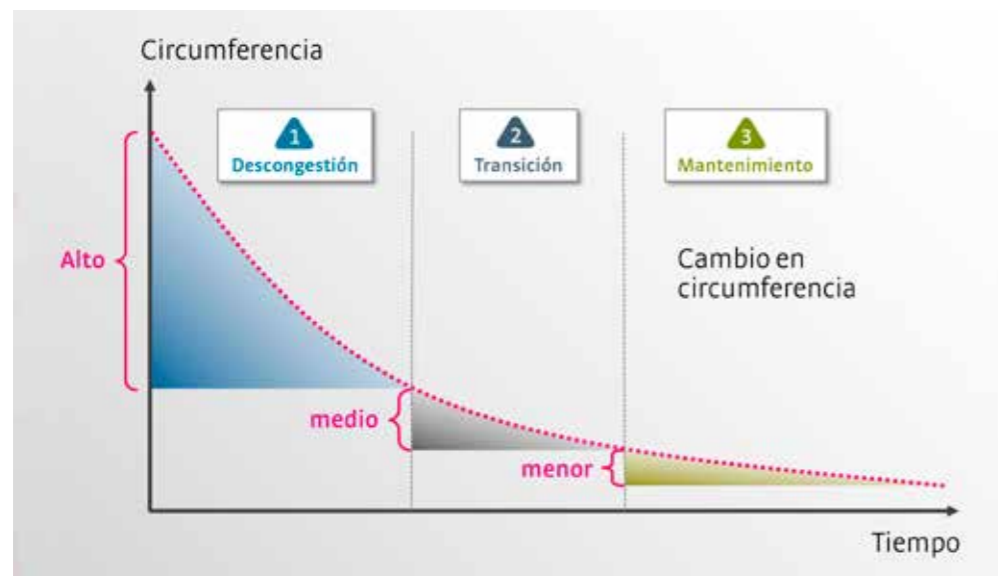

Fase 1 – Descongestión

Definición

La terapia intensiva reduce la inflamación descongestionando las vías linfáticas deterioradas, reduce la carga linfática, fomenta el desarrollo de vasos de drenaje colaterales y estimula la función del resto de vasos patentes.

Los protocolos de terapias intensivas utilizan una combinación del cuidado para la piel, MLLB, ejercicio / movimiento y elevación. El protocolo podría incluir el drenaje linfático manual (MLD) o MLD con compresión neumática intermitente (IPC).

La frecuencia del tratamiento, el grado de compresión y el tipo de vendaje utilizado deberían adaptarse según las necesidades físicas y psicosociales del paciente.

Fase 2 – Transición

Definición

Tras la terapia intensiva, algunos pacientes podrían beneficiarse de un período de gestión de transición de uno a tres meses antes de pasar a la terapia a largo plazo. El período de transición podría resultar útil para:

- Maximizar los efectos de la terapia intensiva y estabilizar las fluctuaciones de la inflamación hasta un nivel aceptable individualmente
- Prevenir una inflamación de rebote en la transferencia a las medias de compresión
- Evaluar estrategias de mantenimiento a largo plazo
- Apoyar y facilitar la autogestión
- Reducir la intervención del médico

Fase 3 – Mantenimiento

Definición

La gestión a largo plazo del linfedema se centra en mejorar la función del sistema linfático, limitar un mayor deterioro de la inflamación y controlar la enfermedad a largo plazo.

El éxito depende en la autogestión de pacientes y cuidadores, con formación, práctica y apoyo médico y psicosocial adecuados y efectivos. Esto implica lo siguiente:

- Cuidado diario de la piel
- Ejercicio / movimiento
- Compresión – prendas de compresión, principalmente productos de tejido plano o un dispositivo de compresión ajustable
- La gestión a largo plazo del linfedema suele implicar el uso de prendas de compresión.

Fases y productos definidos



Fase 1 – Descongestión circaid® reduction kit

Características:

- Reajutable y recortable según las necesidades del paciente
- Ajustable a medida que el paciente cambia de volumen
- Ideal para pacientes con grandes circunferencias y formas complicadas
- Sistema de tensión integrado (BTS) para establecer y controlar el nivel de tensión terapéutica correcto
- La colocación y retirada sencillas fomentan la autonomía del paciente

La descongestión implica cambios significativos en la circunferencia de la extremidad. circaid reduction kit es capaz de cubrir las necesidades de esta fase.




Fase 2 – Transición circaid® juxtafit®

Características:

- Sistema de cintas reajustables que garantiza un ajuste perfecto
- Sistema de presión integrado (BPS) para establecer el nivel de presión terapéutica correcto
- Disponible como estándar y productos MTM
- La colocación y retirada sencillas fomentan la autonomía del paciente

La fase de transición implica únicamente cambios moderados o ligeros en las circunferencias de la extremidad. Los productos circaid juxtafit son capaces de cubrir las necesidades en esta fase. El producto ayuda a maximizar los efectos de la fase de descongestión antes de pasar a la fase de mantenimiento con productos de tejido plano.

Fase 3 – Mantenimiento mediven® tejido plano

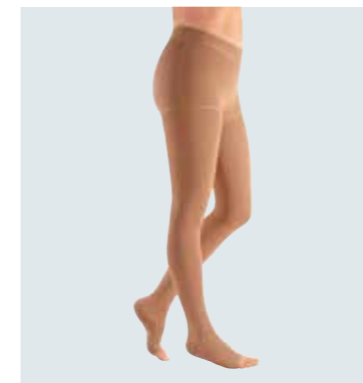

Características:

- Elementos a la moda, como por ejemplo, colores, diseños, etc.
- Variedad de accesorios, como por ejemplo, Lymphpads, cintas superiores
- Diferentes tipos de productos y modelos
- Fabricado según RAL

circaid® juxtafit®



Características:

- Manejo seguro
 - Colocación y retirada sencillas
 - Sistema BPS
- Si los pacientes no pueden llevar medias de tejido plano por cualquier motivo o si deben utilizar una compresión combinada, también pueden utilizar el circaid juxtafit.

circaid® graduate



Características:

- Compresión acolchada
 - Reajutable
 - Cintas inelásticas
- circaid graduate es cómodo y suave. Por lo tanto, es ideal para usarlo durante la noche.

Testimonios

El concepto de terapia de medi ha sido probado y aprobado por profesionales de la medicina y pacientes. Las siguientes afirmaciones añaden autenticidad y credibilidad al concepto y ponen de manifiesto la asistencia individualizada.



Dr. Franz-Josef Schingale

Que todos los dispositivos provengan de un mismo fabricante es una ventaja positiva. Con la gama de productos ajustable, la fase de descongestión (fase I de la terapia), especialmente en linfedemas de nivel 1 y 2, puede llevarse a cabo en atención ambulatoria. En la fase de mantenimiento, el paciente puede autogestionar el tratamiento con unas pocas instrucciones y contribuir a la obtención de resultados excelentes. De esta forma, como médico asistente, puedo conseguir mejores resultados y controlar los costes. La supervisión se lleva a cabo conforme a la normativa y el paciente recibe una muy buena asistencia. Los pacientes se sienten bien durante el tratamiento y puede alcanzarse rápidamente una reducción efectiva del edema en la fase 1. Por lo tanto, el resultado se mantiene de forma eficaz.



Stefanie Meyer, asistente médico
Lympho-Opt Klinik, Pommelsbrunn

«circaid reduction kit puede ajustarse individualmente a cada paciente. Es fácil de usar y el rango de presiones puede ajustarse en cualquier momento para mejorar la eficacia».

Nota

Seguimos generando más comentarios de profesionales de la medicina y pacientes a medida que proseguimos con nuestro trabajo.

Concepto de terapia de linfología de medi: una gran solución desde el principio.

medi personaliza el tratamiento del linfedema más que nunca.

Los profesionales de la medicina conocen la terapia de compresión eficaz con todos los productos de tejido plano mediven en la fase de mantenimiento. medi ofrece ahora además un dispositivo de compresión ajustable para la fase de descongestión, accediendo al paciente justo desde el principio del tratamiento. Esto simplifica y acelera todo el proceso de gestión del paciente. Ahora, medi ofrece a los pacientes todos sus productos de una única fuente, para la fase de descongestión, de transición y de mantenimiento.

circaid reduction kit – la conclusión perfecta del tratamiento del linfedema.

El concepto de terapia de medi ofrece una asistencia adaptada a las indicaciones que fomenta la autogestión del paciente, contribuyendo así al éxito a largo plazo. Con el circaid reduction kit, medi ofrece al paciente una solución personalizada desde el comienzo de la terapia.

Un enfoque de componente único para crear la solución que usted necesita

circaid reduction kit es compatible con aplicaciones únicas con componentes para el brazo, la pantorrilla, el muslo y la rodilla que pueden utilizarse por separado o en combinaciones para cumplir con las necesidades específicas del paciente. Los componentes pueden combinarse con piezas únicas para el pie y la mano, creando así una solución de descongestión y que permite al paciente participar desde el primer día. El paciente podrá continuar con el tratamiento fuera de la clínica, lo que mejora los resultados generales.



Solución personalizada

Mida y corte para adaptarse a su paciente con un sistema de compresión probado e inelástico. Aplique los componentes, logrando una solución única diseñada por usted mismo centrándose en las necesidades de su paciente. A medida que su paciente evoluciona, la solución personalizada también podrá progresar a través de ajustes adicionales y una personalización adicional si fuera necesario. El progreso podrá verse y sentirse fácilmente a medida que el circaid reduction kit hace su trabajo.



Autonomía del paciente por medio del compromiso

Su paciente podrá colocarse o quitarse los componentes del reduction kit inmediatamente, consiguiendo un nivel de independencia que sería imposible con los vendajes. Productos de compresión ajustable para fomentar la autonomía del paciente. El paciente ajustará voluntaria y deliberadamente el sistema para mantener los niveles de compresión a medida que el edema se reduce. Esto establece un nuevo nivel de libertad para el médico y el paciente, ya que no se ven limitados por visitas clínicas para reaplicar vendajes convencionales, lo que facilita una progresión constante durante la descongestión.

1
Fase



circaid® reduction kit para la fase de descongestión

Productos de compresión ajustable para el brazo y la pierna durante la fase de descongestión.

Indicaciones

- Linfedema nivel 1 – 3, fase de descongestión

Características del producto:

- Sistema de cintas yuxtapuestas que garantiza una adaptación individual en todo momento, incluso después de que la descongestión comience
- Tamaños ajustables: puede adaptarse a la reducción de las circunferencias del brazo y la pierna
- La gran variedad de productos del reduction kit permite la personalización de paciente a paciente.
- Sistema de tensión integrado (BTS) para establecer y controlar el rango de tensión terapéutica correcto

Beneficios para sus pacientes:

- La terapia de compresión ajustable contribuye al control y compromiso del paciente
- La sencilla manipulación durante la colocación y la retirada ofrece un nivel de compromiso e independencia del paciente nunca vistos en la fase de descongestión
- Mejora de la calidad de vida: puede retirarse durante el cuidado personal

Sus beneficios:

- Ajustable a las necesidades específicas de su paciente:
- Personalice el tamaño para formas de extremidades únicas
- Ajústelo a medida que el paciente progresa
- Ofrezca un tratamiento para las zonas más complicadas con cinchas de repuesto
- Ideal para pacientes extraanchos y formas complicadas
- Opciones de pie múltiples para sus pacientes individuales

No es necesario forzar al paciente a usar dispositivos de mantenimiento espaciando visitas de descongestión limitadas durante un largo período de tiempo. Establezca la etapa para dispositivos de mantenimiento a largo plazo con pacientes motivados, comprometidos y descongestionados que ahora controlan su linfedema.



circaid reduction kit para el brazo



circaid reduction kit para toda la pierna



Tarjeta de tensión integrada

Nota

Para más información, consulte el folleto "Concepto de terapia de linfología", No. de artículo 97A38.



2
Fase



Productos circaid® juxtafit® para la fase de transición

Productos de compresión ajustable para la estabilización de los resultados efectivos de la terapia descongostiva.

Indicaciones

- Linfedema nivel 1–3

Características del producto

- Perfil de compresión garantizado
- BPS para establecer y controlar el nivel de presión terapéutica correcto
- Las cintas yuxtapuestas pueden reajustarse individualmente mientras están colocadas en la extremidad

Beneficios para los pacientes

- Fomenta la autogestión: ajustable de forma instantánea
- Fomenta la autonomía del paciente: procesos de colocación y retirada sencillos
- Fomenta una mejor calidad de vida: puede retirarse para ducharse y aplicar el tratamiento de la piel

Sus beneficios

- Maximiza los efectos de la descongostión y estabiliza las fluctuaciones de la inflamación
- Previene una inflamación de rebote en la transferencia a dispositivos de mantenimiento
- Solución rentable y rápida en comparación con los vendajes
- Mínima formación requerida

El paciente podría beneficiarse de la fase de transición cuando los resultados alcanzados durante la descongostión pueden optimizarse antes de pasar a la fase de mantenimiento.

El producto circaid juxtafit puede resultar útil para maximizar los efectos de la fase de descongostión.

Ayuda a estabilizar las fluctuaciones en la inflamación antes de obtener un dispositivo de mantenimiento.



circaid juxtafit premium para la pantorrilla



circaid juxtafit essentials para el brazo



Tarjeta de presión integrada (BPS)

Nota

Para más información, consulte el folleto "Concepto de terapia de linfología", No. de artículo 97A38.



Fase de mantenimiento

El concepto de terapia linfática de medi es un nuevo enfoque del tratamiento del edema que mantiene el éxito del tratamiento a largo plazo.

La asistencia conforme a la normativa implica también la continuación del tratamiento de compresión en pacientes con linfedema.

Durante la fase de mantenimiento, los pacientes con linfedema suelen utilizar medias de compresión de tejido plano. La combinación de moda y eficacia médica en los dispositivos de compresión mediven de tejido plano aumenta la concordancia entre los pacientes. Con los productos mediven de tejido plano, el paciente podrá elegir entre una amplia gama de productos de moda. El mediven 550 y mediven mondi, de hecho, cuentan con estilosos elementos de moda.

medi ha ampliado su gama de productos y ofrece soluciones individuales para las necesidades del paciente y su situación vital.

Con circaid juxtafit como alternativa a las medias de compresión, los pacientes pueden ponerse y quitarse fácilmente ellos mismos este dispositivo ajustable. Además, circaid graduate, el dispositivo acolchado hecho a medida para llevar durante la noche, mantiene el resultado de la descongestión incluso mientras los pacientes duermen. Así, los pacientes con linfedema pueden recibir un tratamiento las 24 horas con productos medi.

El concepto de terapia linfática de medi ofrece la flexibilidad y variedad de productos necesarias.

Mantenimiento con medi			
Producto	mediven tejido plano (por ejemplo, mediven 550 para la pierna)	compresión ajustable (por ejemplo, circaid juxtafit)	compresión acolchada (por ejemplo, circaid graduate)
Características del producto			
Elasticidad	baja	muy baja	muy baja
Presión de trabajo	alta	muy alta	muy alta
Presión de reposo	en función de CCL	en función del nivel de compresión aplicado	en función del nivel de compresión aplicado
CCL	1, 2, 3, 4	20 – 50 mmHg	
Transpirabilidad	clima fresh, clima comfort		
Tipo de material	tejido plano de baja elasticidad	tejido de múltiples componentes de muy baja elasticidad	tejido de múltiples componentes de muy baja elasticidad
Factores del paciente			
Estado del linfedema	linfedema leve o severo	linfedema leve o severo	linfedema moderado o severo
Momento de uso	durante el día	durante el día y la noche	durante la noche
Comorbilidades (artritis, piel frágil, etc.)	aplicación sencilla con medi Butler	aplicación sencilla gracias al sistema de cintas yuxtapuestas	aplicación sencilla gracias al sistema de anillos en D
Variedad moderna	diferentes colores y diseños	fundas para una apariencia discreta	fundas para una apariencia discreta

Nota

En las siguientes páginas mostramos el mediven 550 a modo de ejemplo. Por supuesto, disponemos de una amplia gama de productos de tejido plano para brazos y piernas.

3
Fase



mediven® 550 para la pierna y el brazo en la fase de mantenimiento

Máxima estabilidad de las paredes y una variedad prácticamente ilimitada – para edemas de hasta nivel 3

Indicaciones

- Linfedema, niveles 1–3
- Lipedema, niveles 1–3
- Indicaciones flebológicas severas con tendencia a desarrollar edema
- Tratamiento de queloides, por ejemplo, tras quemaduras
- Edema postoperatorio y postraumático
- Formas mixtas: flebolinfedema, lipolinfedema

Características del producto

- Máxima presión de trabajo
 - Más de 5.600 opciones de combinación con extras especiales como punteras suaves, molde de glúteo y zonas de descarga del hallux
 - Numerosas variantes, como por ejemplo, una sección para la pierna para prendas de dos o más piezas
 - Punteras 550 en diferentes estilos disponibles
 - Numerosas variantes, como por ejemplo, puños para prendas de dos o más partes
 - Variedad moderna: 4 colores estándar, 9 colores de moda, 3 elementos de diseño y 4 Dibujos de moda*
 - Integración opcional de medi Lymphpads para una presión adicional
 - Se puede pedir con cristales* exclusivos de Swarovski®
- *Los dibujos de moda solo están disponibles para mediven 550 para pierna

Beneficios para los pacientes

- Fabricado a medida para una adaptación ideal
- Material duradero y resistente al desgaste para una presión ideal durante todo el día y un tratamiento de éxito

Sus beneficios

- Satisfacción de las necesidades individuales del paciente con una gran variedad de opciones



Disponible con cristales* exclusivos de Swarovski®

Elementos de diseño

Elementos de diseño para mediven 550 para pierna



Pyramids




Stars



Ribs

Los elementos de diseño pueden combinarse libremente con los colores estándar y de moda.


Dibujos de moda**

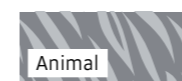


Animal



Crosses

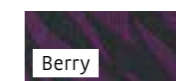

Berry

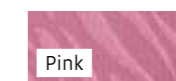

Pink



Ornaments



Flower



Gris




Lila

*Swarovski® es una marca registrada de Swarovski AG
**Nota: Elementos de moda un costo adicional

Clase de compresión

CCL 1, 2, 3, 4

Nivel del edema

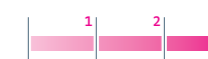

Colores

Arena
M

Caramelo
M

Ca

Negro
M

Colores estándar

Agua
M

medi Magenta
M

Moos-green
M

Cherry-red
M

Antracita
M

Azul marino
M

Verde menta
M

Coral
M

Blue-Jeans
M

Colores de temporada

Período de entrega de hasta 10 días hábiles

S = Estándar

M = Hecho a la medida

Nota

Para más información, consulte los folletos 98L06 y 97D84.

mediven 550 es un producto mostrado a modo de ejemplo. Existen también otros productos de tejido plano, como el mediven mondi, que pueden utilizarse como prendas de mantenimiento. Esto depende de la disponibilidad en cada país. Los conceptos específicos de cada país contendrán los productos correspondientes.



Los elementos de moda han ganado el premio reddot 2017 y el premio iF de diseño de 2019.



Fase de mantenimiento mediven® 550 brazo

Máxima estabilidad del material y variedad casi ilimitada.
Para el edema hasta el estadio 3.

Consistencia de los tejidos conectivos Recomendado para tejido conectivo blando a firme.

Indicaciones

- Linfedema primario y secundario estadíos 1, 2 y 3
- Lipedema estadíos 1, 2 y 3
- Tratamiento para queloides, p. ej. después de quemaduras
- Edema postoperatorio y postraumático

Características del producto

- Alta presión de trabajo
- Más de 2100 posibles combinaciones
- Numerosos modelos, tales como puños separados para lograr prendas dobles o multipartes
- Variedad de colores: 4 colores estándar, 9 colores de temporada y 3 elementos de diseño
- Máxima presión operativa
- Disponible con cristales* exclusivos de Swarovski®

Beneficios para los pacientes


- Fabricado a medida para una adaptación ideal
- Material duradero y resistente al desgaste para una presión ideal durante todo el día y un tratamiento de éxito

Sus beneficios

- Satisfacción de las necesidades individuales del paciente con una gran variedad de opciones



Disponible con cristales* exclusivos de Swarovski®

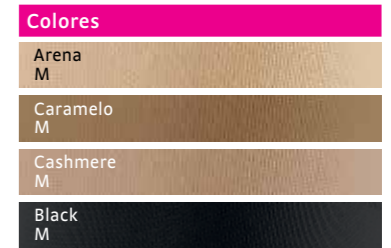

Colores estándar




Colores de temporada

Período de entrega de hasta 10 días hábiles

M = Hecho a la medida

Elementos de diseño**

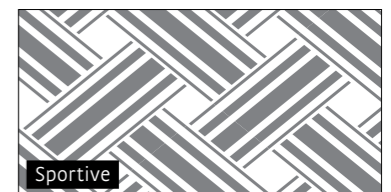

Nota

Para más información, consulte los folletos 97D84.

Go to: medi.biz/ltc or medi.biz/style to see the variety of flat kit garments, our pattern/colour finder and videos.

* Swarovski® es una marca registrada de Swarovski AG

** Los elementos de diseño pueden ser combinados con colores estándar o de temporada (sin cargo adicional)

3
Fase



Productos circaid® juxtafit® para la fase de mantenimiento

Productos de compresión ajustable para un mantenimiento eficaz de los mejores resultados del tratamiento.

Productos circaid premium y circaid essentials dispositivos para el brazo y la pierna

Indicaciones

- Linfedema nivel 1 – 3
- Para aquellos pacientes que no puedan llevar medias de compresión o con otras comorbilidades severas

Características del producto

- Perfil de compresión garantizado
- Sistema de presión integrado (BPS) para establecer y controlar el nivel de presión terapéutica correcto
- Las cintas yuxtapuestas pueden reajustarse individualmente mientras están colocadas en la extremidad

Beneficios para los pacientes

- Fomenta la autogestión: ajustable de forma instantánea
- Fomenta la autonomía del paciente: procesos de colocación y retirada sencillos
- Compresión sostenida con mmHg definidos hasta 24 horas al día si fuera necesario
- Se dispone de opciones de pie y mano por separado para una mayor compresión en la mano, el pie y el tobillo

Sus beneficios

- Ofrecer un producto de compresión alternativo para aquellos pacientes que no pueden usar medias de compresión



circaid juxtafit essentials para el brazo



circaid juxtafit premium para la pantorrilla



Tarjeta de presión integrada (BPS)

Nota

Para más información, consulte nuestro folleto "medi product catalogue Therapy Concept Lymphology", No. de artículo 97D84.

3
Fase



circaid® graduate para la fase de mantenimiento

Dispositivos de compresión de uso nocturno.

El sistema de compresión acolchada graduate presenta cintas inelásticas que se fijan alrededor de un forro de espuma suave y cómodo. A través de los anillos en D y de las guías de medición, el ajustar el gradiente de compresión es fácil. El forro de espuma garantiza una compresión cómoda y suave de la pantorrilla, de la pierna entera y del pie, así como del brazo y de la mano.

Indicaciones

- Linfedema nivel 1–3

Características del producto

- Prenda de espuma que garantiza una compresión cómoda y suave de la pantorrilla, la pierna entera o el brazo.
- Colores disponibles de la prenda:
 - Exterior negro, beige y turquesa
 - Interior: beige y turquesa
- Solo disponibles hechos a medida

Beneficios para los pacientes

- Fomenta la autogestión: ajustable de forma instantánea
- Fomenta la autonomía del paciente: procesos de colocación y retirada sencillos
- Mantiene el resultado de la descongestión incluso al dormir

Sus beneficios

- Ofrecer un concepto de terapia alternativo para aquellos pacientes que no pueden usar medias de compresión
- Ofrecer el mejor cuidado en todo momento

Nota

Para más información, consulte el folleto "medi product catalogue Therapy Concept Lymphology", No. de artículo 97D84.



circaid graduate para el brazo



circaid graduate para la pantorrilla



circaid graduate para toda la pierna

Productos de apoyo



Limpieza y cuidado de la piel – un elemento importante del tratamiento de compresión.

La piel limpia y bien cuidada es muy importante, especialmente para el tratamiento del linfedema.

medi skin care – cuidado para la piel

El cuidado intensivo de la piel desempeña un papel fundamental en el tratamiento de compresión. Lo mejor es utilizar productos adecuados para el tratamiento de compresión. medi soft, medi day y medi night han demostrado ser muy eficaces y la piel es agradable al tacto.



medi skin care

medi Butler – la media se desliza sobre la pierna incluso con mayor facilidad

Los accesorios para la colocación y la retirada de medi son aptos para cualquier prenda de compresión, resistentes y muy fáciles de usar. Prestiran el material y failitan la instrucción de los pies. Los medi Butlers están disponibles en diferentes modelos, por ejemplo, el Butler de mangos largos. El práctico accesorio medi 2in1 para ponerse y quitarse las medias es también ideal. El suave material hace que la media se deslice rápida y fácilmente sobre la piel.



medi Butler con asas largas, colocación sencilla



medi