

ASKINA® DRESSIL HEEL BORDER

APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE SILICONA CON REBORDE ANATÓMICO TALÓN

Apósito de espuma de poliuretano con reborde anatómico para la zona del talón; lámina de contacto con la herida y de fijación, porosa, de baja adherencia de silicona.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Apósito de espuma de poliuretano con reborde anatómico para la zona del talón; lámina de contacto con la herida y de fijación, porosa, de baja adherencia de silicona.

La capa de silicona suave, es de adherencia moderada garantizando la correcta colocación del apósito y minimiza el posible trauma durante el cambio de apósitos.

La capa externa de poliuretano y su reborde de fijación, evitan la entrada de líquidos y otros contaminantes, permitiendo el intercambio de gases.

INDICACIONES

Askina® DresSil Heel Border está indicado para el tratamiento de una amplia gama de lesiones de profundidad parcial o total, como úlceras por decúbito, úlceras arteriales y o venosas, quemaduras de segundo grado, úlceras del pie diabético, injertos cutáneos, zonas de extracción de órganos/injertos, lesiones postoperatorias, desgarros de la piel y laceraciones, muy flexible y adaptable a las distintas anatomías del cuerpo (talón y codo). Está indicado en la cura en ambiente húmedo de lesiones moderadamente exudativas tales como:

- Úlceras por presión
- Úlceras de piernas venosas y arteriales
- Úlceras del pie diabético
- Quemaduras de primer y segundo grado y áreas difíciles de tratar.

Askina® DresSil Heel Border no debe usarse:

- Sobre las úlceras resultantes de una infección, como la tuberculosis, la sífilis o las infecciones fúngicas profundas, o en quemaduras de tercer grado.
- Si aparecen signos de infección o si la herida se deteriora inesperadamente, comuníquese con la autoridad médica apropiada. Reanude el uso cuando las condiciones normales de cicatrización estén presentes.
- Junto con agentes oxidantes tales como soluciones de hipoclorito o peróxido de hidrógeno.

- Si el paquete está dañado o abierto.

INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN

Askina® DresSil Heel Border es muy fácil de aplicar y no se precisan conocimientos ni equipos especiales.

Askina® DresSil Heel Border puede dejarse colocado durante varios días, dependiendo de la cantidad de exudado siempre y cuando no se produzcan fugas, en cuyo caso hay que realizar el cambio de apósito.

Preparación de la piel: limpiar la lesión con una solución para limpieza y descontaminación (PHMB+Betaína) o solución salina en su defecto. Secar la piel alrededor de la lesión.

Aplicación del apósito: asegurar la colocación de **Askina® DresSil Heel Border** de forma que cubra completamente la superficie de la lesión, asegurando un margen de 2 a 3 cm alrededor de los bordes de la lesión. Retirar las capas de protección. Colocar **Askina® DresSil Heel Border** sobre la lesión y apretar suavemente para garantizar la correcta aplicación.

Askina® DresSil Heel Border puede dejarse colocar durante varios días, máximo una semana, según el estado de la lesión.

Superficie total: 433 cm²


Superficie Foam: 225 cm²

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

Conservar en lugar fresco y seco.

Caducidad: 3 años.



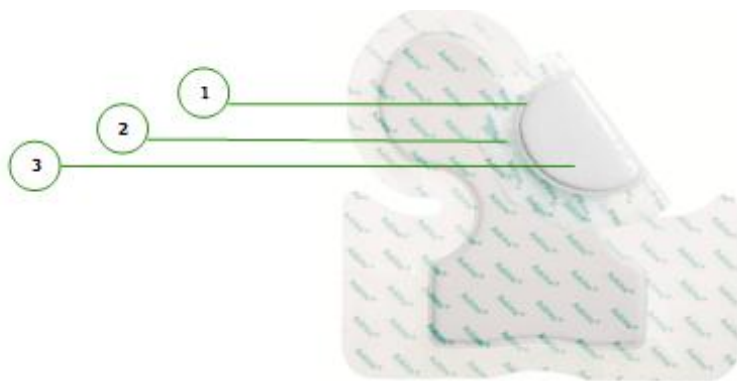

1. Capa de contacto de Silicona
2. Reborde de Silicona
3. Capa absorbente hidrocelular

PRESENTACIONES

Descripción	Presentación	Código B Braun
Askina® DresSil Heel Border 21,6x 22 cm (19,6 x 20 cm)	C/ 5 unidades	5592205

Marca CE: 0050