

## ASKINA® DRESSIL SACRUM

### APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE SILICONA CON REBORDE ANATÓMICO SACRO

Apósito de espuma de poliuretano con reborde anatómico para la zona sacra, lámina de contacto con la herida y de fijación, porosa, de baja adherencia de silicona. .

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Apósito de espuma de poliuretano con reborde anatómico para la zona sacra: lámina de contacto con la herida de fijación porosa, de baja adherencia de silicona.

La capa de silicona suave, es de adherencia moderada, garantizando la correcta colocación del apósito y minimiza el posible trauma durante el cambio de apósitos.

La capa externa de poliuretano y su reborde de fijación, evitan la entrada de líquidos y otros contaminantes, permitiendo el intercambio de gases.


solución salina en su defecto. Secar la piel alrededor de la lesión.

Aplicación del apósito: asegurar la colocación de **Askina® DresSil Sacrum** sobre la lesión y apretar suavemente para garantizar la correcta aplicación. **Askina® DresSil Sacrum** puede dejarse colocado durante varios días, máximo una semana, según el estado de la lesión.

#### CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

Conservar en lugar fresco y seco.

Caducidad: 3 años.

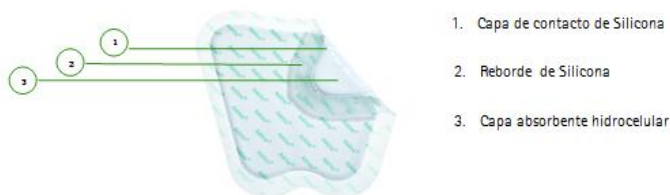

#### INDICACIONES

**Askina® DresSil Sacrum** está indicado para el tratamiento de una amplia gama de lesiones de profundidad parcial o total, como úlceras por decúbito, úlceras arteriales y o venosas, quemaduras de segundo grado, úlceras del piel diabético, injertos cutáneos, zonas de extracción de órganos/injertos, lesiones postoperatorias, desgarros de la piel y laceraciones.



Indicado en la cura en ambiente húmedo de lesiones moderadamente exudativas.

#### INSTRUCCIONES DE USO

**Askina® DresSil Sacrum** es muy fácil de aplicar y no se precisan conocimientos ni equipos especiales.

**Askina® DresSil Sacrum** puede dejarse colocado durante varios días, dependiendo de la cantidad de exudado siempre y cuando no se produzcan fugas, en cuyo caso hay que realizar el cambio de apósito.

Preparación de la piel: limpiar la lesión con una solución para limpieza y descontaminación (PHMB+Betaina) o

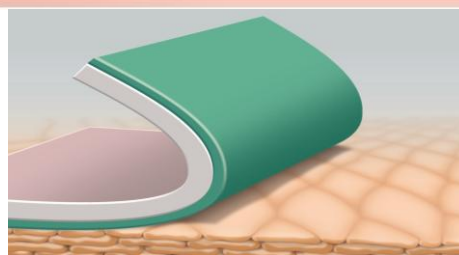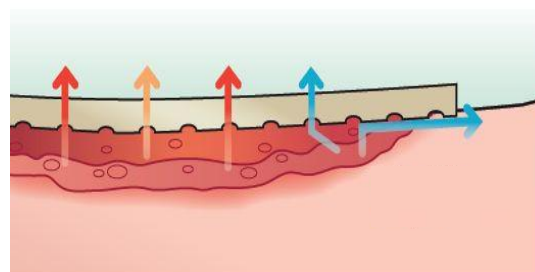

## PRESENTACIONES

Descripción	Presentación	Código B Braun
Askina® DresSil Sacrum 16x17,5 (13 x 14,5 cm)	C/ 5 unidades	5491605

**Marca CE: 0050**