

# ASKINA® SCAR REPAIR

## APÓSITO DE SILICONA SUAVE PARA EL TRATAMIENTO DE CICATRICES

Apósito de silicona fino y adaptable, reusable, no estéril.

### COMPOSICIÓN


Apósito fino, adaptable, reusable, no estéril que consiste en:

- un film exterior consistente en un laminado de poliuretano y tejido; permeable al vapor y resistente al agua
- una capa de silicona suave en contacto con la piel que se adapta a la superficie de la herida y se adhiere de forma segura a la piel

### INDICACIONES

Indicado para el tratamiento de las cicatrices hipertróficas y queloides. Puede usarse también en heridas cerradas para la prevención de las cicatrices hipertróficas o queloides tras la cirugía. Indicado sólo para uso externo.

### MODO DE ACCIÓN

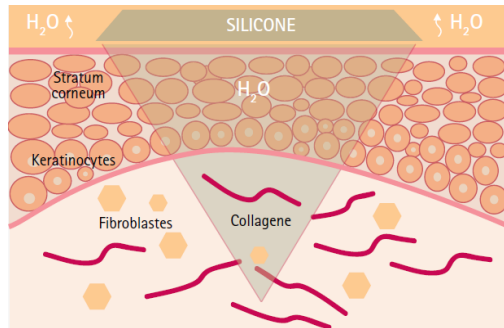

Askina Scar Repair® mantiene el nivel óptimo de hidratación de la piel contribuyendo así a normalizar la síntesis de colágeno previniendo la formación de excesivo tejido de granulación.

### VENTAJAS

- Fácil de utilizar y adaptable cualquier zona del cuerpo
- Reduce el picor
- Reduce la sensación de tirantez de la piel
- Resistente al agua
- Recortable
- Permite la recolocación del apósito
- Fácil retirada
- No requiere de fijación extra
- Discreto
- Protección UV

### MODO DE EMPLEO

1. Limpiar y secar la cicatriz y la zona alrededor de la cicatriz.
2. Seleccionar el tamaño apropiado para cubrir la superficie de la cicatriz asegurando un margen de cómo mínimo 1 cm alrededor de los bordes de la cicatriz.
3. Retirar la lámina trasera y aplicar el apósito sobre la cicatriz por el lado adhesivo alisándolo suavemente. No estirar el apósito durante su aplicación.



Cuando se usa Askina® Scar Repair conjuntamente con otras cremas o lociones asegurarse que el apósito no esté en contacto con la crema o bien que este se haya absorbido completamente para evitar la falta de adhesión. Para una mejora en los resultados se recomienda combinar su utilización con Linovera® Scar Repair (gel reparador con ácido hialurónico de rápida absorción).

Si una cicatriz requiere más de un apósito, éstos se deberán colocar uno al lado del otro en sin solaparse.

Se puede cortar el apósito si se requiere.

Askina® Scar Repair debe permanecer aplicado 24 horas al día y retirado una vez al día en el momento de la ducha o el baño para inspeccionar la herida y lavar la piel. No es necesario lavar el apósito.

Askina® Scar Repair puede usarse hasta 7 días o hasta que las propiedades adhesivas no sean las óptimas para mantener el apósito en su sitio.

Como tratamiento de prevención se recomienda usar Askina® Scar Repair entre dos y seis meses, dependiendo de las condiciones de la cicatriz.

#### CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

Conservar en lugar fresco y seco. Proteger de la luz solar.



#### PICTOGRAMAS



#### PRESENTACIONES

Descripción	Presentación	Código B Braun
Askina® Scar Repair 5x7,5 cm	C/ 5 unidades	5695705
Askina® Scar Repair 2x14 cm	C/ 15 unidades	5691403
Askina® Scar Repair 10x18 cm	C/ 5 unidades	5691805