

FICHA TÉCNICA ASKINA® SORB® Cinta

Descripción del producto

Cinta de alginato cálcico e hidrocoloide (Carboximetilcelulosa) para lesiones de moderada a alta exudación.

Composición

- Alginato Cálcico 85%
- Carboximetilcelulosa 15%

Esta composición le confiere una inmejorable capacidad de absorción, permitiendo la retirada indolora y en una sola pieza en los cambios de apósito.

Indicaciones

El alginato cálcico es un producto obtenido a partir de la liofilización de algas pardas marinas permitiendo obtener rendimientos óptimos en cuanto a adaptación, absorción y formación de gel.

A través de un intercambio iónico con el exudado de la lesión, las fibras de alginato y la carboximetilcelulosa reaccionan con el exudado de la lesión formando un gel que crea un ambiente húmedo adecuado para la regeneración de los tejidos.


Su composición preserva la integridad del apósito, con lo que **su retirada es íntegra**, fácil, indolora y no deja residuos, evitando el riesgo de dañar los tejidos neoformados.

Absorbe el exudado verticalmente previniendo cualquier riesgo de filtraciones de exudado hacia los bordes de la herida, con lo que evita la maceración de los mismos.

Propiedades hemostáticas exclusivas de los productos que contienen alginato en su composición.

Estéril, no adhesivo

Indicado en lesiones infectadas, bajo supervisión médica

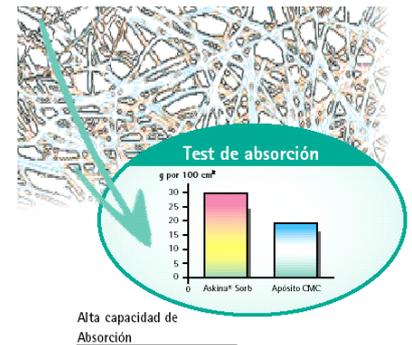

Instrucciones de Utilización

Askina® Sorb Cinta es muy fácil de aplicar y no se precisan conocimientos ni equipos especiales.

Askina® Sorb Cinta puede dejarse colocado durante varios días, dependiendo de la cantidad de exudado siempre y cuando no se produzcan fugas, en cuyo caso hay que realizar el cambio de apósito.

Preparación de la Piel:


Limpiar la lesión con una solución para limpieza y descontaminación (PHMB+Betaína) o solución salina en su defecto.

Secar la piel alrededor de la lesión.

Aplicación del Apósito:

Seleccionar el tamaño adecuado de **Askina® Sorb Cinta** que cubra completamente la superficie de la lesión.

Retirar las capas de protección. Colocar **Askina® Sorb Cinta** directamente dentro de la cavidad obre la lesión y fijar mediante el apósito secundario adecuado.

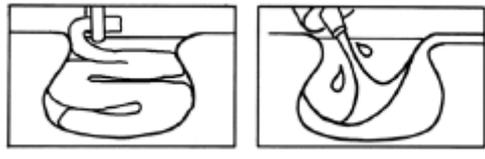

Condiciones de conservación

Almacenar a temperatura ambiente, en sitio seco.
Caducidad: 5 años.



Presentaciones

Askina Sorb cinta 2,7x34 cm

C/10 unidades

Código Braun 2105S

Marca CE: 0086