

Askina® Ultra Fino

Apósito hidrocélular multicapa adhesivo extra fino



ASKINA® ULTRA FINO

Descripción del producto

Askina® Ultra fino, es un apósito fino, estéril, semipermeable de múltiples capas.

Composición

- Capa adhesiva que se fija a la piel intacta pero no se adhiere a la herida, ya que en contacto con el exudado de ésta elimina su capacidad adhesiva.
- Capa de Hidrogel con alta capacidad de absorción.
- Capa de poliuretano que permite el intercambio de gases e impide la entrada de líquidos y bacterias.
- Una Capa externa de espuma de poliuretano de color carne.

Indicaciones

Indicado en la cura húmeda y térmica, así como, en la profilaxis de las úlceras y lesiones crónicas de la piel.

Muy flexible y adaptable a las distintas anatomías del cuerpo.

Impermeable al agua y microorganismos pero permeable al vapor de agua e intercambios gaseosos. No deja residuos en su retirada al no desintegrarse.

Caracterizado por su estabilidad estructural y alta capacidad de absorción, retirando el exceso de exudado en contacto directo con el lecho ulceral y manteniéndolo en un compartimiento superior para evitar cualquier daño sobre la piel perilesional.

Las características del adhesivo permiten levantar el apósito y su posterior recolocación. No precisa ninguna otra medica adicional para su fijación.

Compatible con todos los productos de cura en ambiente húmedo.

Puede permanecer hasta 7 días en su aplicación.

Instrucciones de Utilización

Askina® Ultra Fino es muy fácil de aplicar y no se precisan conocimientos ni equipos especiales.

Askina® Ultra Fino puede dejarse colocado durante varios días, dependiendo de la cantidad de exudado siempre y cuando no se produzcan fugas, en cuyo caso hay que realizar el cambio de apósito.

Preparación de la Piel:

Limpiar la lesión con una solución para limpieza y descontaminación (PHMB+Betaína) o solución salina en su defecto.


Secar la piel alrededor de la lesión.

Aplicación del Apósito:

Seleccionar el tamaño adecuado de **Askina® Ultra Fino** que cubra completamente la superficie de la lesión, asegurando un margen de 2 a 3 cm alrededor de los bordes de la lesión.

Si fuera preciso, **Askina® Ultra Fino** se puede recortar al tamaño necesario antes de retirar las capas de protección. Siempre que se requiera, es posible sobreponer varios apósitos a fin de cubrir las lesiones grandes.

Retirar las capas de protección. Colocar **Askina® Ultra Fino** sobre la lesión y apretar suavemente para garantizar la correcta aplicación.

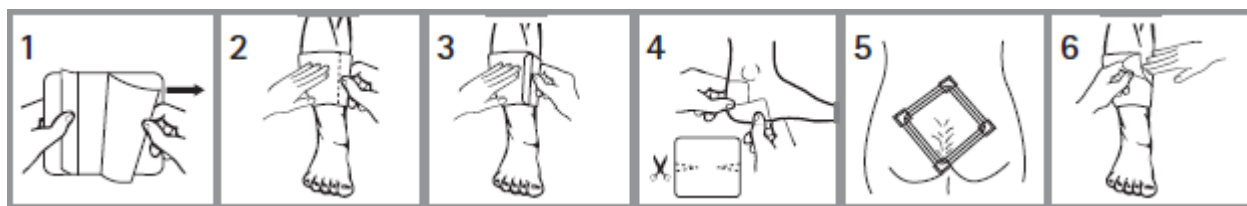

Condiciones de conservación

Conservar en lugar fresco y seco
Caducidad: 3 años.

Presentaciones

Askina Ultra fino 10x10 cm

C/10 unidades

Código Braun 7251003ES

Askina Ultra fino 15x15 cm

C/10 unidades

Código Braun 7251503ES

Marca CE: 0050

