

Ficha técnica

CICA-CARE[◊], lámina de gel adhesiva para tratamiento de cicatrices



No contiene látex

Características

- **Autoadhesiva**
- **Duradera**
- **Adaptable a los contornos del cuerpo** (p.ej. lóbulos de la oreja)
- **Reutilizable** – puede lavarse y reutilizarse
- **Económica**
- **Fácil de usar**
- **Máxima comodidad para el paciente**
- **Muy flexible**

Descripción

Lámina de gel de silicona, suave, autoadhesiva y oclusiva, fabricada con silicona de grado médico y reforzada con una membrana externa de silicona.

Indicaciones

Utilización temporal en cicatrices existentes y en nuevas cicatrices hipertróficas o queloides.

Utilización temporal como terapia profiláctica sobre heridas cerradas para prevenir la aparición de cicatrices hipertróficas o queloides.

Instrucciones de uso

1. Abrir el envase, extraer la lámina CICA-CARE con papel protector.
2. Cortar según la forma y tamaño de la cicatriz. En cicatrices grandes usar varias láminas colocando una a continuación de la otra.
3. Retirar el papel protector y situar la parte adherente sobre la cicatriz o herida cerrada.
4. Evitar la utilización de pomadas en el área a tratar ya que se puede interferir en la eficacia del producto.
5. Si bien CICA-CARE es auto-adhesiva, puede también utilizarse un vendaje elástico fino o esparadrapo.
6. Mantener el resto de la lámina sobrante en el envase y conservarlo en lugar seco a una temperatura inferior a 25°C.

Recomendaciones

- Lavar CICA-CARE dos veces al día en una solución jabonosa suave y no aceitosa. Aclarar con agua templada, secar y reaplicar sobre la cicatriz limpia y seca. Evitar secar CICA-CARE con cualquier objeto de papel ya que se puede adherir a la lámina.
- Para incrementar la tolerancia de la piel a CICA-CARE, comenzar aplicándolo sólo durante 4 horas al día durante los primeros días. Aumentar a 8 horas durante los dos días siguientes e incrementar el tiempo de aplicación dos horas diarias hasta llegar a las 24 horas, momento en el que se alcanza el óptimo desarrollo del tratamiento.
- Cuando CICA-CARE esté deteriorado o resulte difícil su limpieza, debe cambiarse la lámina (cada 10/14 días). Deberá incrementarse la frecuencia de cambio cuando se ubique sobre una articulación o en un área de constante rozamiento. El tratamiento debe prolongarse de 2 a 4 meses

Composición

Gel de silicona de grado médico con enlaces cruzados de polidimetilsiloxano

CICA-CARE[◊], lámina de gel adhesiva para tratamiento de cicatrices

Características técnicas

(Farmacopea Británica 1993 – Apéndice XX)

Lámina flexible, transparente, inodora, libre de burbujas visibles (espesor en el centro de la lámina 1,5mm – 2,5mm).

Si se estira el apósito, no se muestran signos tales como ondulaciones y ralladuras.

El área de contacto con la piel es adherente y está protegida por un papel blanco opaco con dos pestañas para facilitar la aplicación.

Capa superior no adherente.

Penetración : 4,5 – 9,0mm

Almacenaje

Mantenerlo lejos de la luz, en un lugar seco y a temperatura inferior a 25°C.

No utilizar el contenido si los sobres están abiertos o deteriorados.

CICA-CARE puede lavarse y reutilizarse (Ver recomendaciones)

Esterilización

Óxido de etileno

Caducidad

5 años

Clase CE

I, estéril

Fabricante

Smith & Nephew Medical Limited

P.O. Box 81 Hessle Road

Hull HU 2BN - United Kingdom

Presentación

Código de producto	Presentación	Unidades / envase	Envases / embalaje	Unidad mínima de venta	Código EAN-13
66250704	CICA- CARE 12 x 6cm	1	20	1 unidad	5000223413231

Curación de Heridas

Smith & Nephew, S.A.

Fructuós Gelabert, 2-4, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel. Atención Cliente: 902 30 31 60

Fax. Atención cliente: 902 30 31 70

EducaciónAWM@smith-nephew.com

www.smith-nephew.com

◊ Marca registrada de Smith & Nephew