


Ficha Técnica:

Comfeel®

Comfeel Plus

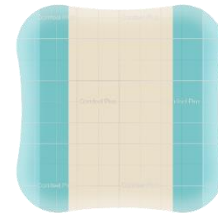

Apósito de hidrocoloide y alginato

1. Descripción

Comfeel Plus es un apósito de hidrocoloide y alginato cálcico que absorbe el exudado y crea un gel suave que mantiene el medio ambiente húmedo en la lesión. Es un apósito semipermeable y auto-adhesivo.

2. Indicaciones

Comfeel Plus está indicado en lesiones con un nivel de exudado leve a moderado. Puede utilizarse en lesiones de cualquier etiología, tales como:

- úlceras vasculares
- úlceras por presión
- quemaduras de 2º grado
- zonas donantes
- dermo-abrasiones
- heridas quirúrgicas.

En lesiones con necrosis de baja exudación, Comfeel Plus crea un medio ambiente húmedo que favorece el desbridamiento autolítico.

En la fase final de la cicatrización, Comfeel Plus crea un medio ambiente húmedo que favorece la epitelización.

3. Composición


Capa absorbente	<ul style="list-style-type: none"> • Carboximetilcelulosa sódica (hidrocoloide) • Alginato cálcico • Elastómero artificial • Espesantes y plastificantes
Cubierta semipermeable	<ul style="list-style-type: none"> • Film de Poliuretano hidrófobo

Para conocer toda la documentación clínica publicada sobre **Biatain**, le invitamos a visitar:

www.woundcare.evidence.coloplast.com


4. Modo de Acción

Comfeel Plus ha sido diseñado para crear un medio ambiente húmedo óptimo en lesiones con exudado de bajo a moderado. Ha sido una prioridad crear un apósito fácil de utilizar, cómodo y que permite espaciar las curas.

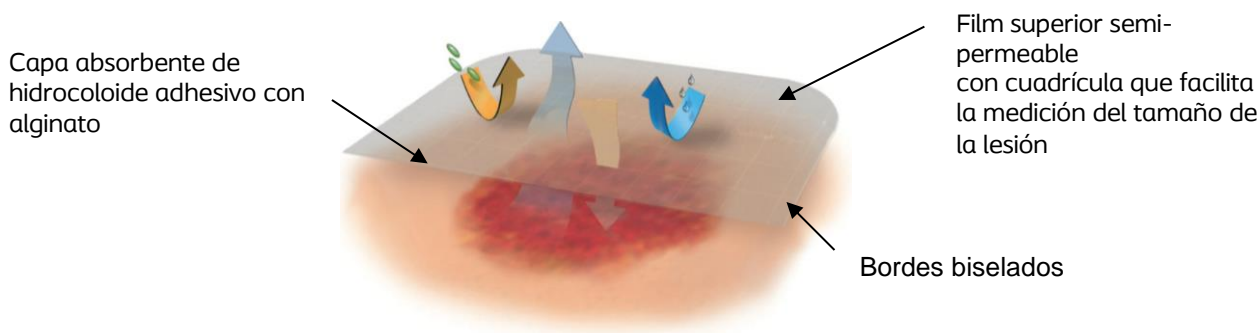

4.1 Absorción del exudado y creación de medio ambiente húmedo

Cuando Comfeel Plus se aplica sobre la lesión, el apósito se adhiere a la piel sana y seca (fig. 1). En contacto con el exudado, las partículas de hidrocoloide y el alginato absorben el exudado. Con la absorción, estas partículas crean un gel suave que mantiene el medio ambiente húmedo en la lesión (fig. 2). En lesiones con tejido necrótico, la humedad facilita el desbridamiento autolítico, mientras que en lesiones en fase de granulación o epitelización la humedad favorece la cicatrización.

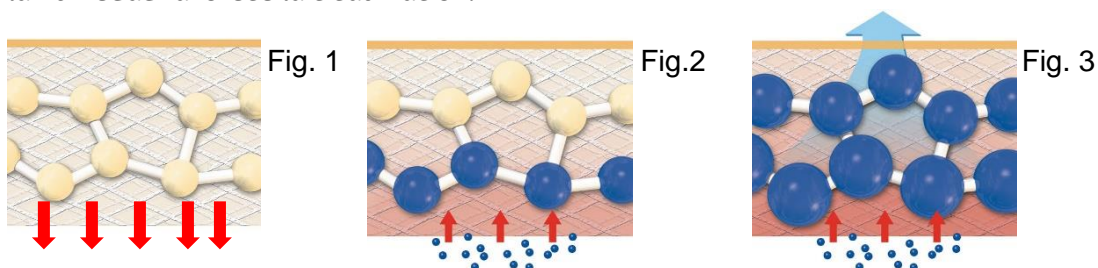

4.2 Evaporación selectiva

El film superior del apósito es semi-permeable: Es impermeable a líquidos y agentes contaminantes, pero permeable a gases. Eso significa que el apósito favorece la evaporación del exceso de exudado (fig. 3). De esta manera, se mantiene el medio ambiente húmedo y se aumenta el tiempo de permanencia del producto.

4.3 Diseñado para espaciar las curas – Bordes biselados y alginato cálcico

Comfeel Plus está diseñado para espaciar las curas. Es de los únicos apósitos de hidrocoloide que incorpora alginato cálcico. El alginato cálcico hace que la capacidad de absorción del producto supere la de otros productos similares¹. Además de la capacidad de absorción y retención, los bordes biselados también contribuyen a aumentar el tiempo de permanencia del apósito. Gracias a los bordes biselados, se evita que el apósito se enrolle y se levante por error.


4.4. Fácil aplicación y retirada

El apósito viene preparado con tres lengüetas de aplicación que permiten una aplicación fácil y en condiciones estériles. Se puede apreciar visualmente el grado de saturación del apósito, lo cual ayuda a determinar el momento de cambiar el apósito.

Para conocer toda la documentación clínica publicada sobre **Biatain**,
le invitamos a visitar:

www.woundcare.evidence.coloplast.com

5. Modo de aplicación:

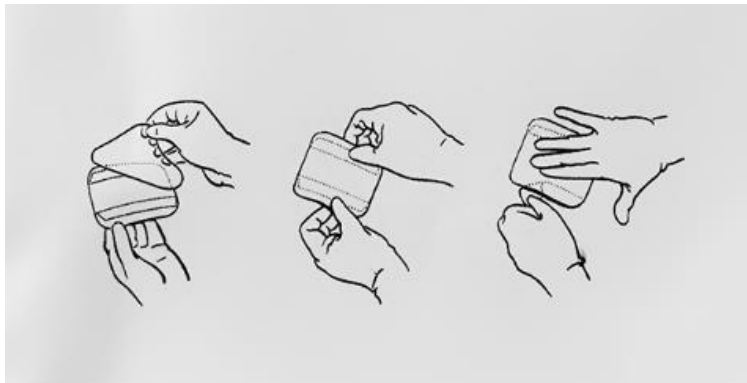

Tras la limpieza de la lesión, utilice las lengüetas para asegurar una aplicación aséptica. Retire el film protector central. Aplique la zona adhesiva sobre la zona a tratar. Después retire primero una lengüeta lateral y luego la otra.

6. Ventajas del producto:

- **Superior capacidad de absorción – superior tiempo de permanencia**
 - Estudios independientes han demostrado que Comfeel Plus ofrece una mayor capacidad de absorción que otros apósitos similares¹.
 - La superior capacidad de absorción se debe a la incorporación de alginato cálcico en la composición del producto.
- **Evaporación selectiva**
 - Comfeel Plus incorpora un film semipermeable que permite la evaporación del exceso de humedad (Mayor tiempo de permanencia).
- **Bordes Biselados**
 - Gracias a los bordes biselados, se evita que el apósito se enrolle y se levante por error (mayor tiempo de permanencia).
- **Fácil de usar²**
 - Se puede apreciar visualmente el grado de saturación del apósito, lo que ayuda al profesional a determinar el momento preciso del cambio
 - El apósito es altamente flexible
 - El apósito incorpora una superficie con cuadrícula que facilita la medición y seguimiento del tamaño de la lesión.
 - Sistema de aplicación “non-touch” de tres lengüetas.
 - Bordes con forma redondeada que favorece la adaptación del apósito a zonas anatómicas difíciles

7. Referencias

1. Thomas, S. et al; An 'in-vitro' comparison of the physical characteristics of hydrocolloids, hydrogels, foams, and alginate/cmc fibrous dressings, www.dressings.org 2005. Vol. May
2. Moody, M. et al; Evaluation of health-related quality of life and product handling aspects in treatment of venous leg ulcer patients with hydrocolloid dressings, *Nurse2Nurse Magazine* 2004. Vol. 4(4)

Para conocer toda la documentación clínica publicada sobre **Biatain**,
le invitamos a visitar:

www.woundcare.evidence.coloplast.com

8. Presentación:

Envasado:



Envase unitario estéril con etiquetado en el que figura:

- Denominación del artículo
- Método de esterilización
- Fecha de caducidad
- Referencia comercial
- Número de lote
- Nombre del fabricante
- Bandas turquesas para identificar las zonas de apertura
- Escala de "4 gotas" que simbolizan la capacidad de absorción
- Ilustraciones de uso en el sobre

Almacenaje:

Temperatura ambiente de 10 a 25 grados

Método Esterilización:

Radiaciones Beta

Garantía de calidad:

Con Marca CE
Libre de Látex

Presentaciones:

Nombre	Tamaño	Cantidad	Código Nacional	Referencia fabricante
Comfeel Plus	4 x 6 cm.	3 unidades	461335	33146
	10 x 10 cm.	3 unidades	472597	33110
	15 x 15 cm.	3 unidades	472605	33115
	20 x 20 cm.	5 unidades	368910	33120*
	10 x 10 cm.	10 unidades	221671	33110*
	15 x 15 cm.	5 unidades	226837	33115*
Comfeel Plus Sacro	225 cm.	3 unidades	482182	33285

* Presentación no financiada por el Sistema Nacional de Salud

Para conocer toda la documentación clínica publicada sobre **Biatain**, le invitamos a visitar:

www.woundcare.evidence.coloplast.com



Ostomy Care
Continence Care
Wound & Skin Care
Urology Care

9. Distribuidor

Coloplast Productos Médicos, S.A.
C/ Condesa de Venadito, 5 -4ª planta
28027 Madrid
Teléfono: 91.314.18.02

Para conocer toda la documentación clínica publicada sobre **Biatain**,
le invitamos a visitar:

www.woundcare.evidence.coloplast.com