



Apósito impregnado estéril de baja adherencia

Apósito estéril de baja adherencia con soporte de tejido de acetato de trama fina, impregnado con pomada neutra hidrófoba (Eucerit®).

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Estéril
- Baja adherencia, no interfiere con la capa superficial de la herida y su retirada es rápida y atraumática. Minimiza el dolor en el cambio de apósito
- La malla del soporte, de aproximadamente 1 mm de ancho, previene el crecimiento del tejido de granulación recién formado dentro de la misma. No interfiere en el proceso de cicatrización.
- No se deshilacha incluso cuando se corta a medida.
- La pomada tiene un efecto calmante sobre la herida
- Permeable al aire y al exudado, evita efectos oclusivos y permite el paso de exudado a un apósito absorbente secundario
- Rápido y fácil de usar
- Flexible y conformable, se adapta perfectamente a los contornos del cuerpo
- Totalmente impregnado con la pomada, lo que permite una buena estabilidad en los bordes, evitando que se doblen.
- No carga la herida con un exceso de pomada
- Indicado para pieles sensibles
- Compatible con cualquier tipo de apósito secundario de acuerdo con el nivel de exudado de la herida (la permeabilidad a gases e impermeabilidad a líquidos y bacterias dependerá de la elección del apósito secundario)
- Químicamente estable e inerte

INDICACIONES

Apósito primario de baja adherencia para el tratamiento de heridas superficiales exudativas (quemaduras de grado I y II, laceraciones, abrasiones, lesiones por radiación, zonas donantes y receptoras de injertos de piel).

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO

La aplicación de dos capas de Cuticell® en heridas con exudado abundante puede resultar en oclusión. Los apósitos impregnados pueden adherirse al lecho de la herida si se aplica en heridas no exudativas.

COMPOSICIÓN

Soporte: tejido de acetato
 Peso del soporte: 114 – 124 /m²
 Impregnación: Eucerit®
 Peso de la pomada : 78 – 140 /m²

PRESENTACIÓN

Envase individual estéril.
 La caja tiene la marca CE y código de barras.

DURABILIDAD





Entre uno y varios días, dependiendo del estado de la herida y las condiciones de la piel.

ESTERILIDAD

El producto se presenta estéril (esterilizado por rayos gamma).
 La esterilización se lleva a cabo con métodos normalizados y validados de acuerdo con la Directiva UNI EN ISO 11137, en pleno cumplimiento de los requisitos de cumplimiento de la Directiva de Dispositivos Médicos 93/42 EEC.

PRESENTACIÓN

Código de producto	Medidas	Presentación	Unidad Mínima de Venta	Unidades/ embalaje	Código EAN-13 (caja)
72539-00	7,5cm x 7,5cm	caja de 10 un	10 un	600 un	4042809226690
72539-01	7,5cm x 7,5cm	caja de 50 un	50 un	600 un	4042809226706
72538-02	7,5cm x 20cm	caja de 10 un	10 un	300 un	4042809226713
72538-03	7,5cm x 20cm	caja de 50 un	50 un	300 un	4042809226720
72538-04	20cm x 40cm	caja de 25 un	25 un	150 un	4042809271492

Certificación	Contiene látex	Esterilidad	Conservación	Fabricante
Clase CE IIb, estéril BSN medical SLU ISO 9001:2008 			 3 años  	 BSN Medical GmbH Quickbornstrasse 24 20253 Hamburg Distribuidor BSN medical SLU

Leyenda símbolos



No contiene látex en formulación



Producto esterilizado con rayos gamma



Caducidad



Manténgase en lugar seco



Fabricante



No exponer el producto a la radiación solar

BSN Medical SLU

Avda Baix Llobregat 3-5, Edificio Bayer, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel. Atención cliente: 93.521.01.20 Fax. Atención cliente: 93.521.02.10

B62495882

www.bsnmedical.com.es

FT 01/14-01