

Cuticell® Classic



Gasa impregnada de parafina estéril

Gasa de parafina estéril no medicamentada con soporte de gasa de algodón de poro abierto. El soporte está compuesto de una trama entretejida (para mayor estabilidad y resistencia al deshilachado) impregnada con parafina blanda de color blanco.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Estéril
- Baja adherencia, no interfiere con la capa superficial de la herida y facilita una retirada atraumática
- La parafina tiene un efecto calmante sobre la herida
- Permeable al aire y exudado, evita efectos oclusivos y permite el paso de exudado a un apósito absorbente secundario
- La estructura entretejida de la trama reduce el riesgo de liberación de fragmentos de hilo en la herida y no se deshilacha, incluso cuando se corta a medida.
- Rápido y fácil de usar
- Flexible y conformable, se adapta perfectamente a los contornos del cuerpo
- Compatible con cualquier tipo de apósito secundario de acuerdo con el nivel de exudado de la herida (la permeabilidad a gases e impermeabilidad a líquidos y bacterias dependerá de la elección del apósito secundario)
- Químicamente estable e inerte

INDICACIONES

Apósito primario de baja adherencia para el tratamiento de heridas superficiales exudativas (quemaduras de grado I y II, laceraciones, abrasiones, lesiones por radiación, zonas donantes y receptoras de injertos de piel).

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO

Cuticell® Classic debería ser retirado como muy tarde tan pronto la parafina empiece a licuarse. Los apósitos impregnados pueden adherirse al lecho de la herida si se aplican en heridas no exudativas

COMPOSICIÓN

Soporte: gasa de estructura estructura entretejida 100% algodón

Peso del soporte: 55g/m² ± 10%

Impregnación: 100% parafina blanda de color blanco

Peso de la pomada: 318g/m² ± 10%

PRESENTACIÓN

Envase individual estéril.

La caja tiene la marca CE y código de barras.

DURABILIDAD

Entre uno y varios días, dependiendo del estado de la herida y las condiciones de la piel.

ESTERILIDAD

El producto se presenta estéril (esterilizado por rayos gamma).

La esterilización se lleva a cabo con métodos normalizados y validados de acuerdo con la Directiva UNI EN ISO 11137, en pleno cumplimiento de los requisitos de cumplimiento de la Directiva de Dispositivos Médicos 93/42 EEC.

PRESENTACIÓN

Código de producto	Medidas	Presentación	Unidad Mínima de Venta	Unidades/ embalaje	Código EAN-13 (caja)
72538-00	5cm x 5cm	caja de 5 un	5 un	600 un	4042809226737
72538-01	5cm x 5cm	caja de 50 un	50 un	600 un	4042809226744
72538-02	10cm x 10cm	caja de 10 un	10 un	600 un	4042809226751
72538-03	10cm x 10cm	caja de 100 un	100 un	600 un	4042809226768
72538-04	10cm x 40cm	caja de 10 un	10 un	3000 un	4042809226775

Certificación	Contiene látex	Esterilidad	Conservación	Fabricante
Clase CE IIb, estéril BSN medical SLU ISO 9001:2008 			 3 años  	 BSN Medical GmbH Quickbornstrasse 24 20253 Hamburg Distribuidor BSN medical SLU

Leyenda símbolos



No contiene látex en formulación



Caducidad



Fabricante



Producto esterilizado con rayos gamma



Manténgase en lugar seco



No exponer el producto a la radiación solar

BSN Medical SLU

Avda Baix Llobregat 3-5, Edificio Bayer, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel. Atención cliente: 93.521.01.20 Fax. Atención cliente: 93.521.02.10

B62495882

www.bsnmedical.com.es