


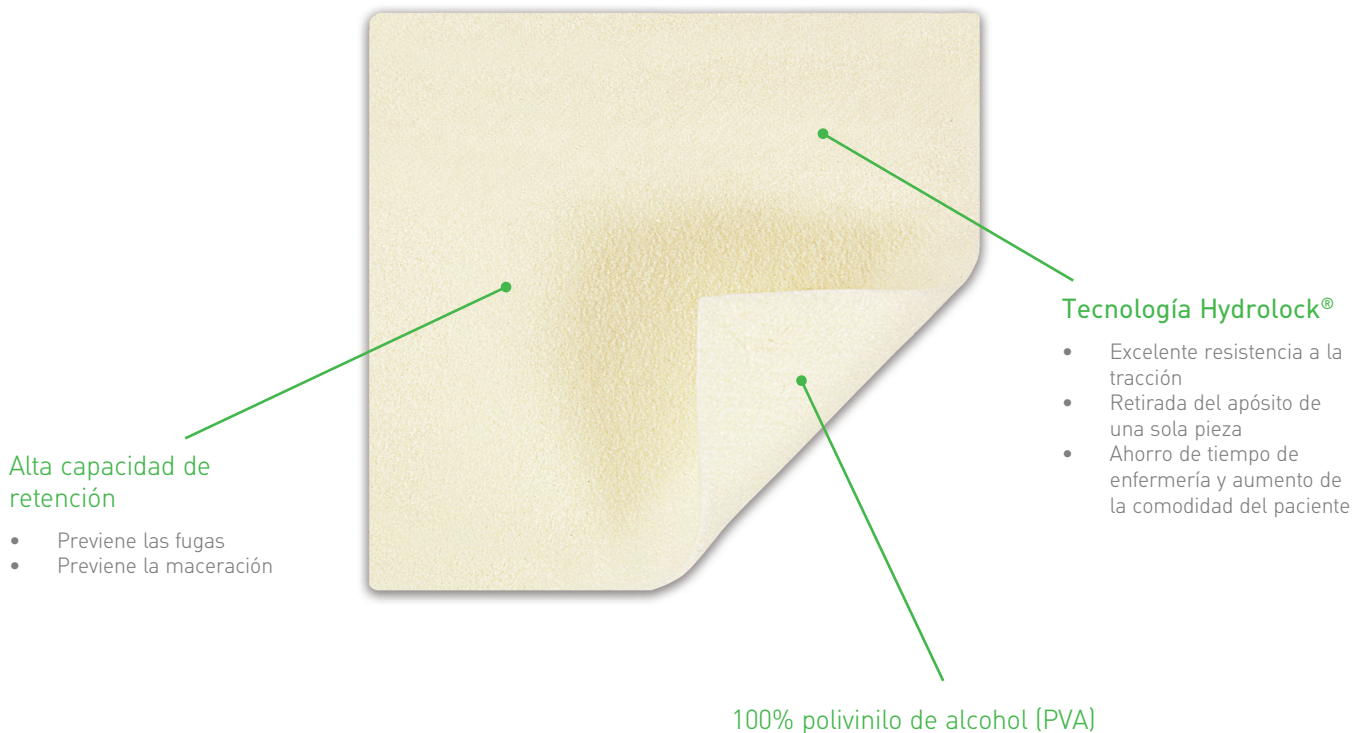


## Apósito de PVA para la **captura y bloqueo** de fluidos y bacterias


- Gran capacidad de retención para prevenir fugas de exudado y maceración
- Gracias a su alta resistencia a la tracción, se retira de una sola pieza
- Combina la capacidad de **captura y bloqueo** del exudado
- **Encapsula** el exudado
- Muy absorbente, también bajo terapia de compresión
- Suave y adaptable lo que facilita su aplicación



## Forma de utilización de Exufiber

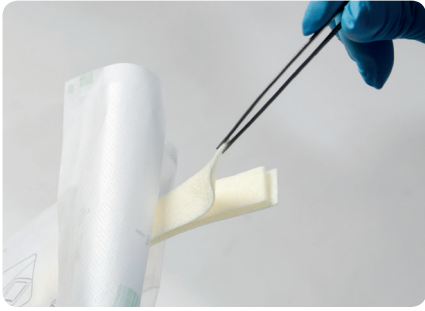

1. Limpiar la herida con suero salino o agua. Secar la piel perilesional.

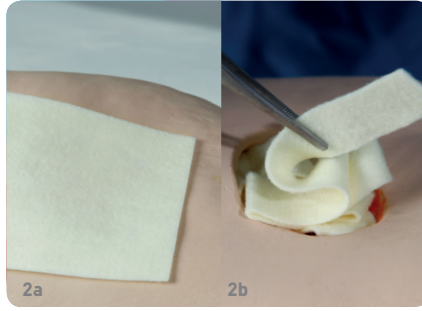

2a. Aplicar Exufiber sobre la herida. El apósito debe cubrir toda la herida y solaparse con la piel perilesional al menos 1-2 cm en las medidas más pequeñas y 5 cm en las grandes.  
2b. Rellena la herida con la cinta o sábana dejando espacio para la dilatación del apósito.



3. Fijar con un apósito secundario apropiado. Se puede usar terapia de compresión conjuntamente con Exufiber.

## Cómo funciona Exufiber

Exufiber es un apósito de PVL para la **captura y bloqueo** de fluidos y bacterias para el tratamiento de heridas contaminadas. Consigue **encapsular** el exudado gracias a la composición de polivinilo de alcohol y a la tecnología patentada Hydrolock®.

Gracias a la tecnología Hydrolock®, las fibras de Polivinilo de Alcohol (PVA) de Exufiber están entrelazadas en todas direcciones y fijadas mecánicamente entre sí, lo que ofrece una alta integridad del apósito también en mojado.

La tecnología Hydrolock® **bloquea** el exudado eliminando los espacios muertos dentro de sus fibras, permitiendo minimizar la libertad de fluidos, lo que obtiene una **retención superior**.

## Precauciones

Todas las heridas deben examinarse con frecuencia. En caso de signos de infección clínica, consulte al profesional sanitario para un tratamiento adecuado. Exufiber no está indicado en heridas secas o en quemaduras de espesor total.

Para facilitar la retirada se puede humedecer el apósito de acuerdo con las políticas locales (ej. con suero salino o agua esteril), una vez humedecido la retirada será cómoda y suave.

## Beneficios de Exufiber

- Alta resistencia a la tracción para conseguir la retirada de una pieza
- Gran capacidad de retención. **Bloquea** el exudado previniendo las fugas y la maceración
- Absorbe y retiene el exudado, la sangre y las bacterias
- Suave y adaptable lo que facilita su aplicación

## Indicaciones

Exufiber está indicado en un amplio rango de heridas con niveles de exudado de moderado a muy alto.

Especialmente recomendado para el tratamiento de úlceras venosas.

También indicado para úlceras por presión, heridas cavitadas, úlceras de pie diabético, heridas quirúrgicas, sinus pilonidal.



## Presentaciones Exufiber (Estéril)

Nº. Ref.	Tamaño cm.	Unids./ Env.	Unids./ TRP.
603300	5x5	10	40
603301	10x10	10	60
603302	15x15	10	60
603303	20x30	5	20
603308	2x45	5	20

Formatos disponibles tanto para heridas planas, como cavitadas.