


Lyof foam[®] Max

Apósito de espuma de poliuretano muy absorbente

Lyof foam[®] Max es un apósito muy absorbente compuesto por una espuma de poliuretano y un film protector resistente al agua y altamente permeable a gases, que permite el control efectivo del exudado en heridas con niveles de exudado entre moderado y alto.

Film protector de poliuretano

- Permeable al vapor.
- Resistente al agua.
- Barrera frente a virus y bacterias*.

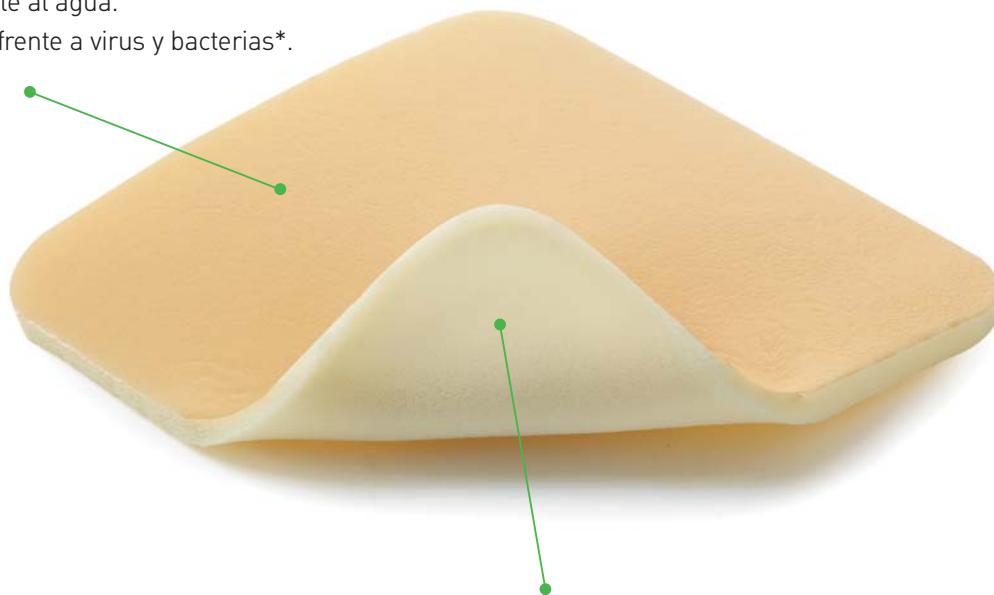

Espuma hidrofílica de poliuretano

- Muy absorbente y con capacidad de retención del fluido.
- Apto bajo compresión.
- Suave, adaptable y fácil de aplicar y retirar.

Indicaciones


Lyofoam Max está diseñado para heridas con niveles de exudado entre moderado y alto, tales como úlceras vasculares y úlceras por presión.

A través de un excelente control del exudado, **Lyofoam Max** crea un ambiente húmedo en la herida para favorecer una óptima cicatrización.


Beneficios de Lyofoam Max

- Muy absorbente y con capacidad para la retención del exudado.¹
- Minimiza el riesgo de maceración. Se puede llevar puesto más tiempo.¹
- Film protector resistente al agua que actúa como barrera de protección frente a virus y bacteriasx.
- Apto bajo compresión.
- Fácil de aplicar y retirar.
- Suave y adaptable. Proporciona comodidad a los pacientes.
- Disponible un amplio rango de medidas para adaptarse a todo tipo de heridas.


Forma de utilización de Lyofoam Max

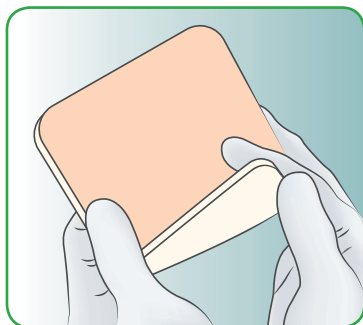

Limpiar la zona de la herida y seleccionar el tamaño más apropiado de Lyofoam Max.

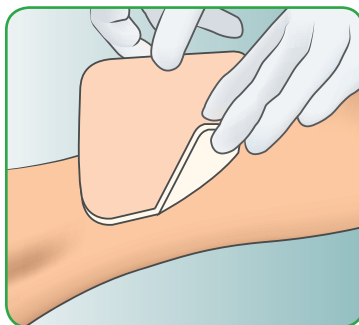

Colocar el lado de la espuma directamente sobre la herida. La espuma tiene que sobresalir de la herida 2 cm. por cada lado.

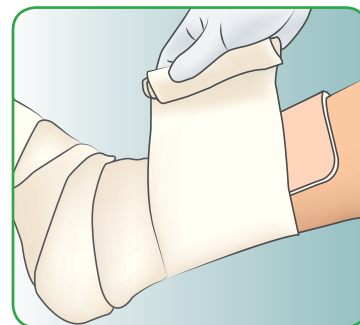

Asegurar Lyofoam Max con un vendaje apropiado, como por ejemplo Tubifast 2 Way Stretch, o un esparadrapo tipo Mefix.

Frecuencia de cambio

Lyofoam Max puede permanecer en su sitio durante varios días, dependiendo de la tipología y condiciones de la herida y del nivel de exudado.

Referencias

1. SMTL reports
 - Report No. 11/3674/1
 - Report No. 11/3571/2
 - Report No. 11/3571/3
 - Report No. 11/3571/6
 - Report No. 11/3571/7



PRESENTACIONES LYOFOAM MAX

nº Ref.	Tamaño cm	Uds./ env.	Uds./ TRP
603200	7,5 x 8,5	10	120
603201	10 x 10	10	60
603203	10 x 20	10	60
603204	15 x 15	10	70
603205	15 x 20	10	60
603206	20 x 20	10	80

Sobres estériles