



**MICRODACYN60™ WOUND CARE SOLUCION 500 ML.**  
**C.N.172389**

### 1-COMPOSICIÓN

AGUA ELECTROLIZADA H<sub>2</sub>O  
CLORURO DE SODIO CLNA. SODIO MAGNESIO FLUORSILICATO (excipiente)  
ACIDO HIPOCLOROSO HOCL \*HIPOCLORITO DE SODIO NaOCL \* \*Sustancias  
auxiliares tras la tecnología Microcyn patentada)  
Microdacyn60™ NO CONTIENE LATEX en su composición.

### 2-DATOS CLÍNICOS

#### Indicaciones terapéuticas

Microdacyn60™ Wound Care es una solución indicada para el desbridamiento y la hidratación de las heridas, úlceras, cortes abrasiones y quemaduras de naturaleza tanto aguda como crónica.

Microdacyn60™ Wound Care presenta también un efecto antiinflamatorio directo sobre la herida debido a su mecanismo de acción.

Es aplicable en mucosas: boca, nariz y oído.

El Ácido Hipocloroso y el Hipoclorito Sódico son sustancias auxiliares con un amplio efecto un efecto antimicrobiano local.

Al reducir la cantidad de microorganismos y contribuir a mantener un entorno húmedo, permite al organismo realizar su propio proceso de cicatrización.

Microdacyn60™ Wound Care puede aplicarse de manera generalizada como parte de un tratamiento integral de heridas y durante todo el proceso cicatricial.

La composición de Microdacyn60™ Wound Care solución, no afecta al tejido sano, únicamente a microorganismos unicelulares, imitando el mecanismo de defensa del cuerpo humano.

La solución ha pasado un proceso de electrolizado con la tecnología patentada Microdacyn Wound Care, que le confiere sus propiedades y una alta estabilidad.

El Ph de Microdacyn60™ Wound Care es neutro.

Microdacyn60™ Wound Care es compatible con otros tratamientos, y en concreto con la Terapia de desbridamiento larval.

### 3-MANIPULACIÓN

Microdacyn60™ Wound Care es biocompatible para su uso indicado, no irrita la piel, los ojos ni la garganta humanos, y no es un sensibilizador de la piel.

No se requieren precauciones de manipulación especiales.

Microdacyn60™ Wound Care está preparado para su uso, no es necesario mezclarlo ni diluirlo.



**MICRODACYN60™ WOUND CARE SOLUCION 500 ML.**  
**C.N.172389**

**4-MODO DE EMPLEO:**

Limpie y seque el área.  
Aplique Microdacyn60™ Wound Care directamente en la zona afectada, en fomento entre 2-10 minutos, y repita de una a tres veces al día en función del objetivo terapéutico.  
No es necesario retirarlo.  
Cubra la herida con el apósito que considere más indicado.  
Utilice Microdacyn60™ Wound Care en cada cambio de apósito de la herida.  
Puede aplicarse de manera generalizada como parte de un tratamiento integral de heridas.  
Se puede combinar con otros tratamientos.  
Se puede aplicar durante todo el proceso de cicatrización.

**5-ADVERTENCIAS Y ASPECTOS QUE HAY QUE TENER EN CUENTA**

Si el precinto a prueba de manipulación indebida está roto, no utilice el producto.  
Utilice siempre solución nueva, no reutilice el producto.  
Uso externo, no apto para inyección o consumo.  
No utilice este producto si es alérgico a sus ingredientes.  
No utilice Microdacyn60™ Wound Care junto con otras soluciones tópicas sin el asesoramiento de un profesional sanitario.  
En caso de heridas graves, profundas, o si le preocupa algún otro aspecto del tratamiento consulte con un profesional sanitario.  
Si presenta signos de infección (aumento de dolor, hemorragia, pus etc.) o si la herida no muestra signos de cicatrización, consulte a un profesional sanitario.  
El uso Microdacyn60™ Wound Care no excluye el uso de antibióticos sistémicos o locales cuando lo requiere el paciente.  
Si presenta una reacción adversa consulte con el profesional sanitario.  
Mantenga fuera del alcance y de la vista de los niños.

**6-ELIMINACIÓN**

Microdacyn60™ Wound Care no es tóxico y es seguro para el medio ambiente.  
Todos los productos de la tecnología Microcyn60™ están certificados por la EPA.  
No se requieren condiciones de eliminación especiales.



**MICRODACYN60™ WOUND CARE SOLUCION 500 ML.**  
**C.N.172389**

**7-ESTERILIDAD**

Está garantizada durante 24 meses desde su fabricación y 60 días después de la apertura.

**8-INTERACCIONES**

Microdacyn60™ Wound Care no tiene interacciones conocidas con otros productos.

**9-CONSERVACIÓN**

Microdacyn60™ Wound Care debe conservarse en su recipiente hermético original a condiciones ambiente. Conservar a temperatura ambiente y prevenir el congelamiento. No es inflamable. Después del uso, el recipiente debe cerrarse de nuevo antes de guardarlo.

**10-ESTABILIDAD**

La estabilidad y la esterilidad de Microdacyn60™ está garantizada hasta la fecha de caducidad (el año y el mes de caducidad AAAAMM se indican en el frasco). Cuando lo abra, anote la fecha en el frasco, en el apartado "fecha de apertura". La estabilidad y la esterilidad del está garantizado durante 60 días después de la apertura.