



MICRODACYN60™ WOUND CARE SOLUCION

COMPOSICIÓN

AGUA ELECTROLIZADA	H2O	ACIDO HIPOCLOROSO	HOCL
CLORURO DE SODIO	CLNA		
HIPOCLORITO DE SODIO	NaOCL	*otros agentes véase adjunto	
NO CONTIENE LATEX EN SU COMPOSICIÓN			

DATOS CLÍNICOS

Indicaciones terapéuticas

Microdacyn60™ Wound Care es una solución electrolizada indicada para utilizarse en el desbridamiento, la irrigación y la hidratación de las heridas, úlceras, cortes abrasiones y quemaduras de naturaleza tanto aguda como crónica. Microdacyn60™ presenta también un efecto antiinflamatorio directo sobre la herida. Es aplicable en cavidades como la boca, nariz y oído. El Ácido Hipocloroso y el Hipoclorito Sódico son sustancias auxiliares que pueden tener un efecto antimicrobiano local. Al reducir la cantidad de microorganismos y contribuir a mantener un entorno húmedo, permite al organismo realizar su propio proceso de cicatrización. Microdacyn60 Wound Care puede aplicarse de manera generalizada como parte de un tratamiento integral de heridas.

MANIPULACIÓN

Microdacyn60™ Wound Care es biocompatible para su uso indicado, no irrita la piel, los ojos ni la garganta humanos, y no es un sensibilizador de la piel. No se requieren precauciones de manipulación especiales. Microdacyn60™ Wound Care está preparado para su uso, no es necesario mezclarlo ni diluirlo. Aplique Microdacyn60™ Wound Care directamente a la zona afectada. Utilice Microdacyn60™ en cada cambio de apósito de la herida. Puede aplicarse de manera generalizada como parte de un tratamiento integral de heridas.

CONSERVACION

Microdacyn60™ Wound Care debe conservarse en su recipiente hermético original a condiciones ambiente. Conservar a temperatura ambiente y prevenir el congelamiento. No es inflamable. Después del uso, el recipiente debe cerrarse de nuevo antes de guardarlo.

ESTABILIDAD

Hasta que se abre, la estabilidad y la esterilidad de Microdacyn60 Wound Care está garantizada hasta la fecha de caducidad (el año y el mes de caducidad AAAAMM se indican en el frasco). Cuando lo abra, anote la fecha en el frasco, en el apartado "fecha de apertura". La estabilidad y la esterilidad de la solución no utilizada está garantizada por un máximo de 60 días después de la apertura.



MICRODACYN60™ WOUND CARE SOLUCION

MODO DE EMPLEO:

Microdacyn60™ Wound Care está preparado para su uso, no es necesario mezclarlo ni diluirlo. Aplique Microdacyn60™ Wound Care directamente a la zona afectada. Utilice Microdacyn60™ en cada cambio de apósito de la herida. La saturación del apósito con Microdacyn60 Wound Care facilitará la retirada del apósito.

TRATAMIENTO

Empape/sature el apósito con Microdacyn60 Wound Care en cada cambio de apósito, como y cuando sea necesario. La inmersión se permite un máximo de 15 minutos diarios durante el tratamiento inicial.

ADVERTENCIAS Y ASPECTOS QUE HAY QUE TENER EN CUENTA

Si el precinto a prueba de manipulación indebida está roto, no utilice el producto.
Utilice siempre solución nueva, no reutilice el producto.
Uso externo, no apto para inyección o consumo.
No utilice este producto si es alérgico a sus ingredientes.
No utilice Microdacyn60 Wound Care junto con otras soluciones tópicas sin el asesoramiento de un profesional sanitario.
En caso de heridas graves, profundas, o si le preocupa algún otro aspecto del tratamiento consulte con un profesional sanitario.
Si presenta signos de infección (aumento de dolor, hemorragia, pus etc.) o si la herida no muestra signos de cicatrización, consulte a un profesional sanitario.
Si presenta una reacción adversa consulte con el profesional sanitario.
Además de Microdacyn60 Wound Care en algunos casos puede ser necesario el uso de antibióticos sistémicos o locales.
Mantenga fuera del alcance y de la vista de los niños.

ELIMINACION

La solución no es tóxica y es segura para el medio ambiente. No se requieren condiciones de eliminación especiales.

ESTERILIDAD

La esterilidad depende de los conservantes que contiene el líquido.



MICRODACYN60™ WOUND CARE SOLUCION

PRESENTACIONES

Producto	Código Nacional	Presentación
Microdacyn Solución Spray 250 ml	172388.8	Caja de 12 / u
Microdacyn Solución 500 ml	172389.5	Caja de 6 /u - 24 / u
Microdacyn Solución 5000 ml	172393.2	Caja de 4 / u
Microdacyn Solución 990 ml	172391.8	Caja de 6 / u