

ASKINA® TOUCH

APÓSITO HIDROCELULAR MULTICAPA ESTÉRIL, NO ADHESIVO

Apósito de espuma de poliuretano (hidrocelular) multicapa, no adhesivo y estéril.

COMPOSICIÓN

- Capa de contacto no adherente.
- Capa intermedia en poliéster.
- Fórmula de alta absorción en hidrogel
- Capa interfase
- Film de poliuretano reticulado
- Film externo recubrimiento en poliuretano.

INDICACIONES

Indicado en la cura húmeda y térmica, así como en la profilaxis de las úlceras y lesiones crónicas de la piel.

Muy flexible y adaptable a las distintas anatomías del cuerpo.

Impermeable al agua y microorganismos pero permeable al vapor de agua e intercambios gaseosos. No deja residuos en su retirada al no desintegrarse.

Impermeable al agua y microorganismos pero permeable al vapor de agua e intercambios gaseosos. No deja residuos en su retirada al no desintegrarse.

Caracterizado por su estabilidad estructural y alta capacidad de absorción, retirando el exceso de exudado en contacto directo con el lecho ulceral y manteniéndolo en un compartimento superior para evitar cualquier daño sobre la piel perilesional.

Compatible con todos los productos de cura en ambiente húmedo. Mantiene sus características de absorción y retención de exudado bajo vendaje compresivo.

Puede permanecer hasta 7 días en su aplicación.

INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN

Askina® Touch es muy fácil de aplicar y no se precisan conocimientos ni equipos especiales.

Askina® Touch puede dejarse colocado durante varios días, dependiendo de la cantidad de exudado siempre y cuando no se produzcan fugas, en cuyo caso hay que realizar el cambio de apósito.

Preparación de la piel: limpiar la lesión con una solución para limpieza y descontaminación (PHMB+Betaina) o solución salina en su defecto. Secar la piel alrededor de la lesión.

Aplicación del apósito: seleccionar el tamaño adecuado de **Askina® Touch** que cubra completamente la superficie de la lesión, asegurando un margen de 2 a 3 cm alrededor de los bordes de la lesión.

Si fuera preciso, **Askina® Touch** se puede recortar al tamaño necesario antes de retirar las capas de protección. Siempre que se requiera, es posible sobreponer varios apósitos a fin de cubrir las lesiones grandes.

Colocar **Askina® Touch** sobre la lesión y fijarlo con un apósito secundario o vendaje.

Askina® Touch puede dejarse colocado durante varios días, máximo una semana, según el estado de la lesión.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

Conservar en lugar fresco y seco.

Caducidad: 3 años.



PRESENTACIONES

Descripción	Presentación	Código B Braun
Askina® Touch 10x10 cm	C/10 unidades	7261002
Askina® Touch 10x15 cm	C/5 unidades	7261501
Askina® Touch 15x15 cm	C/10 unidades	7262253
Askina® Touch 20x20 cm	C/ 5 unidades	7264001

Marca CE: 0050

