



Medihoney® Derma Cream **Medihoney® Barrier Cream**

1.- Descripción

Medihoney® Derma / Barrier Cream son unas cremas de uso tópico, que contienen un 30% de ALH (Active Leptospermum Honey), lo que les confiere sus propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias.

Medihoney® Barrier Cream, además de todos los ingredientes de Medihoney® Derma Cream, incorpora Dimeticona y Trimetilsiloxysilicato, que forman como una película barrera de protección de la piel contra los daños producidos por la exposición continuada a líquidos o humedad excesiva.

Medihoney Derma / Barrier Cream hidrata para mantener la piel flexible y suave y ayudar a apoyar la función de barrera natural de la piel.

Medihoney Derma / Barrier Cream tiene un pH de 3,5 a 5, lo que ayuda a mantener el pH óptimo para proteger la piel frente a patógenos (Cooper et al, 2010).

Medihoney Derma / Barrier Cream está formulado con ingredientes naturales. No contiene lanolina, parabenos, esteroides o aceites minerales, que a menudo puede conducir al desarrollo de sensibilidades.



2.- Indicaciones

Las indicaciones para el uso incluyen:

Medihoney® Derma Cream:

- Controla la infección cutánea superficial, ya sea de origen bacteriano o fúngico
- Ayuda a restaurar el pH de la piel
- Control de episodios de problemas cutáneos (irritación, prurito, foliculitis,...)

Medihoney® Barrier Cream:

- Controla la infección cutánea superficial, ya sea de origen bacteriano o fúngico
- Ayuda a mantener el pH de la piel donde se utiliza
- Control de episodios de problemas cutáneos (irritación, prurito, foliculitis,...)
- Protección de la "piel en riesgo" asociado con la incontinencia.
- Protección de la piel perilesional frente al exudado de la herida
- Previene la maceración.
- Ayuda a proteger la piel del daño causado por la fricción o el cizallamiento



3.- Contraindicaciones

MEDIHONEY® no debería ser utilizado en pacientes con sensibilidad conocida a alguno de sus componentes.

4.- Aplicación y posología

- Aplique una pequeña cantidad sobre la piel limpia y seca cada 8 horas.
- Volver a aplicar después del baño
- Puede ser utilizada en niños.

5.- Material / Composición

Medihoney® Derma Cream:

- 30% Medihoney® ALH
- Aceite de coco, Extracto de flores de Camomila, Aceite de Onagra,
- Aloe Vera y Vitamina E.

Medihoney® Barrier Cream:

- 30% Medihoney® ALH
- Aceite de coco, Extracto de flores de Camomila, Aceite de Onagra,
- Aloe Vera y Vitamina E.
- Dimeticona y Trimetilsiloxysilicato (película barrera frente a fluidos)

Medihoney® Derma / Barrier Cream **NO** contienen:

- Esteroides
- Lanolina
- Aceites minerales
- Colorantes o fragancias añadidas
- Parabenos

6.- Presentaciones

CÓDIGO A&L	CÓDIGO NACIONAL	PRODUCTO	PRESENTACIÓN UNIDAD DE VENTA
582	177815.4	Medihoney® Barrier Cream Tubo 50 g	1 Caja 24 Tubos
597	177817.8	Medihoney® Derma Cream Tubo 50 g	1 Caja 24 Tubos



7.- Envasado

Envase unitario tubo 50 g

Con etiquetado en el que figura:

- Denominación del artículo
- Fecha de caducidad
- Número de lote

8.- Método de Esterilización

No estéril

9.- Conservación

Entre 10º y 25º

10.- Garantía de Calidad

Marcado CE Clase I

11.- Referencias Bibliográficas

- (1) Simon, Arne, et al, "Wound care with antibacterial honey (Medihoney) in pediatric hematology-oncology", Support Care Cancer, (2006) 14:91-97
- (2) George, Narelle, Cutting, Keith, "Antibacterial Honey (MedihoneyTM): in vitro Activity Against Clinical Isolates of MRSA, VRE and Other Multiresistant Gram Negative Organisms Including Pseudomonas aeruginosa", Wounds 2007: 19 (9): 231-236.
- (3) Simon, A, Traynor, K, et al, "Medical Honey for Wound Care—Still the Latest Resort", eCAM 2009:6(2) 165-173.
- (4) Tonks, A J, Dudley, E, et al, "A 5.8 kDa component of Manuka honey stimulates immune cells via TRL4", Journal of Leukocyte Biology, Nov. 2007.
- (5) Gethin GT, Cowman S, Conroy RM. "The impact of Manuka honey dressings on the surface pH of chronic wounds," Int Wound J 2008;5:185–194



Actinio&Lantano,s.l.

Ficha Técnica **MEDIHONEY DERMA / BARRIER CREAM**

Ctra. Torrejón – Ajalvir. Km 5,200
28864 - Ajalvir (Madrid)



www.actiniolantano.com
customers@actiniolantano.com
Página 4 de 4