




# UrgoStart

## ESPUMA MICRO ADHERENTE IMPREGNADA CON TLC-NOSF

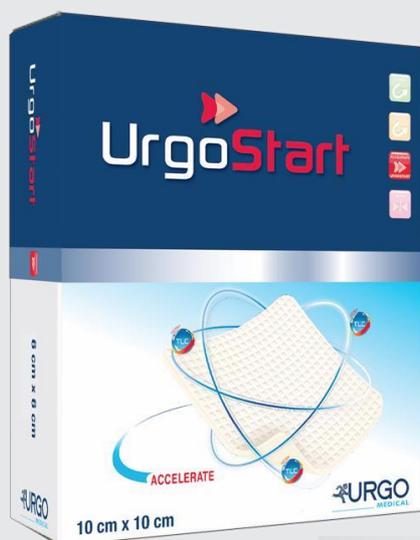

CE 0459    

### Indicación: Heridas crónicas con exudado bajo o moderado

- Acelera el proceso de cicatrización de las heridas
- Restaura el equilibrio bioquímico de las heridas crónicas
- Absorción vertical e inmediata



 **UrgoStart**

Presentado en sobre estéril individual suministrados por cajas

Tamaño	U/C	Referencia URGO	Código Nacional
10x10 cm	10	506485	161863.4
15x15 cm	10	506484	161864.1
15x20 cm	10	506482	161865.8





# UrgoStart

## DESCRIPCIÓN

**Urgostart®** es una matriz absorbente con TLC-NOSF, innovación exclusiva patentada por los Laboratorios URGO.

**COMPOSICIÓN:** UrgoStart® es un apósito matricial absorbente, no adhesivo y no oclusivo formado por 3 capas:

- Una matriz lípido-coloide microadherente, impregnada de una solución polimérica de carboximetilcelulosa, componentes lipídicos y NOSF (Factor nano-oligosacarido).
- Una compresa de espuma de poliuretano super-absorbente.
- Un soporte protector de poliuretano.

**MODO DE ESTERILIZACIÓN:** Esterilización por radiación ionizante.

## PROPIEDADES

- En contacto con los exudados de la herida, la TLC combinada con el NOSF confiere a la matriz propiedades específicas que permiten iniciar un proceso de cicatrización óptimo. Gracias a las partículas hidrocoloides, la capa micro-adherente de TLC forma un gel lípido-coloide creando un ambiente húmedo que promueve el proceso de cicatrización, permitiendo que las células claves para el proceso de cicatrización (fibroblastos, queratinocitos, macrófagos) puedan ejercer su acción.
- El NOSF (Factor nano-oligosacarido) proporciona propiedades añadidas a la TLC: En contacto con el exudado de la herida, el NOSF forma un gel que se une preferentemente con las zonas lesionadas e interactúa con el micro-ambiente de la lesión limitando la acción negativa de las Metaloproteasas Matriciales.
- La compresa de poliuretano garantiza un drenaje óptimo de los exudados, protegiendo la piel contra la maceración.
- El soporte del apósito es flexible, muy conformable y no oclusivo: esto permite que se adapte a los relieves anatómicos de la herida.
- **Urgostart®** facilita la cura de enfermería debido a su facilidad de uso y a la aceptación de los pacientes. Es posible utilizar **UrgoStart®** bajo un vendaje de compresión, debido a su capacidad para retener exudado.

## INDICACIONES

- **Urgostart®** está indicado para todas las heridas crónicas con exudado bajo o moderado (úlceras vasculares de pierna, úlceras por presión, úlceras de pie diabético, úlceras agudas de larga evolución).

## CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

### MODO DE EMPLEO:

#### 1. Preparación de la herida:

- Limpiar la herida según el protocolo habitual.
- En el caso de que se haya usado previamente un antiséptico, aclarar cuidadosamente la herida con suero fisiológico.

#### 2. Aplicación del apósito:

- Retirar las aletas de protección del apósito.
- Aplicar la cara micro-adherente de **Urgostart®** sobre la herida.
- Aplicar una banda de fijación si fuese necesario, y después una banda de contención si ha sido prescrita.

#### 3. Renovación del apósito:

- Los apósitos de **Urgostart®** deben ser renovados cada 2-4 días y pueden mantenerse hasta un máximo de 7 días dependiendo del nivel de exudado y de las condiciones de la herida.
- La recomendación de duración del tratamiento es un mínimo de 4 a 5 semanas.

### PRECAUCIONES DE EMPLEO:

- La capa micro-adherente con TLC-NOSF de **Urgostart®** se adhiere a los guantes quirúrgicos (látex). Por ello está recomendado evitar el contacto de los guantes con esta capa.
- En heridas con síntomas de colonización bacteriana importante, se aconseja tratar previamente el componente bacteriano antes de iniciar el tratamiento con **Urgostart®**.
- Se han descrito sensaciones eventuales de picores, e incluso sensaciones dolorosas, principalmente al inicio del tratamiento con **Urgostart®**. Estos síntomas raramente justifican la suspensión del tratamiento.
- No re-esterilizar el apósito.
- Acondicionamiento individual estéril, de un solo uso: la reutilización de un apósito de un solo uso puede provocar riesgos de infección.
- Conservar los apósitos **Urgostart®** horizontales.
- En caso de una úlcera atípica que presente induración o hipergranulación, el tratamiento con **Urgostart®** no será iniciado más que después de haber verificado la ausencia de degeneración de la úlcera, con objeto de no retrasar el diagnóstico.
- En ausencia de datos clínicos no se recomienda el uso de UrgoStart® como tratamiento de primera línea en las heridas agudas y en el tratamiento de la epidermolisis bullosa (incluso para las lesiones de larga duración).

### CONTRAINDICACIONES:

Con el fin de no retrasar un tratamiento óptimo, UrgoStart está contraindicado en:

- Úlceras cancerosas.
- En heridas fistulosas que puedan revelar un absceso profundo.

**ESTATUS REGLAMENTARIO:** Producto sanitario de clase IIb