

Conveen Critic Barrier



Indicaciones:

Conveen Critic Barrier está indicada para restaurar el deterioro cutáneo causado por la incontinencia fecal (diarrea severa o crónica), drenaje enzimático (fístulas entero-cutáneas), lesiones por radioterapia, así como para la prevención de la maceración e irritación de la piel.

Conveen Critic Barrier tiene gran capacidad de absorción y se puede aplicar sobre la piel o lesión húmedas.

Conveen Critic Barrier alivia las siguientes condiciones de piel: Dermatitis moderada, Dermatitis Severa, otras dermatitis por efluentes corporales (periestomal, traqueostomía, etc.). Radiodermatitis (RTOG: Grado 3 y 4) siguiendo las recomendaciones del “Manual de sugerencias en la prevención y tratamiento de la Radiodermatitis”.

Descripción:

Conveen Critic Barrier es una crema barrera indicada para restaurar la piel deteriorada por la incontinencia urinaria y/o fecal, así como para la prevención de la maceración e irritación cutánea.

Se precisa una cantidad muy pequeña de crema. Para aplicarla, se lava la zona con agua y jabón neutro y se seca. La crema se absorbe rápidamente.

Precauciones:

Sólo para uso externo.

Evite el contacto directo con los ojos.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

No utilizar en pacientes con alergia conocida a alguno de los componentes.

Composición:

Vaselina, goma de celulosa, óxido de zinc 20% y dimeticona.

Presentación:**Envasado:**

Envase unitario con etiquetado en el que figura:

- Denominación del artículo
- Fecha de Caducidad
- Referencia Comercial
- Número de lote
- Nombre del fabricante

Almacenaje:

Temperatura ambiente de 10 a 25 grados.

Precauciones:

Solo para uso externo. Evite el contacto directo con los ojos.

Garantía de Calidad:

Certificado CE.
Producto libre de látex.
No contiene ftalatos.

Presentación:

Tubo de 50 gramos.

Referencia	Código Nacional	Presentación
66102	251959	Tubo de 50 gr.

Distribuidor:

Coloplast Productos Médicos, S. A.
C/ Condesa de Venadito, 5 – 4ª planta
28027 Madrid
Teléfono: 91 314 18 02
900 21 04 74

