



UrgoTul Absorb Border

ESPUMA SUPERABSORVENTE MICROADHERENTE CON TLC Y REBORDE DE SILICONA IMPERMEABLE



CE 0459

Para el tratamiento y la cicatrización de las heridas

- Cicatrización óptima
- Alto nivel de absorción y retención del exudado evitando el riesgo de maceración
- Reborde adhesivo siliconado impermeable
- Retirada sin dolor y atraumática



UrgoTul Absorb Border®

Suministrado en cajas con blíster individual esterilizado, listo para su uso.

Tamaño	U/C	Referencia URGO	C.N
8x8 cm	10	551302	-
10x10 cm	10	551303	-
13x13 cm	10	550752	-
15x15 cm	10	550754	-
15x20 cm	10	550755	-
Sacrum 20x20 cm	5	550756	-
13x13 cm*	3	550751	499715.6
15x15 cm*	3	550753	499707.1
Sacrum 20x20 cm*	3	551740	486977.4

*Formatos financiados por la S.S. para heridas crónicas



UrgoTul Absorb Border

DESCRIPCIÓN

UrgoTul Absorb Border® es un apósito de espuma de poliuretano lípido coloide con adhesivo de silicona y una trama micro-adherente con TLC (Tecnología Lípido-Coloide constituida por polímeros y partículas hidrocoloides), tecnología innovadora desarrollada por los Laboratorios Urgo.

UrgoTul Absorb Border® está compuesto por:

- Malla micro-adherente con TLC combinada con una espuma absorbente de poliuretano y una capa superabsorbente de poliacrilato
- Soporte permeable al vapor e impermeable al agua con adhesivo de silicona en los bordes

MODO DE ESTERILIZACIÓN:

Esterilizado por óxido de etileno.

PROPIEDADES

UrgoTul Absorb Border® ofrece todos los beneficios de la TLC y bordes adhesivos de silicona (ambiente húmedo, cicatrización óptima y retirada no traumática).

TLC (Tecnología lípido-coloide)

TLC es una innovadora tecnología patentada que consiste en una combinación única de polímeros y partículas hidrocoloides, proporcionando una retirada indolora y no traumática para los pacientes a la vez que optimiza la cicatrización. En contacto con el exudado de la herida, estas partículas gelifican y crean un ambiente húmedo, beneficioso para la cicatrización permitiendo que las células clave que intervienen en el proceso de reparación (fibroblastos, queratinocitos, macrófagos) ejerzan su acción. De esta forma, **UrgoTul Absorb Border®** proporciona un resultado óptimo en la cicatrización. La eficacia de la TLC se ha demostrado en varios estudios clínicos con más de 36.000 pacientes.

La espuma absorbente de poliuretano y la capa superabsorbente de UrgoTul Absorb Border garantiza una alta capacidad de gestión de los fluidos, evitando la maceración. La capa impermeable de UrgoTul Absorb Border es suave, muy adaptable y no oclusiva, ayudando a asegurar un buen ajuste del apósito a las diferentes formas de la herida y evita la penetración de fluidos y bacterias. Su alta permeabilidad al vapor evita la maceración, eliminando el exceso de exudado. El adhesivo de silicona asegura también la buena adherencia del apósito y permite el reposicionamiento. Además, es muy bien tolerado por la piel. Este borde adhesivo evita la necesidad de fijación secundaria y debido a su translucidez permite controlar la penetración de fluido y cambiar el apósito solo cuando sea necesario.

Las propiedades de UrgoTul Absorb Border son numerosas:

- Cicatrización óptima
- Absorción y drenaje del exudado previniendo el riesgo de maceración
- Mantiene el medio húmedo favorable al proceso de cicatrización
- Retirada atraumática e indolora para los pacientes
- Borde adhesivo de silicona impermeable al agua, muy adaptable y fácil de aplicar

INDICACIONES

UrgoTul Absorb Border® está indicado en heridas agudas con exudado moderado o elevado (como quemaduras, dermoabrasiones, heridas traumáticas, post-operatorio...) y en heridas crónicas (tales como úlceras de pierna, úlceras por presión, úlceras de pie diabético).

- La versión **Sacrum** se recomienda para heridas exudativas situadas en la zona sacra.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

MODO DE EMPLEO:

- Limpiar la herida según el protocolo interno.
- Si se aplicó un antiséptico, limpiar la herida con suero fisiológico antes de aplicar **UrgoTul Absorb Border®**.
- Secar el exceso de líquido de los bordes de la herida con precaución.
- Retirar las aletas de protección del apósito.
- Aplicar la cara micro-adherente de **UrgoTul Absorb Border®** directamente en la herida (la herida debe ocupar el centro del apósito con un margen de seguridad de 1 cm respecto al borde de la herida).
- Aplicar si es necesario vendaje de compresión (ITB>0.8 UrgoK2 o ITB>0.6 UrgoK2 Lite).
- Para la versión Sacro, colocar la zona distal del apósito (zona de punta) en la zona sacra y la zona redondeada sobre las crestas ilíacas.
- Para retirar **UrgoTul Absorb Border®** levantar un lateral del apósito y quitar con precaución.
- **UrgoTul Absorb Border®** debe cambiarse cada 2 o 4 días, o hasta 7 días dependiendo del nivel de exudado y las condiciones de la herida.

PRECAUCIONES DE EMPLEO:

- Al llevar una capa superabsorbente, la compresa central no se puede cortar. Sin embargo, los bordes adhesivos pueden cortarse siempre utilizando tijeras estériles para adaptar el apósito a las diferentes formas de heridas.
- Si aparecen signos clínicos de infección, el tratamiento puede cambiarse a un apósito antibacteriano de la gama Urgo.
- En caso de exceso de vello rasurar la zona perilesional para asegurar el buen contacto del apósito con la herida.
- En caso de uso concomitante con crema dejar que la piel se seque antes de aplicar el apósito.
- **UrgoTul Absorb Border®** no debe ser utilizado en cámara hiperbárica.
- Envases individuales estériles de uso único: la reutilización de un apósito de uso único puede dar lugar a riesgos de infección.
- No volver a esterilizar el apósito.
- Comprobar que el protector estéril está intacto antes de usarlo. No utilizar si el envoltorio protector está dañado.

CONTRAINDICACIÓN:

No aplicar **UrgoTul Absorb Border®** si existe una sensibilidad conocida al apósito.

ESTATUS REGLAMENTARIO

- Producto sanitario de clase IIb.
- Marcado CE.