



UrgoTul

MALLA LÍPIDO-COLOIDE FLEXIBLE



CE 0459

Para el tratamiento de heridas agudas y crónicas en fase de granulación y epitelización

- Cicatrización en ambiente húmedo
- Altamente flexible
- Estimula la proliferación de los fibroblastos
- Retirada sin dolor y atraumática



UrgoTul

Suministrado en cajas con blíster individual esterilizado, listo para su uso.

Tamaño	U/C	Referencia URGO	C.N
10x12 cm	10	550011	157027.7
15x15 cm	10	550014	157028.4
20x30 cm	5	550023	168607.7
15x20 cm	10	508513	-
10x40 cm	10	550012	157029.1
10x12 cm*	3	550010	400126.6
15x15 cm*	3	550013	494021.3

*Formatos financiados por la S.S. para heridas crónicas

URGO
MEDICAL



UrgoTul

DESCRIPCIÓN

- **Urgotul®** está compuesto por la tecnología lípido coloidal (TLC), desarrollada exclusivamente por Urgo. **Urgotul®** es un apósito en malla de poliéster no oclusivo flexible y adaptable impregnado en una matriz con partículas de hidrocoloides dispersos en una matriz de vaselina.

PROPIEDADES

- En contacto con el exudado de la herida, las partículas hidrocoloides de **Urgotul®** reaccionan con la vaselina para formar una interface lípido-coloide. Esta interface crea el medio húmedo ideal para el proceso de cicatrización.
- Graso en su composición sin serlo al tacto, **Urgotul®** no se adhiere a la herida ni a la piel circundante. La retirada del apósito no es dolorosa ni traumática para la herida.
- **Urgotul®** ofrece algunas propiedades específicas:
 - creación y mantenimiento del ambiente húmedo que promueve la cicatrización,
 - retirada atraumática para los tejidos neo formados,
 - el cambio de apósito es indoloro para el paciente.

INDICACIONES

- **Urgotul®** está indicado para la gestión de:
 - Heridas agudas (quemaduras, heridas traumáticas, abrasiones, heridas post operatorias) y heridas crónicas (úlceras de la pierna, úlceras por presión y úlceras de pie diabético) en fase de granulación y epitelización.
 - Epidermólisis bullosa (EB).
- Al ser flexible, **Urgotul®** está particularmente indicado para heridas difícil localización, y en el mechado de heridas cavitadas.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

MODO DE EMPLEO:

1. Preparación de la herida:

- Limpiar la herida con suero fisiológico.
- En caso de utilizar un antiséptico, de manera previa, aclarar cuidadosamente la herida con suero fisiológico antes de aplicar **Urgotul®**.

2. Aplicación del apósito:

- Quitar la película protectora transparente.
- Aplicar **Urgotul®** a la herida en una sola capa.
- Con objeto de adaptar el tamaño de apósito a la lesión, **Urgotul®** puede recortarse utilizando material estéril.
- Cubrir **Urgotul®** con un apósito secundario adecuado para absorber el exudado de la herida.
- Mantener el apósito secundario con una venda extensible, un esparadrapo adhesivo o una venda tubular elástica.

3. Renovación del apósito:

- **Urgotul®** puede ser cambiado cada 2 a 4 días y se puede mantener colocado durante 7 días en función de la herida.
- En pacientes con epidermólisis bullosa, el apósito debería ser cambiado entre 1 a 3 días.

PRECAUCIONES DE EMPLEO:

- **Urgotul®** podría adherirse a los guantes de látex. En tal caso, humedecer los guantes con solución salina, lo que facilitará la manipulación del apósito.
- Si aparecen signos de infección local, se puede continuar el tratamiento bajo supervisión médica, aunque en este caso es preferible usar **Urgotul® S.Ag** o **Urgotul® Ag**.
- En caso de heridas profundas, no es necesario aplicar **Urgotul®** en varias capas.
- En caso de lesiones profundas, de fístula, dejar una parte del apósito **Urgotul®** visible y accesible al exterior de la lesión.
- No re-esterilizar.
- Almacenar **Urgotul®** en posición horizontal, y al abrigo de la humedad y el calor (temperatura inferior a 25°C).

ESTATUS REGLAMENTARIO

- Producto sanitario de clase II b.
- Marcado CE.