

CAVILON Crema Barrera Duradera

Referencias 3M: 3391G, 3392G y 3392GS



DESCRIPCIÓN

3M™ Cavilon™ Crema Barrera Duradera es una crema de pH equilibrado, hipoalergénica, concentrada que proporciona protección a la piel, íntegra o dañada. La crema protege la piel de los fluidos corporales e irritantes externos proporcionando una barrera de larga duración. Cavilon crema también hidrata y acondiciona la piel. El uso de esta crema permite que los productos adhesivos se peguen a la piel. No bloquea los dispositivos para incontinencia.

USOS INDICADOS

Protección de la piel frente al daño por fluidos irritantes y especialmente el asociado a incontinencia y los síntomas relacionados. También se puede usar para hidratar y acondicionar la piel seca de forma preventiva.

Este producto **es seguro de usar tanto en la piel íntacta o lesionada** por ejemplo la asociada con la incontinencia. Está especialmente indicada para su uso en pieles sensibilizadas en pacientes con Linfedema, úlceras venosas o en aquellos sometidos a tratamientos agresivos con la piel.

Su empleo es seguro en neonatos a término, niños de todas las edades así como en adultos.

COMPOSICIÓN Y MODO DE ACCIÓN

3M™ Cavilon™ Crema Barrera Duradera es una crema concentrada que contiene ingredientes para proteger e hidratar la piel. La dimeticona ayuda a proteger la piel de los contaminantes externos. El terpolímero acrilato 3M y el trimetilsiloxisilicato aseguran el efecto duradero de la crema y su resistencia al lavado. Los agentes hidratantes de la piel, (agua, glicerina, aceites y parafina) retardan la evaporación del agua de la piel. Los agentes acondicionadores de la piel (Adipato de diisooctilo, palmitato de isopropilo y PPG-15 estearil éter) mantienen un aspecto suave, liso y aportan flexibilidad a la piel.

No contiene Parabenos ni perfume.

No contiene Látex ni ingredientes de origen animal.

Libre de colorantes, alcohol o jabones.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- **Mayor efectividad** gracias a su nueva fórmula de Triple Acción: efecto barrera mejorado de larga duración, gracias a la tecnología polimérica 3M, mayor acción emoliente y acción hidratante más profunda. Ayuda a restablecer las propiedades de barrera natural frente a la humedad de la piel.
- **Pacientes protegidos por más tiempo.** Resistente al agua y lavados.
- **Más rentable** al ser una fórmula altamente concentrada. Una pequeña cantidad cubre una gran superficie cutánea que queda totalmente protegida. Por su mayor duración y resistencia requiere menos aplicaciones al día.
- **Más sencillo de usar**, al poder aplicarse fácilmente con guantes tanto en piel íntegra como dañada. Se absorbe rápidamente en la piel dejando una sensación y olor agradable.
- **Mayor confort para el paciente.** Menor número de aplicaciones, mayor protección, sensación agradable, no mancha, no pegajosa.
- **Mayor seguridad**, fórmula hipoalergénica y biocompatible. Su uso es seguro en neonatos a término, niños y adultos. **No contiene Parabenos ni perfumes.**
- **Especialmente indicado en pieles sensibilizadas**, con problemas dermatológicos o sometidas a tratamientos agresivos con ella.
- **Permite la aplicación de dispositivos adhesivos** como de apósitos, esparadrapos y equipos de medida.
- **No impide la acción de dispositivos absorbentes para incontinencia.**
- Proporciona una **barrera protectora transpirable**, lo que asegura la función protectora natural cutánea.
- La crema tiene un pH neutro lo que **preserva el manto ácido natural de la piel** como primera barrera contra microorganismos potencialmente patógenos.
- **Permite evaluar el estado de la piel** ya que Cavilon Crema una vez aplicado es transparente. No necesita ser retirado previamente a otros tratamientos o para valorar el estado de la piel.
- **Compatible con el uso de antisépticos de Gluconato de Clorhexidina**

CONTRAINDICACIONES

Ninguna conocida.

ADVERTENCIAS

PARA USO EXTERNO. Evite el contacto con los ojos. Si el estado de la piel empeora o no mejora en 7 días, consulte a un médico. Mantener fuera del alcance de los niños. En casos de ingestión, busque ayuda médica. Evitar su uso en personas con alergia o sensibilidad conocida a cualquier ingrediente en la lista. Cavilon Crema Barrera Duradera no está indicado para el tratamiento de enfermedades en la zona anal como p.e. hemorroides.

INSTRUCCIONES DE USO

Limpia suavemente la piel según sea necesario. Aplicar Cavilon Crema Barrera Duradera con moderación para cubrir toda el área afectada. Repita según sea necesario. Si la sensación es grasa, se ha aplicado demasiado producto.

No necesita ser retirado para posteriores tratamientos.

ALMACENAMIENTO

Para mejores resultados, consérvese a temperatura ambiente. No congelar. Evitar el calor y la humedad excesiva.

El producto correctamente almacenado tiene una **Vida útil de 2 años** desde la fecha de fabricación.

ENVASADO

Ref. 3M	Presentación	Envase
3392G	Tubo 92 gramos	Caja con 12 tubos
3391G	Tubo 28 gramos	Caja con 12 tubos
3392GS	Sobre mono dosis 2 gramos	Caja con 20 sobres

CUMPLIMIENTO CON NORMATIVAS

Marcado CE en conformidad con RD 1591/2009, producto sanitario Clase 1, según la regla 4 de la Directiva de productos sanitarios de la UE como un dispositivo no invasivo para el uso en la piel lesionada.

En este sentido se realizaron pruebas de Biocompatibilidad siguiendo la norma ISO 10993, Evaluación biológica de productos sanitarios, apartado 1: Evaluación y pruebas. 3M Cavilon Crema Barrera Duradera se clasifica como un dispositivo de superficie que tiene contacto permanente (> 30 días) con la piel lesionada o comprometida. Se evaluó la citotoxicidad potencial, irritación dérmica, sensibilización de la piel, la genotoxicidad y toxicidad sistémica. Los resultados de los estudios realizados confirman la biocompatibilidad de 3M Cavilon Crema Barrera Duradera.

Producto fabricado en la Comunidad Europea bajo ISO 9001 e ISO 13485.

Dpto. Curación de Heridas

3M España, S.L.

Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid



www.3Mcuradodelapiel.es