



UrgoClean Ag



EL ÚNICO APÓSITO ANTIMICROBIANO QUE COMBINA UNA ACCIÓN DE LIMPIEZA COMPLETA



PARA EL TRATAMIENTO LOCAL DE HERIDAS CRÓNICAS Y AGUDAS EXUDATIVAS CON RIESGO O SIGNOS DE INFECCIÓN LOCAL, DESDE LA FASE DE DESBRIDAMIENTO

Elimina todos los componentes que favorecen la proliferación bacteriana y pueden limitar la acción de la plata

ANTIMICROBIANO & ANTIBIOFILM

ACCIÓN DE LIMPIEZA COMPLETA

Combate la infección local y reduce la carga bacteriana dentro de la herida*

Presentación en envase individual estéril almacenados por cajas, listo para usar

Tamaño	U/C	Referencia	C.N.
10x10*	3*	552114	480269.6
15x15*	3*	551745	480277.1
6x6	10	551554	178564.0
10x10	10	551555	178565.7
15x15	10	551556	178567.1



UrgoClean Ag



DESCRIPCIÓN

- **UrgoClean Ag** se presenta bajo la forma de un apósito estéril, no tejido, de fibras poli-absorbentes hidro-detersivas de alto nivel de absorción y cohesión.
- Este apósito usa la termoconexión para unir fibras de poliacrilato, que están en un plano paralelo a la superficie de la herida según un patrón estructurado, estas fibras confieren a **UrgoClean Ag** sus propiedades específicas de absorción y de limpieza de todos los residuos de la herida, así como su resistencia a la tracción.
- El apósito hidro-detersivo está recubierto con una matriz cicatrizante micro-adherente (TLC: Tecnología Lípido-Coloide) impregnada con Plata. Esta TLC-Ag proporciona una acción antibacteriana y gelifica fácilmente, ayudando de esta manera al drenaje del tejido desvitalizado. Además, permite una fácil colocación y retirada del apósito.

PROPIEDADES

- En contacto con el exudado de la herida, la matriz TLC-Ag forma un gel que conduce a un medio húmedo favorable a la cicatrización de la herida.
- Los iones Ag + confieren a **UrgoClean Ag** una actividad antibacteriana que puede ayudar a reducir la carga bacteriana local. El Ion Ag + tiene un amplio espectro de actividad anti-microbiana que cubre a Bacterias Gramnegativas, bacterias Gram-positivas y ciertas levaduras. Es particularmente efectivo contra *Staphylococcus aureus*, MRSA, *Streptococcus pyogenes* y *Pseudomonas aeruginosa* (bacilo piciánico) que son los gérmenes más frecuentemente responsables de las heridas infectadas. **UrgoClean Ag** reduce la población bacteriana de una biopelícula en 24 horas, y durante 7 días (probado "in vitro" sobre *S. aureus* y *P. aeruginosa*).
- Al mismo tiempo, las fibras poli-absorbentes absorben el exudado y forman un gel. Estas fibras poliabsorbentes se fijan al tejido desvitalizado, lo absorben y lo drenan con objeto de ayudar a su eliminación (desbridamiento autolítico). Al llevarse las bacterias, tejido desvitalizado y el biofilm **UrgoClean Ag** mantiene la herida limpia de todos los componentes que pueden favorecer la proliferación bacteriana y la formación de biofilm, permitiendo así una acción más efectiva de los iones plata sobre el lecho de la herida.
- Además el producto puede retirarse en una sola pieza del apósito gracias a la resistencia a la tracción de las fibras poliabsorbentes.
- El gel formado no se pega a la herida, lo que permite una fácil retirada del apósito con poco o ningún daño a los tejidos de cicatrización, lo que lleva a ningún o un leve dolor.

INDICACIONES

- **UrgoClean Ag** está indicado en el tratamiento local de úlceras exudativas crónicas (úlceras de pierna, úlceras por presión, úlceras de pie diabético) y agudas (quemaduras, heridas traumáticas, heridas quirúrgicas,) y con riesgo o signos de infección local, desde la fase de desbridamiento.

MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN DE LA HERIDA:

- Limpiar la herida usando suero fisiológico. Si se ha utilizado previamente un antiséptico (con excepción de los antisépticos contraindicados), enjuagar cuidadosamente la herida con suero fisiológico antes de aplicar el apósito.
- La utilización de **UrgoClean Ag** no dispensa de la necesidad de un desbridamiento mecánico, cuando este sea necesario.
- En el transcurso de la retirada de tejido desvitalizado, puede presentarse un agrandamiento de la herida. Esto es debido a la eliminación efectiva de este tejido desvitalizado.

APLICACIÓN DEL APÓSITO:

- Retirar las aletas de protección.
- Aplicar la cara micro-adherente de **UrgoClean Ag** a la herida y sus contornos.

- **UrgoClean Ag** puede ser cortado con material estéril para adaptar, si fuese necesario, el tamaño del apósito al de la herida.
- Si fuese necesario, recubrir **UrgoClean Ag** con un apósito secundario apropiado a la localización y al nivel de exudado de la herida.
- Mantenerlo en su sitio usando una venda de compresión.
- Aplicar una venda de compresión cuando sea prescrita.

CAMBIO DEL APÓSITO:

- Los apósitos **UrgoClean Ag** deben ser renovados cada 1 a 2 días durante la fase de mayor retirada de tejido desvitalizado, y después con una frecuencia adaptada (hasta cada 7 días) al volumen de los exudados y a la evolución clínica de la herida.
- La duración máxima recomendada del tratamiento con **UrgoClean Ag** es de un mes.

PRECAUCIONES DE EMPLEO

PRECAUCIONES:

- El tratamiento con **UrgoClean Ag** debe realizarse bajo supervisión médica.
- El uso de este apósito no excluye la necesidad de un tratamiento antibacteriano sistémico apropiado, en línea con la política local.
- La matriz micro-adherente cicatrizante con plata (TLC-Ag) de **UrgoClean Ag** se adhiere a los guantes quirúrgicos de látex. Se recomienda manipular el apósito evitando el contacto con la cara impregnada o utilizando pinzas estériles.
- No se recomienda la utilización concomitante con otros tratamientos locales.
- Evitar el contacto con electrodos o geles conductores durante las mediciones electrónicas p.e. EEG y ECG.
- Los profesionales sanitarios deben tener en cuenta el hecho de que hay muy poca documentación sobre la utilización prolongada y repetida de apósitos con plata, particularmente en niños y recién nacidos.
- En ausencia de datos clínicos específicos, su uso en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, no está recomendado.
- Envase individual estéril, de un solo uso: la reutilización de un producto de un

- solo uso, puede provocar riesgos de infección.
- Verificar la integridad del protector de esterilidad antes de su uso (*).
- No re-esterilizar.
- Para su eliminación, desechar según los protocolos habituales. Desechar toda parte no utilizada del apósito.

CONTRAINDICACIONES:

- Sensibilización conocida a la plata.
- **UrgoClean Ag** no es adecuado para usar como esponja quirúrgica en lesiones muy hemorrágicas.
- No usar **UrgoClean Ag** en combinación con peróxido de hidrógeno, antisépticos órgano-mercuriales o Hexamidina.
- No usar en pacientes sometidos a exámenes de imágenes de resonancia magnética.