


# Algoplaque Film/Thin

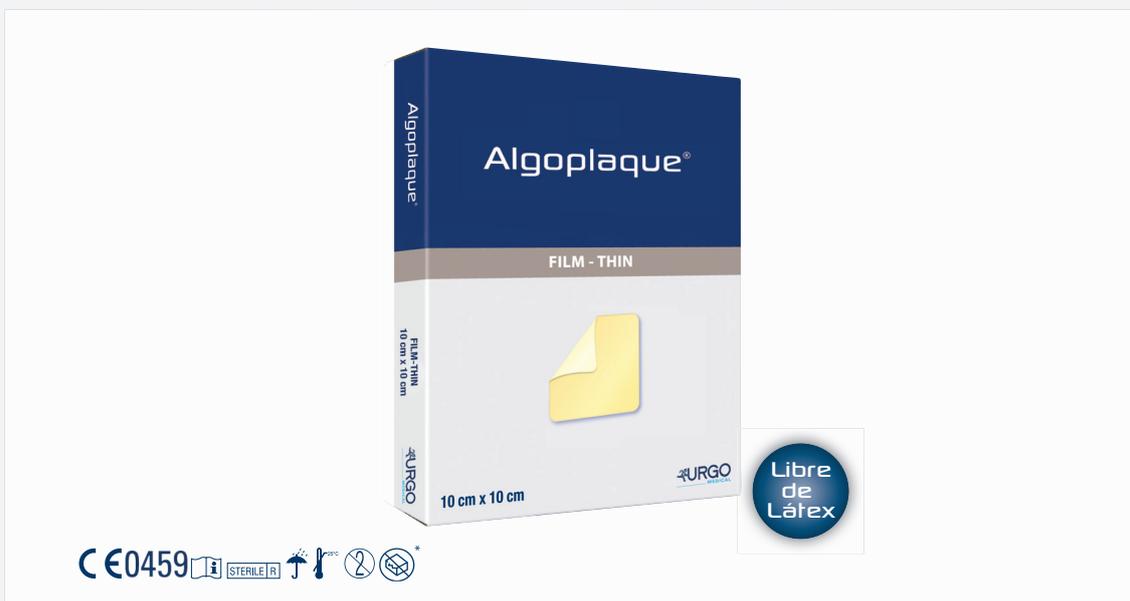

## APÓSITO HIDROCOLOIDE ESTÉRIL EXTRAFINO

**Indicaciones:** heridas con exudado leve y piel perilesional sana

- Cicatrización en ambiente húmedo
- Altamente flexible
- Transparente: permite observar la evolución de la herida
- Impermeable al agua y a las bacterias

## Algoplaque Film/Thin

Presentación en envase individual estéril almacenados por cajas, listo para usar.

Tamaño	U / C	Referencia
10 x 10 cm	16	502832
15 x 15 cm	10	505839
20 x 20 cm	5	505285

■ Financiado por Seguridad Social sólo en úlceras varicosas y por decúbito.

Tamaño	U / C	C.N.
10 x 10 cm	3	486985.9 ■
15 x 15 cm	3	486993.4 ■

FABRICADO EN FRANCIA POR LABORATOIRES URGO • 42 RUE DE LONGVIC • 21300 CHENÔVE • FRANCIA  
COMERCIALIZADO EN ESPAÑA POR LABORATORIOS URGO ESPAÑA • AVENIDA DIAGONAL N°568, 2ª PLANTA  
EDIFICIO L'ILLA DIAGONAL • 08029 BARCELONA • ESPAÑA  
www.urgomedical.es • Twitter: @urgomedical\_es

# Algoplaque Film/Thin



## DESCRIPCIÓN

### COMPOSICIÓN:

- **Algoplaque® Film/Thin** es un apósito hidrocólicoide estéril extrafino y semipermeable que se compone de:
  - Una capa, compuesta por partículas hidrocólicas (CarboxiMetilCelulosa, CMC) insertas en una red de elastómero.
  - Una capa externa compuesta por un soporte de poliuretano semipermeable, impermeable al agua y a las bacterias.

**MODO DE ESTERILIZACIÓN:** Radio-esterilización.

### LIBRE DE LÁTEX

## PROPIEDADES

- En contacto con la herida, **Algoplaque® Film/Thin** absorbe progresivamente el exudado y forma un gel húmedo que favorece el proceso de cicatrización regulando la humedad, la temperatura y el pH. El gel no-adherente evita daños en la herida cuando se retira el apósito.
- La gran flexibilidad y adaptación de **Algoplaque® Film/Thin** permiten su uso en todas las zona corporales (úlceras en la región del trocánter o del talón), evitando el desplazamiento debido a fricciones o en caso de incontinencia.
- **Algoplaque® Film/Thin** es transparente, lo que permite observar la evolución de la herida.
- **Algoplaque® Film/Thin** es permeable al aire e impermeable al agua y a las bacterias. Estas propiedades permiten bañarse y ducharse, garantizan la protección de la herida frente a contaminantes exteriores, y permiten los intercambios gaseosos, que favorecen el drenaje de los exudados.
- **Algoplaque® Film/Thin** no necesita un apósito secundario.

## INDICACIONES

- **Algoplaque® Film/Thin** está indicado en el tratamiento local de heridas superficiales con bajo exudado (úlceras y úlceras por presión superficiales, heridas traumáticas), heridas en fase de epitelización y heridas postoperatorias suturadas.

## MODO DE EMPLEO

### MODO DE EMPLEO

#### ■ Preparación de la herida:

- Limpiar la herida con suero fisiológico. En caso de uso de antiséptico previo, aclare cuidadosamente la herida con suero fisiológico.
- Secar la piel perilesional con cuidado con una compresa estéril.

#### ■ Aplicación del apósito:

- Elegir el tamaño de **Algoplaque® Film/Thin** adaptado para cubrir al mínimo 2 a 3 cm de piel perilesional sana.
- Retirar las aletas de protección y aplicar **Algoplaque® Film/Thin** sin estirar sobre la herida. Asegurarse de no tocar la parte adhesiva del apósito con los dedos.
- Adherir suavemente el apósito en la herida y más firmemente hacia la piel perilesional.

#### ■ Cambio de apósito:

La frecuencia de cambio del apósito **Algoplaque® Film/Thin** depende del tipo y de la fase de la herida:

- Es recomendable esperar que el apósito se desprenda parcialmente antes de retirarlo. Un retiro demasiado anticipado puede generar daños en la piel sana. No retirar el apósito antes de 48 horas.
- Para un retiro indoloro, remover al apósito de forma tangencial, posicionando el apósito paralelo a la herida.
- En el caso de tener una herida superficial poco exudativa, cambiar el apósito cada 4 a 6 días.
- Al retirar el apósito, el lecho de la herida puede verse cubierto de un film gelificado, que desaparecerá fácilmente aclarándolo.

### PRECAUCIONES

- El protector estéril debe estar intacto antes de usar. No usar si el envase tiene daños\*.
- El uso de **Algoplaque® Film/Thin** en úlceras venosas no exime usar terapia compresiva si ha sido prescrito.
- El uso de **Algoplaque® Film/Thin** en úlceras por presión no exime cuidados de enfermería apropiados.
- Envase individual para apósito de uso único: reutilizar un apósito de uso único puede generar riesgo de infección.
- No esterilizar nuevamente.
- Almacenar puesto en forma horizontal

### CONTRAINDICACIONES

- No usar en heridas infectadas.
- No usar en heridas muy exudativas.

**CONSULTAR LAS INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO ANTES DE USARLO.**

Producto clase IIa