

# UrgoClean

## Mecha



### MECHA CON FIBRAS POLIABSORBENTES Y SONDA ESTÉRIL



CE 0459     

### PARA HERIDAS CAVITADAS EXUDATIVAS CON DETRITUS / TEJIDO DESVITALIZADO

- Atrapa, retiene y elimina el detritus y las bacterias
- Absorbe el exudado verticalmente
- Favorece la coagulación
- Retirada en una sola pieza
- Retirada atraumática e indolora

## UrgoClean

### Mecha

Presentación en envase individual estéril almacenados por cajas, listo para usarse.

Tamaño	U/C	C.N.
2,5x40 Mecha	3	496026*
5x40 Mecha	5	161920


\*Formatos financiados por el SNS

FABRICADO EN FRANCIA POR LABORATOIRES URGO • 42 RUE DE LONGVIC • 21300 CHENÔVE • FRANCIA  
COMERCIALIZADO EN ESPAÑA POR LABORATORIOS URGO ESPAÑA • AVENIDA DIAGONAL N°569, 2ª PLANTA  
EDIFICIO L'ILLA DIAGONAL • 08029 BARCELONA • ESPAÑA

**URGO**  
MEDICAL  
Healing people®

# UrgoClean

## Mecha

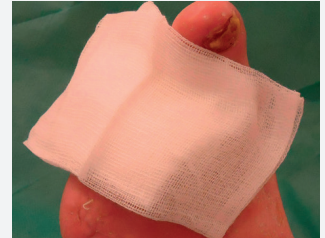

### DESCRIPCIÓN

- El apósito **UrgoClean Mecha** es un producto innovador de Laboratorios URGO, que se presenta bajo la forma de una compresa estéril sin tejer compuesta de fibras poliabsorbentes cohesivas y altamente absorbentes (poliacrilato).
- Esta innovación consiste en cruzar por termoconexión, en un plano paralelo a la herida, fibras de poliacrilato según una disposición estructural que confiere a **UrgoClean Mecha** sus propiedades específicas de absorción y de captación del detritus/tejido desvitalizado de la herida, así como su resistencia a la tracción.

### PROPIEDADES

- Esta innovación consiste en cruzar por termoconexión, en un plano paralelo a la herida, fibras de poliacrilato según una disposición estructural que confiere a **UrgoClean Mecha** sus propiedades específicas de absorción y de captación del detritus/tejido desvitalizado de la herida, así como su resistencia a la tracción.
- Absorción y drenaje del detritus y las bacterias para facilitar el desbridamiento y la limpieza de la herida.
- Absorción y drenaje del exudado seroso de heridas post-quirúrgicas.
- Manejo de leves sangrados.
- Retirada del apósito en una sola pieza debido a la resistencia a la tracción de las fibras poliabsorbentes.
- Retirada indolora y atraumática para la herida.

### INDICACIONES

- **UrgoClean Mecha** está indicado en las fases de desbridamiento y limpieza de las heridas exudativas cavitadas o sinusales, heridas crónicas (úlceras vasculares, úlceras por presión, úlceras de pie diabético incluido el malum perforans pedis), agudas (traumáticas), post-quirúrgicas y oncológicas.

### INSTRUCCIONES DE USO

#### Preparación de la herida:

- Limpiar la herida de acuerdo con el protocolo local, luego enjuagar con solución salina.
- Si se ha utilizado previamente un antiséptico, aclarar cuidadosamente con solución salina antes de aplicar **UrgoClean Mecha**.
- El uso de **UrgoClean Mecha** no elimina la necesidad de hacer un desbridamiento mecánico cuando se requiera.

#### Aplicación del apósito:

- Abrir el blister.
- Utilizar la sonda para medir la profundidad de la herida si fuese necesario.
- Insertar **UrgoClean Mecha** suavemente en la herida ejerciendo una mínima presión.
- **UrgoClean Mecha** puede ser cortado (en sentido transversal) usando tijeras estériles para adaptar si fuese necesario, la longitud de la mecha a la profundidad de la herida. En caso de heridas poco exudativas, puede ser necesario humidificar **UrgoClean Mecha** con solución salina antes de aplicar.

- Asegurarse que **UrgoClean Mecha** permanezca visible y sea fácil de retirar de la herida cavitada.
- Recubrir **UrgoClean Mecha** con un apósito secundario apropiado a la localización de la herida y al nivel de exudado.

#### Cambios de apósito:

- **UrgoClean Mecha** debe cambiarse cada 1 a 2 días durante las fases de desbridamiento y limpieza, luego con la frecuencia que se requiera en función del volumen de exudado y las condiciones clínicas de la herida. Eliminar las partes no utilizadas del apósito de acuerdo con los procedimientos locales.

#### Retirada del apósito:

- Asegurar que **UrgoClean Mecha** se ha retirado completamente de la herida.

#### PRECAUCIONES

- Debido a la naturaleza no oclusiva de este apósito, **UrgoClean Mecha** se puede utilizar en heridas infectadas bajo supervisión médica.
- En el transcurso del proceso de desbridamiento y limpieza, puede parecer que haya un agrandamiento de la herida. Esto es debido a la continua eliminación del detritus / tejido desvitalizado.
- Limitar los contactos de la sonda en la herida y no dejar la sonda dentro.
- Asegurarse que el protector estéril se encuentre intacto antes de usarse. No usar si el envase está dañado.
- No ingerir, mantener el producto fuera del alcance de los niños.
- No re-esterilizar ni la mecha ni la sonda.
- Envase individual estéril (radio-esterilizado), que incluye una sonda, de un solo uso. La reutilización de apósitos de un solo uso puede conducir a riesgos de infección.
- Envase individual estéril (radio-esterilizado), que incluye una sonda, de un solo uso. La reutilización de apósitos de un solo uso puede conducir a riesgos de infección.

#### CONTRAINDICACIONES

- Heridas fistulizadas con un diámetro inferior al diámetro de la sonda.
- Heridas secas.
- Como no es reabsorbible, **UrgoClean Mecha** no debe utilizarse como compresa quirúrgica.
- No utilizar **UrgoClean Mecha** en la zona endo-nasal en cirugía rino-sinusal.
- No utilizar **UrgoClean Mecha** en caso de sensibilidad conocida al apósito o a sus componentes.
- No utilizar como esponja quirúrgica en heridas altamente sangrantes.

#### CONSULTAR LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARSE.