

UrgoClean



APÓSITO MICROADHERENTE CON FIBRAS POLIABSORBENTES



CE 0459     

PARA HERIDAS EXUDATIVAS CON DETRITUS / TEJIDO DESVITALIZADO

- Atrapa, retiene y elimina el detritus y las bacterias
- Absorbe el exudado verticalmente
- Favorece la coagulación
- Retirada en una sola pieza
- Retirada atraumática e indolora

UrgoClean

Presentación en envase individual estéril almacenados por cajas, listo para usarse.

Tamaño	U/C	C.N.
10x10	3	496000*
15x15	3	496018*
10x10	10	161444
15x15	10	161445

*Formatos financiados por el SNS

 FABRICADO EN FRANCIA POR LABORATOIRES URGO • 42 RUE DE LONGVIC • 21300 CHENÔVE • FRANCIA
COMERCIALIZADO EN ESPAÑA POR LABORATORIOS URGO ESPAÑA • AVENIDA DIAGONAL N°569, 2ª PLANTA
EDIFICIO L'ILLA DIAGONAL • 08029 BARCELONA • ESPAÑA

**URGO**
MEDICAL
Healing people®



DESCRIPCIÓN

- El apósito **UrgoClean** es un producto innovador de Laboratorios URGO, que se presenta bajo la forma de una compresa estéril sin tejer compuesta de fibras poliabsorbentes cohesivas y altamente absorbentes (poliacrilato).
- Esta innovación consiste en cruzar por termoconexión, en un plano paralelo a la herida, fibras de poliacrilato según una disposición estructural que confiere a **UrgoClean** sus propiedades específicas de absorción y de captación del detritus/tejido desvitalizado de la herida, así como su resistencia a la tracción.
- El apósito poliabsorbente está recubierto de una trama micro-adherente de TLC (Tecnología Lípido-Coloide), que gelifica, facilitando de esta manera el drenaje del detritus/tejido desvitalizado, así como la colocación y la retirada del apósito.

PROPIEDADES

- En contacto con el exudado de la herida, las partículas lípido-coloides proporcionadas por la matriz TLC gelifican, creando un ambiente húmedo favorable para el desbridamiento de la herida.
- Al mismo tiempo, las fibras poliabsorbentes de poliacrilato gelifican y se unen con alta afinidad al tejido desvitalizado / detritus y lo retienen, facilitando así su eliminación.
- La fijación y el drenaje de los residuos por la estructura poliabsorbente combinada con la matriz TLC, por lo tanto, promueve el desbridamiento y la limpieza de heridas exudativas con detritus / tejido desvitalizado.
- Como resultado de este mecanismo de acción, el apósito presenta algunas propiedades específicas:
 - Absorción del exudado, gelificación y drenaje del tejido desvitalizado / detritus durante las fases de desbridamiento y limpieza del lecho.
 - Absorción y captación de las bacterias por la estructura de las fibras poliabsorbentes de poliacrilato.
 - Mantenimiento de un ambiente húmedo en contacto con la herida, favoreciendo la cicatrización de las zonas limpias.
 - Manejo de leves sangrados.
 - Retirada del apósito en una sola pieza gracias a la resistencia a la tracción de las fibras poliabsorbentes.
 - Retirada indolora, atraumática para la herida y protección de la piel perilesional gracias a la matriz TLC micro-adherente.

INDICACIONES

- **UrgoClean** está indicado en las fases de desbridamiento y limpieza de las heridas crónicas exudativas (úlceras vasculares, úlceras por presión, úlceras del pie diabético) y las heridas con tendencia a formar tejido desvitalizado: heridas agudas (quemaduras, dermoabrasiones, heridas traumáticas), heridas post-quirúrgicas, heridas oncológicas.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la herida:

- Limpiar la herida de acuerdo con el protocolo local, luego enjuagar con solución salina.
- Si se ha utilizado previamente un antiséptico, aclarar cuidadosamente con solución salina antes de aplicar **UrgoClean**.
- El uso de **UrgoClean** no elimina la necesidad de hacer un desbridamiento mecánico cuando se requiera.

Aplicación del apósito:

- Retirar las lengüetas protectoras.
- **UrgoClean** se puede recortar usando tijeras estériles para adaptar el tamaño del apósito a la herida, en caso necesario.
- Aplicar el lado micro-adherente de **UrgoClean** a la herida y a sus contornos.
- Recubrir con un apósito secundario apropiado a la localización de la herida y al nivel de exudado.

Cambios de apósito:

- Los apósitos **UrgoClean** deben cambiarse cada 1 a 2 días durante las fases de desbridamiento y limpieza, luego con la frecuencia que se requiera (hasta 7 días) en función del volumen de exudado y las condiciones clínicas de la herida. Eliminar las partes no utilizadas del apósito de acuerdo con los procedimientos locales.

PRECAUCIONES

- La matriz micro-adherente de TLC de **UrgoClean** se adhiere a los guantes de látex. Por lo tanto, se recomienda que el apósito se maneje cuidadosamente, evitando cualquier contacto con el lado micro-adherente o bien utilizando pinzas estériles.
- El uso concomitante de una crema, loción, ungüento o emulsión no está recomendado.
- Debido a la naturaleza no oclusiva de este apósito, **UrgoClean** se puede utilizar en heridas infectadas bajo supervisión médica.
- En el transcurso del proceso de desbridamiento y limpieza, puede parecer que haya un agrandamiento de la herida. Esto es debido a la eliminación eficaz del detritus / tejido desvitalizado.
- Asegurarse que el protector estéril se encuentre intacto antes de usarse. No usar si el envase está dañado.
- Envase individual estéril (radio-esterilizado) de un solo uso: la reutilización de apósitos de un solo uso puede conducir a riesgos de infección.
- No re-esterilizar el apósito.
- Mantener **UrgoClean** alejado de la luz, humedad y calor (por debajo de 25°C).

CONTRAINDICACIONES

- Sensibilidad conocida al apósito o sus componentes.
- No utilizar **UrgoClean** como esponja quirúrgica en heridas altamente sangrantes.

CONSULTAR LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARSE.