

UrgoSorb



APÓSITO ABSORBENTE CON ALGINATO / HIDROCOLOIDE

Indicaciones: tratamiento local de heridas con exudación moderada a alta

- Alto grado de absorción de los exudados
- Favorece el desbridamiento y la cicatrización
- Retirada de una sola pieza
- Propiedades hemostáticas

UrgoSorb

Presentación en envase individual estéril almacenados por cajas, listo para usar.



Tamaño	U / C	Referencia
10 x 10 cm	16	508223
10 x 20 cm	16	501670

■ Formatos financiados por la Seguridad Social

Tamaño	U / C	C.N.
10 x 10 cm	3	496000.6 ■
10 x 20 cm	3	496018.1 ■
Mechas 2.2 x 30 cm	3	496026.6

FABRICADO EN FRANCIA POR LABORATOIRES URGO • 42 RUE DE LONGVIC • 21300 CHENÔVE • FRANCIA
COMERCIALIZADO EN ESPAÑA POR LABORATORIOS URGO ESPAÑA • AVENIDA DIAGONAL N°569, 2ª PLANTA
EDIFICIO L'ILLA DIAGONAL • 08029 BARCELONA • ESPAÑA
www.urgomedical.es • Twitter: @urgomedical_es

UrgoSorb

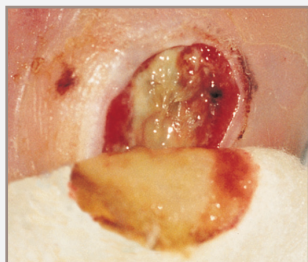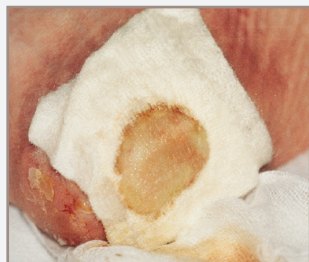

DESCRIPCIÓN

- **UrgoSorb** es un apósito estéril compuesto de fibras de alginato de calcio y partículas hidrocoloides (carboximetilcelulosa sódica), polímeros naturales conocidos por su alto grado de absorción.

PROPIEDADES

- **UrgoSorb** es un apósito que favorece la cicatrización por gelificación de sus componentes en contacto con los exudados de la herida.
- **UrgoSorb** permite un cambio indoloro del apósito, se renueva fácilmente y de una sola pieza, incluso húmedo.

INDICACIONES

CICATRIZACIÓN DE HERIDAS:

- **UrgoSorb** es un apósito indicado para el tratamiento local de heridas con exudación moderada a alta, especialmente para heridas fibrinosas o granulativas:
 - Heridas post-quirúrgicas (muñones de amputación, heridas cavitadas, etc.)
 - Heridas crónicas (úlceras por presión, úlceras de pierna, etc.).
- **UrgoSorb** puede ser utilizado en heridas con signos clínicos de infección bajo rigurosa supervisión médica.
- **UrgoSorb** también está indicado para heridas con exudación

moderada a alta.

- **UrgoSorb mecha** está indicado para el manejo local de heridas cavitadas (úlceras por presión profundas, sinus pilonidales) con exudación moderada a alta.

HEMOSTASIS:

- Por activación plaquetaria, **UrgoSorb** es un apósito que favorece la hemostasis primaria y puede controlar sangrados menores en heridas agudas y crónicas superficiales, gracias a las propiedades hemostáticas naturales del alginato de calcio.
- **UrgoSorb mecha** está indicado para el tratamiento local de heridas cavitadas con sangrado menor.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la herida:

- Limpiar la herida con suero fisiológico. En caso de uso previo de antibióticos, corticoides o soluciones alcalinas, aclare cuidadosamente la herida con suero fisiológico antes de aplicar **UrgoSorb**.
- Secar la piel perilesional con cuidado con una compresa estéril.

Aplicación del apósito:

- Aplicar **UrgoSorb** directamente en el lecho de la herida.
- Tratándose de una úlcera de pierna, puede humedecerse la compresa con suero fisiológico.
- En el caso que sea necesario, mantener **UrgoSorb** en su lugar con un apósito secundario y asegurarlo con un vendaje de fijación.
- Tratándose de úlceras en la zona sacra e incontinencia, cubrir la herida con un apósito secundario adhesivo para proteger la herida y evitar contaminación.
- Desechar las partes no utilizadas del apósito siguiendo los procedimientos locales.

Cambio de apósito:

El apósito **UrgoSorb** debe cambiarse cuando se sature. La frecuencia del cambio del apósito debe ser:

- Diaria en caso de desbridamiento de residuos de fibrina necrótica, heridas con exudación alta o heridas infectadas.
- Cada 2 días para heridas con exudación moderada.

Retirada del apósito:

- Renovar el apósito secundario y luego el apósito **UrgoSorb**.
- Si el apósito **UrgoSorb** se adhiere a la herida, puede humedecerlo con suero fisiológico para facilitar su retirada.
- Aplicar un nuevo apósito **UrgoSorb** de la forma antes descrita.

Uso de UrgoSorb mecha:

- Para heridas cavitadas y heridas profundas (sinus), aplicar **UrgoSorb mecha** de forma ligera, sin ejercer excesiva presión.
- Al formarse el gel, **UrgoSorb mecha** se adapta a las paredes de la cavidad.
- **UrgoSorb mecha** se renueva con facilidad en una sola pieza. Asegurarse que se haya renovado por completo **UrgoSorb mecha** de la herida.
- Si es necesario, aplicar un apósito secundario de la misma forma que se aplica la compresa **UrgoSorb**.

PRECAUCIONES

- **UrgoSorb** no es reabsorbible. Así pues, no debe utilizarse como compresa quirúrgica implantable.
- **UrgoSorb** no debe utilizarse en heridas de baja exudación o en quemaduras de tercer grado.
- El protector estéril debe estar intacto antes de usar. No usar si el protector estéril tiene daños*.
- No usar los apósitos **UrgoSorb** con soluciones alcalinas. En caso de uso antiséptico previo aclare cuidadosamente la herida con suero fisiológico.
- Envase individual para apósito de uso único: reutilizar un apósito de uso único puede generar riesgo de infección.
- No esterilizar nuevamente.

CONTRAINDICACIONES

- Empaquetamiento endonasal con gasa en cirugía rinosinusal.
- Tejidos necróticos secos o escaras y quemaduras profundas.

CONSULTAR LAS INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO ANTES DE USARLO.