

## DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

### CPK Compress

#### Venda de compresión fuerte y tracción corta

Clasificación (RD1591/2009): Clase I

Nº Organismo notificador CE: -

Fabricante: FARMABAN s.a.



| CÓDIGO | MEDIDAS     | CODIGO EAN 13    | UNIDAD DE VENTA |
|--------|-------------|------------------|-----------------|
| 22200  | 6 cm x 5 m  | 8 4280 1202200 1 | 1               |
| 22201  | 8 cm x 5 m  | 8 4280 1202201 8 | 1               |
| 22202  | 10 cm x 5 m | 8 4280 1202202 5 | 1               |

### 1. COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

La unidad de CPK Compress está constituida por:

- Tejido de algodón 100%.
- Grapas de fijación de color carne con centro de goma (73% poliéster-27% elastodieno (látex)) y enganches metálicos de aluminio.

## 2. ENVASADO

### 2.1 Envase unitario

- Bolsa de polipropileno.
- Estuche de celulosa.

### 2.2 Envase presentación o de venta

- Caja de cartón corrugado.

## 3. DESCRIPCIÓN

CPK Compress es una venda de tejido elástico de compresión fuerte y tracción corta (extensibilidad mínima del 90%) enrollada sobre sí misma con 2 grapas de fijación.

## 4. PROPIEDADES

Una vez aplicada la venda CPK Compress ejerce considerable presión sobre la extremidad asegurando la compresión del sistema venoso profundo cuando el paciente está en movimiento. Puede mantenerse puesta de forma continua durante un periodo de hasta 7 días.

CPK Compress presenta un tejido absorbente, resistente a las pomadas y permeable a los rayos X y al aire, por lo que es particularmente agradable a la piel. La estructura del tejido evita el deslizamiento de la venda.

CPK Compress puede lavarse, separadamente, a 40°C con un detergente suave.

La venda CPK Compress puede esterilizarse mediante vapor sin el envase original. La esterilización puede afectar a las características del producto (color, tacto y parámetros físicos) aunque no a la seguridad y efectividad del mismo.

## **5. INDICACIONES**

CPK Compress está indicada para la inmovilización de partes del cuerpo, fijación de apósitos y vendajes de compresión. También están indicadas para vendajes de sostén y descarga en traumatología y medicina deportiva.

## **6. CONTRAINDICACIONES**

Enfermedad de oclusión arterial periférica, insuficiencia cardíaca descompensada, flebitis séptica, flegmasía cerulea dolens.

## **7. PRECAUCIONES**

Aplicar sobre piel sana e intacta.

No aplicar con demasiada tensión.

El centro de goma de las grapas de fijación contiene látex.

Utilizar siempre bajo la supervisión de profesionales de la medicina.

## **8. CADUCIDAD**

5 años almacenado en lugar fresco (entre 5 °C y 30 °C) y seco en su envase original.