

## DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

### ***CURATEST F***

#### **Tiras para test epicutáneo**

**Clasificación (RD1591/2009):** Clase I

**Nº Organismo notificador CE:** -

**Fabricante:** Lohmann & Rauscher  
International GmbH & Co. KG



<b>CÓDIGO</b>	<b>MEDIDAS</b>	<b>CODIGO EAN 13</b>	<b>UNIDAD DE VENTA</b>
<b>30062</b>	7,5 x 12,5 cm	40 21447 30062 7	50

#### **1. COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO**

La unidad de CURATEST F está constituida por:

- Film de poliuretano recubierto con una masa adhesiva de poliacrilato libre de colofonia o derivados (libre de látex).
- Discos de test de polietileno, viscosa.
- Anillos de poliéster.
- Film de soporte de poliéster recubierto en ambas caras con polietileno y siliconado en un lado.
- Papel protector siliconado.

## **2. ENVASADO**

### 2.1 Envase unitario

- No procede.

### 2.2 Envase presentación o de venta

- Estuche de cartón.
- Instrucciones de utilización.

## **3. DESCRIPCIÓN**

Curatest F es una tira rectangular transparente, elástica, transpirable con 10 discos colocados en dos líneas paralelas de 5, protegidas con papel siliconado dispuestas para facilitar la apertura.

## **4. PROPIEDADES**

Curatest F consiste en un film de poliuretano recubierto con un adhesivo afín a la piel libre de látex y libre de colofonia y derivados. En la cara adhesiva se disponen los discos de test de viscosa recubiertos por un lado con polietileno. Los discos se adhieren al film adhesivo por la cara del polietileno y sus bordes están recubiertos con un anillo transparente de film de poliéster.

Las tiras se presentan con un film de soporte de poliéster recubierto en ambos lados con polietileno y en un lado con silicona. El lado adhesivo se protege con papel siliconado blanco superpuesto en el centro. El film de soporte se adhiere al papel protector mediante una cinta adhesiva transparente de film de poliéster/adhesivo de poliacrilato.

## **5. INDICACIONES**

Curatest F ha sido diseñado y preparado para pruebas epicutáneas estándares. Permiten probar simultáneamente 10 sustancias (o múltiples de 10 utilizando varias tiras).

## **6. CONTRAINDICACIONES**

No procede.

## **7. PRECAUCIONES**

No procede.

## **8. CADUCIDAD**

5 años almacenado en lugar fresco (<25 °C) y seco.