

## DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

### **DAUERBINDE F**

#### Venda elástica de tracción larga

Clasificación (RD1591/2009): Clase I

Nº Organismo notificador CE: -

Fabricante: Lohmann & Rauscher  
International GmbH & Co. KG



CÓDIGO	MEDIDAS	CODIGO EAN 13	UNIDAD DE VENTA
22010	6 cm x 7 m (tensión)	40 21447 22010 9	1
22011	8 cm x 7 m (tensión)	40 21447 22011 6	1
22012	10 cm x 7 m (tensión)	40 21447 22012 3	1
22013	12 cm x 7 m (tensión)	40 21447 22013 0	1

## 1. COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

La unidad de DAUERBINDE F está constituida por:

- Tejido elástico de algodón, poliamida y elastano (poliuretano).
- Clip de aluminio con cinta elástica 73% elastodieno y 27% poliéster.

## 2. ENVASADO

### 2.1 Envase unitario

- estuche de celulosa con instrucciones de uso.

## 2.2 Envase presentación o de venta

- estuche de celulosa con instrucciones de uso.

## 3. DESCRIPCIÓN

Tejido elástico color carne, con textura fina, bordes cosidos y extremos tratados para evitar que se deshilachen.

## 4. PROPIEDADES

Daurbinde F es una venda de tracción larga/compresión fuerte con una extensibilidad aproximada de 170 %. Gracias a su calidad de tracción larga permite variar y controlar el nivel de compresión requerido para cada paciente. Su elevada elasticidad permite una aplicación libre de pliegues en partes expuestas como los talones. De fácil aplicación la venda se adapta bien a los contornos del cuerpo, es conformable, cómoda, resistente y fácilmente lavable.

La venda puede ser esterilizada mediante vapor de acuerdo con la normativa EN 554.

## 5. INDICACIONES

Dauerbinde F está indicada para la inmovilización, fijación de apósitos y compresión. Para la terapia de compresión en medicina vascular y para apoyo y descarga en lesiones del sistema locomotor en traumatología.

## 6. CONTRAINDICACIONES

No procede.

## 7. PRECAUCIONES

No cortar la venda.

Debido a la fuerte compresión que ejerce la venda cuando el paciente está en reposo, es necesario retirar el vendaje por la noche o cuando el paciente descanse.

La venda puede lavarse hasta 10 veces a 40°C usando un detergente suave. Puede secarse en la secadora pero no debería lavarse en seco o blanquearse con cloro.

#### **8. CADUCIDAD**

5 años almacenado en lugar fresco (<25 °C) y seco.