

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

ROSIDAL K

Venda de compresión fuerte y tracción corta

Clasificación (RD1591/2009): Clase I

Nº Organismo notificador CE: -

Fabricante: Lohmann & Rauscher
International GmbH & Co. KG



CÓDIGO	MEDIDAS	CODIGO EAN 13	UNIDAD DE VENTA
22199	4 cm x 5 m	40 21447 27443 0	1
22203	12 cm x 5 m	40 21447 22203 5	1
22206	10 cm x 10 m	40 21447 27447 8	1

1. COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

La unidad de ROSIDAL K está constituida por:

- ❑ Tejido de algodón 100%.
- ❑ Grapas de fijación de color carne con centro de elastodieno (caucho natural) recubierto con hilo de viscosa y enganches metálicos de aluminio puro (excepto REF 22206).
- ❑ Etiqueta de transferencia de adhesivo de poliuretano y poliamida, papel impregnado con cera y varias capas de barnices y pinturas.

2. ENVASADO

2.1 Envase unitario

- Estuche de celulosa con instrucciones de uso.

2.2 Envase presentación o de venta

- Caja de cartón corrugado.

3. DESCRIPCIÓN

Rosidal K es una venda de tejido elástico de compresión fuerte y tracción corta (extensibilidad mínima del 90%) enrollada sobre sí misma con 2 grapas de fijación.

4. PROPIEDADES

Una vez aplicada la venda Rosidal K ejerce presión sobre la extremidad asegurando la compresión del sistema venoso profundo cuando el paciente está en movimiento.

El tejido que compone Rosidal K es transpirable y de tacto muy agradable a la piel.

La estructura del tejido evita el deslizamiento de la venda.

La venda Rosidal K puede esterilizarse mediante vapor de acuerdo con la normativa DIN EN ISO 17665-1.

Para mantener la venda en buenas condiciones durante mucho tiempo, deben tenerse en cuenta las siguientes indicaciones para el cuidado:

- Una vez retirada, enrollarse sin tensionar.
- Lavar frecuentemente (cada 2-4 días) pero sin retorcer ni estirar.
- Lavar con agua templada (40°C) con un detergente suave. En caso de necesidad pueden lavarse a 95°C hasta un máximo de 15 veces sin perder color o estabilidad, pero siempre con un detergente suave.
- Secar plana.

- No exponer a fuentes de calor, mantener fuera de la luz directa del sol.

5. INDICACIONES

Rosidal K está indicada para vendajes de compresión en indicaciones flebológicas y linfológicas, por ejemplo, varicosis, insuficiencia de venas principales, tromboflebitis, flebotrombosis, síndrome postrombótico, insuficiencia venosa crónica de estadios I a III, en edemas (lipoedema, edema flebítico, linfático, postraumático o posoperatorio, durante el embarazo), después de esclerosis e intervenciones quirúrgicas venosas.

También están indicadas para vendajes de sostén y descarga en traumatología y medicina deportiva. Para la profilaxis y terapia de contusiones, distorsiones, lesiones de ligamentos y luxaciones.

6. CONTRAINDICACIONES

Enfermedad de oclusión arterial periférica, insuficiencia cardíaca descompensada, flebitis séptica, flegmasía cerulea dolens.

7. PRECAUCIONES

Aplicar sobre piel sana e intacta.

No aplicar con demasiada tensión.

El centro de goma de las grapas de fijación contiene látex, aunque recubierto con hilo de viscosa.

Utilizar siempre bajo la supervisión de profesionales de la medicina.

8. CADUCIDAD

5 años almacenado en lugar fresco (<25 °C) y seco en su envase original.