

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

SUPRASORB F

Apósito adhesivo transparente

Clasificación (RD1591/2009): Clase IIa

Nº Organismo notificador CE: 0123

Fabricante: Lohmann & Rauscher
International GmbH & Co. KG



CÓDIGO	MEDIDAS	CODIGO EAN 13	UNIDAD DE VENTA
20460	5 cm x 7 cm	40 21447 20460 4	10
20461	5 cm x 7 cm	40 21447 20461 1	100
20462	10 cm x 12 cm	40 21447 20462 8	10
20463	10 cm x 12 cm	40 21447 20463 5	50
20464	10 cm x 25 cm	40 21447 20464 2	10
20465	15 cm x 20 cm	40 21447 20465 9	10
20466	20 cm x 30 cm	40 21447 20466 6	10

1. COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

La unidad de Suprasorb F 20460 - 20464 está constituida por:

- Film de poliuretano recubierto con un adhesivo de poliacrilato (libre de colofonia y derivados de colofonia, libre de látex).

- ❑ Film de soporte de poliéster recubierto con polietileno en ambos lados y siliconado en uno de ellos.
- ❑ Papel protector siliconado.

La cara adhesiva está recubierta con dos papeles siliconados blancos solapados en el centro. El film de soporte está pegado junto con los dos papeles protectores mediante un esparadrapo transparente de film de poliéster/adhesivo de poliacrilato.

La unidad de Suprasorb F 20465 - 20466 está constituida por:

- ❑ Film de poliuretano.
- ❑ Adhesivo libre de derivados de colofonia.
- ❑ Papel protector de celulosa recubierto con polietileno en ambos lados y siliconado en uno de ellos.

2. ENVASADO

2.1 Envase unitario

- ❑ Bolsa constituida por lámina de celulosa-polietileno.

2.2 Envase presentación o de venta

- ❑ Estuche de celulosa con instrucciones de uso.

3. DESCRIPCIÓN

Los apósitos transparentes 20460-20464 consisten en un film recubierto con adhesivo, un film de soporte y un papel protector. Las medidas de 5 x 7cm y 10 x 12cm presentan esquinas curvadas.

Los apósitos transparentes 20465 y 20466 presentan un papel protector blanco en la cara frontal mientras que la cara dorsal consiste en un film semitransparente en cuyo centro presenta una cinta roja con precorte ondulado que facilita la abertura y aplicación del apósito.

4. PROPIEDADES

El apósito Suprasorb F presenta un film de poliuretano altamente adaptable y elástico impermeable a las bacterias pero permeable al vapor de agua.

Es transparente, transpirable, impermeable al agua y antiestático. Adhesivo agradable a la piel, libre de: látex, colofonia y derivados de colofonia.

Esterilizado mediante óxido de etileno.

5. INDICACIONES

Suprasorb F está indicado para la cura de heridas superficiales de secreción leve. Puede proteger nuevos tejidos epiteliales y también puede ser utilizado como apósito secundario en heridas postoperatorias o para la retención de cánulas, catéteres de infusión o tubos de drenaje.

6. CONTRAINDICACIONES

No debe utilizarse en heridas infectadas, profundas o con secreción intensa.

7. PRECAUCIONES

Un solo uso.

Estéril siempre cuando las condiciones del envase sean correctas (no esté dañado o abierto).

No debe utilizarse en caso de intolerancia conocida o de alergia a uno o varios de sus componentes.

8. CADUCIDAD

5 años almacenado en lugar fresco (<25 °C) y seco.