



## Venda bi-elástica de gel de zinc

Vendas de gel de óxido de zinc impregnadas, de rápido secado y listas para colocar.

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Proporciona una presión extremadamente baja en reposo y una presión muy alta en movimiento
- Ofrece una gran resistencia al músculo
- Elástico longitudinal y transversalmente, sin acción recuperadora
- Conformable. Aplicable incluso en zonas contorneadas del cuerpo sin que se formen bolsas ni estrangulaciones
- Fácil de aplicar. Vendaje aplicable sin necesidad de cortar ni entallar
- Lista para usar
- Secado rápido y limpio moldeado
- Semirrígido
- Muy resistente al deterioro
- No contiene látex ni derivados

### MODO DE ACCIÓN

Gelostretch combina las ventajas prácticas de la elasticidad bidimensional y su moderna modalidad de material, con el aprovechamiento terapéutico de una venda clásica de adhesivo de zinc.

La venda al secarse tiene una presión de reposo extremadamente baja. Durante el movimiento, la inelasticidad del material contrapone a la musculatura una gran resistencia produciendo de esta forma una máxima presión de trabajo, con lo que se facilita el retorno de la circulación. Las piernas hinchadas se descongestionan eficazmente e incluso edemas resistentes desaparecen rápidamente.

### COMPOSICIÓN

Material de soporte: 76% viscosa, 24% algodón.

Masa: óxido de zinc, agua, gelatinante, glicerina sobre una base de celulosa.

### INDICACIONES

Para vendajes de compresión semirrígidos en indicaciones flebológicas, por ejemplo: insuficiencia venosa crónica, inclusive Ulcus cruris en fase de curación y flebedemas, tromboflebitis, flebotrombosis.

Para vendajes de apoyo y alivio en patología teudiligamentosa: contusiones, torceduras, luxaciones, dislocaciones, tendovaginitis, tratamiento tras la retirada del enyesado, prevención, reducción y absorción de edemas postraumáticos.

### PRESENTACIÓN

Código de producto	Medidas	Unidad mínima de venta	Unidades / envase	Código EAN-13
45296-00	7 m x 10 cm	10 unidades	10-40	8428383151782

Certificación	Contiene látex	Esterilidad	Conservación	Fabricante
<p>Clase CE</p> <p>BSN medical SLU ISO 9001:2008</p> 			 3 años  	 25°C   BSN Medical GmbH Quickbornstrasse 24 20253 Hamburg  <b>Distribuidor</b> BSN medical SLU

Leyenda símbolos



No contiene látex en formulación



Caducidad



Manténgase en lugar seco



Fabricante



Producto no esterilizado



Temperatura de almacenamiento



No exponer el producto a la radiación solar

**BSN medical SLU**

Avda Baix Llobregat 3-5, Edificio Bayer, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel. Atención cliente: 93.521.01.20 Fax. Atención cliente: 93.521.02.10

B62495882

[www.bsnmedical.com.es](http://www.bsnmedical.com.es)