

Mepilex® Border Sacrum Ag

APÓSITO ANTIMICROBIANO DE ESPUMA ABSORBENTE CON TECNOLOGÍA SAFETAC, PARA EL SACRO


- Minimiza el dolor y el traumatismo en los cambios de apósito^{1,2,3}
- Efecto antimicrobiano rápido y sostenido⁵
- Manejo del exudado muy efectivo
- Fijación segura y retirada atraumática

Film posterior de poliuretano

- Permeable a gases.
- Impermeable a líquidos.
- Barrera de virus y bacterias*.

Liberación rápida y sostenida de los iones plata

- Actividad antimicrobiana en 30 minutos y hasta 7 días.⁵

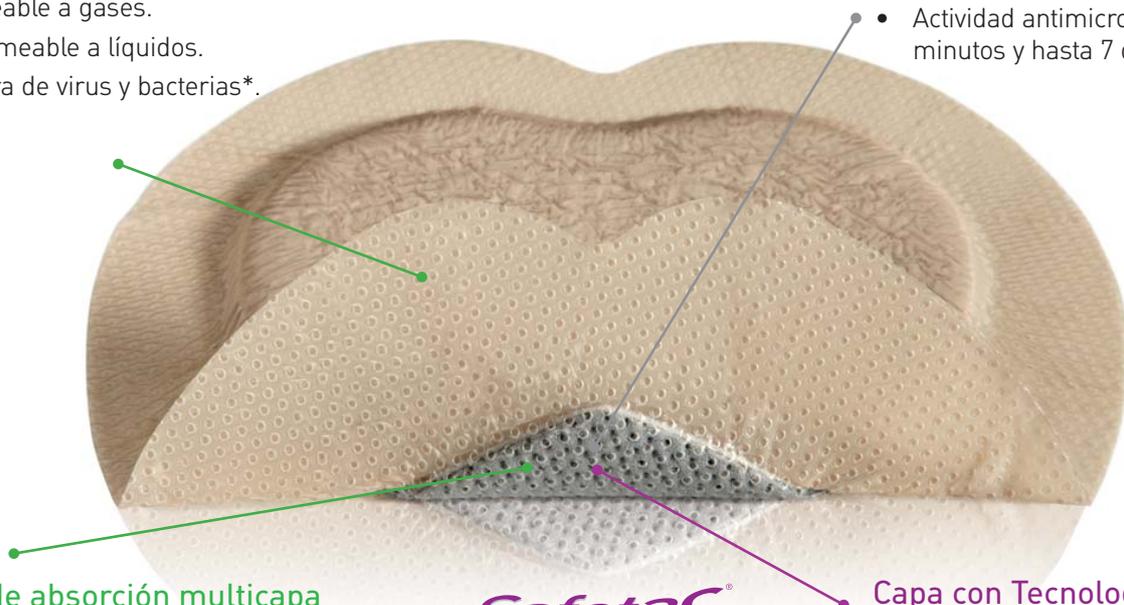

Cuerpo de absorción multicapa

- Espuma comprimida con plata, que absorbe y distribuye el exudado.
- Capa de fibras superabsorbentes para una máxima retención del exudado:
 - fibras poliacrílicas
 - fibras de algodón
 - fibras de poliéster/ polietileno/polipropileno
- Capa de tela de tejido sin tejer.

Safetac®
TECHNOLOGY

Capa con Tecnología Safetac®

- Minimiza el dolor y el traumatismo antes, durante y después de la retirada del apósito.¹
- No se adhiere al lecho húmedo de la herida, sí a la piel seca.³
- Sella los márgenes de la herida y minimiza el riesgo de maceración.⁴


Tecnología Safetac®

*Microbios mayores de 25 nm


Safetac® Menos trauma. Menos dolor.™

La Tecnología Safetac® es una tecnología exclusiva y patentada. Los apósitos con Tecnología Safetac® son atraumáticos incluso durante su retirada. Estos apósitos minimizan el traumatismo en la herida y la piel perilesional, lo que minimiza el dolor en el paciente. El riesgo de maceración se minimiza al sellar herméticamente los bordes de la herida.

Para más información visite www.molnlycke.es

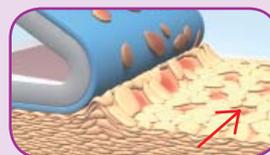


Desprendimiento de la piel con adhesivos convencionales

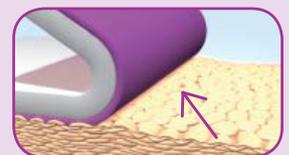


Sin desprendimiento de piel con la Tecnología Safetac

Modo de utilización Mepilex® Border Sacrum Ag

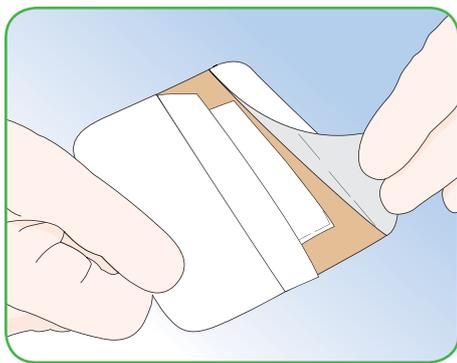

Limpiar la herida y retirar el papel protector

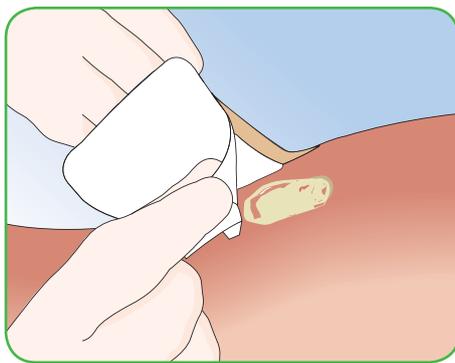

Aplicar la cara adherente sobre la herida.
No estirar

Cómo funciona Mepilex Border Sacrum Ag

Mepilex® Border Sacrum Ag es un apósito antimicrobiano todo en uno que absorbe y gestiona el exudado de forma efectiva y mantiene el ambiente húmedo de la herida. La capa con Tecnología Safetac® sella los bordes de la herida, minimizando así el riesgo de maceración. La capa con Tecnología Safetac® asegura que el apósito pueda cambiarse sin dañar la herida ni la piel perilesional.

Mepilex® Border Sacrum Ag inactiva los agentes patógenos presentes en la herida en los primeros 30 minutos y tiene un efecto sostenido de hasta 7 días. Al reducir el número de microorganismos, Mepilex® Border Sacrum Ag también reduce el olor de la herida infectada.

Beneficios de Mepilex Border Sacrum Ag

- Minimiza el dolor y el traumatismo en el cambio de apósito.
- Auto-adherente: no necesita una fijación secundaria.
- Impermeable.
- Puede usarse bajo vendaje compresivo.
- Muy cómodo para el paciente.
- Puede permanecer en su sitio durante varios días dependiendo de las condiciones de la herida.
- Se puede levantar y ajustar sin perder sus propiedades adherentes.
- Hipoalergénico.

Indicaciones

Mepilex® Border Sacrum Ag está diseñado para el tratamiento de heridas con un nivel de exudado medio-alto, en las que está indicado un ambiente de cura húmeda, una gestión eficaz del exudado y una acción antimicrobiana; tales como úlceras vasculares, úlceras por presión, lesiones malignas, quemaduras, heridas traumáticas y quirúrgicas.

Precauciones

Para información más detallada ver el prospecto.



MEPILEX® BORDER SACRUM AG

nº Ref.	Tamaño cm	Uds/env.	Uds/transp.
382000	18 x 18	5	40
382400	23 x 23	5	25

Sobres estériles