

Mepilex® Border

Apósito multicapa, auto-adherente con Safetac®

Film posterior de poliuretano

- Permeable a gases
- Impermeable a líquidos
- Barrera efectiva contra virus y bacterias*



Cuerpo de absorción de 3 capas

- Capa de poliuretano hidrofílico que absorbe rápidamente el exudado
- Capa de fibras super absorbentes para una máxima retención del exudado
- Capa de tejido Nonwoven para optimizar la capacidad de absorción y prevenir la maceración

Safetac
TECHNOLOGY

Capa con Safetac®^{1,3,4}

- Atraumático para la herida y la piel perilesional
- Minimiza el riesgo de maceración
- No se adhiere al lecho húmedo de la herida


* Microbios mayores de 25 nm

- Atraumático para la herida y para la piel circundante durante la retirada
- Control y retención efectiva del exudado minimizando el riesgo de maceración
- Bajo riesgo de irritación y alergias en la piel gracias a la capa con Safetac®


Mepilex® Border


Mölnlycke®

Forma de utilización

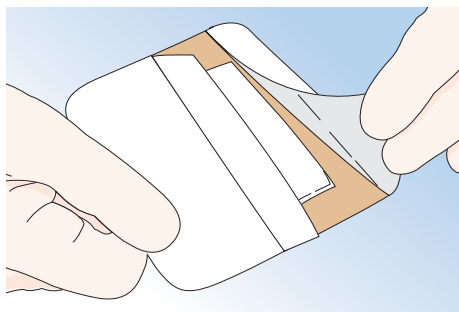

1. Limpiar la zona de la lesión y secar la piel perilesional. Quitar el papel protector.

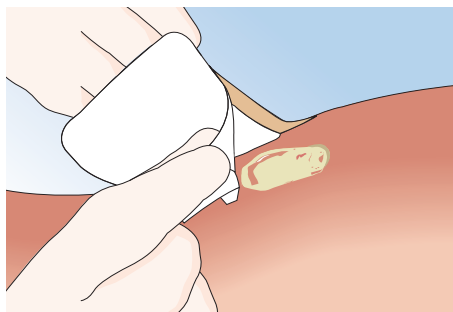

2. Colocar la cara adherente sobre la herida. No estirar.

Cómo funciona Mepilex® Border

El apósito autoadhesivo Mepilex® Border absorbe de forma efectiva el exudado y minimiza el riesgo de maceración. El apósito mantiene el nivel de humedad en la herida para una óptima cicatrización. Las propiedades de la capa con Safetac® permiten un cambio de apósito indoloro para el paciente, y sin trauma para la herida y el tejido perilesional.

Beneficios

- Autoadhesivo
- No se adhiere al lecho húmedo de la herida, sin embargo se adhiere suavemente al tejido seco de alrededor
- Minimiza el traumatismo y el dolor durante los cambios de apósito
- Puede permanecer en la herida durante 7 días o más dependiendo de la condiciones clínicas de la misma
- Mantiene un medio ambiente húmedo en la herida
- Minimiza el riesgo de maceración
- Puede ser utilizado bajo vendajes compresivos

Indicaciones

Mepilex® Border está diseñado para lesiones con un amplio rango heridas exudativas (tales como úlceras por presión (prevención y tratamiento), úlceras en miembros inferiores (piernas y pies) y heridas traumáticas.

Nota

Si se aprecian signos clínicos de infección, puede continuar con la utilización de Mepilex® Border siempre y cuando se haya iniciado el tratamiento adecuado para la infección.

Mepilex Border (Sobres estériles)

Ref.	Tamaño cm	Uds./env.	Uds./TRP.
295200	7,5 x 7,5	5	70
295300	10 x 10	5	50
295000	12,5 x 12,5	5	50
295400	15 x 15	5	50
295410	17,5 x 17,5	5	35
295600	15 x 20	5	50



Referencias:

1. White R., A Multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008; Vol 4, No 1. 2. Dykes PJ et al. Effects of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. J Wound Care 2001; 10(2):7-10. 3. Dykes PJ. The effect of adhesive dressing edges on cutaneous irritancy and skin barrier function. J Wound Care 2007, 16(3):97-100. 4. Meaume S et al. A study to compare a new self adherent soft silicone dressing with a self adherent polymer Management, 2003. 5. External lab report: NAMSA 09C 29253 01/09C 29253 02.

Más información en www.molnlycke.es

Mölnlycke Health Care, Av. de la Vega 15, Edif.3 - 3ª Planta. 28108 Alcobendas (Madrid) Tel. 914841320
Los nombres, logotipos y marcas comerciales de Mölnlycke, Safetac y Mepilex están registrados por una o más empresas del grupo Mölnlycke Health Care. ©2018 Mölnlycke Health Care AB. Todos los derechos reservados.