




APÓSITO ANTIMICROBIANO DE ESPUMA DE POLIURETANO CON PLATA Y TECNOLOGÍA SAFETAC

- Rápida y sostenida acción antimicrobiana.
- Atraumática para la herida y la piel perilesional (Tecnología Safetac®).
- Excelente control del exudado.

- 1,2 mg /cm² Sulfato de Plata + Carbón

Espuma de poliuretano

- Absorbe el exudado
- Se adapta a los contornos del cuerpo

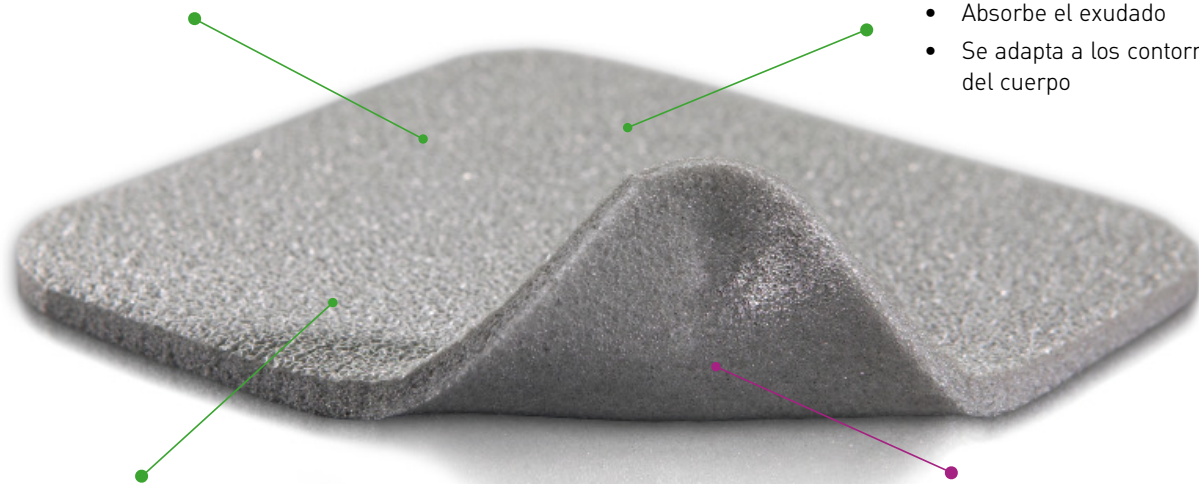

- El efecto antimicrobiano es activo a partir de los 30 minutos y permanece durante 7 días

Capa con Tecnología Safetac®


- Atraumático para la herida y la piel perilesional.
- Minimiza el riesgo de maceración.
- No se adhiere al lecho húmedo de la herida.

Tecnología Safetac®


Safetac® Menos trauma. Menos dolor.™

La Tecnología Safetac® es una tecnología exclusiva de suave silicona. Los apósitos con Tecnología Safetac® son atraumáticos incluso durante su retirada. Estos apósitos minimizan el traumatismo en la herida y la piel perilesional, lo que minimiza el dolor en el paciente. El riesgo de maceración se minimiza al sellar herméticamente los bordes de la herida.

Para más información visite www.safetac.com

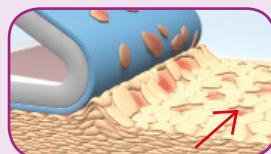


Desprendimiento de la piel con adhesivos convencionales

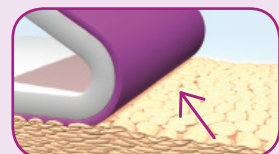


Sin desprendimiento de piel con la Tecnología Safetac


Forma de utilización

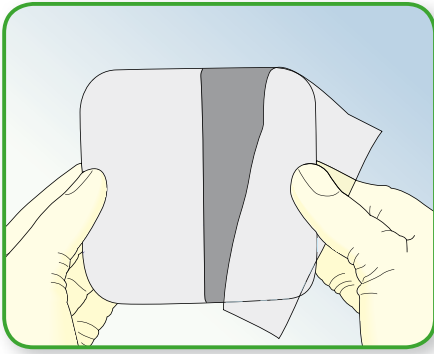

Limpiar la herida de acuerdo con la práctica clínica. Secar la piel perilesional.

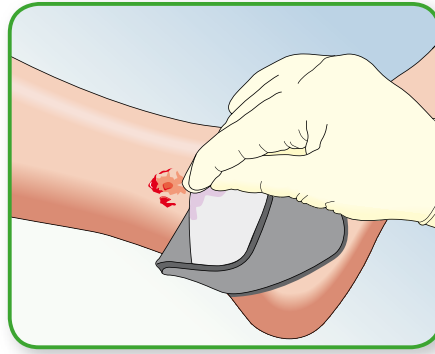

Retirar el film protector y colocar el apósito por la parte adherente sobre la lesión. No estirar.

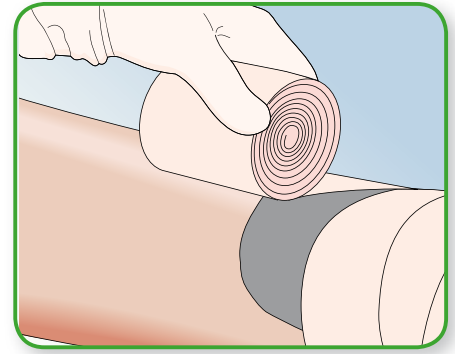

Asegurar Mepilex® Ag con un vendaje u otra fijación si es necesario.

Cómo funciona Mepilex® Ag

Mepilex® Ag es un apósito antimicrobiano formado por una espuma de poliuretano, que absorbe el exudado a la vez que fomenta la cura húmeda, y una capa de contacto con la lesión de suave silicona. Mepilex® Ag es activo frente a los patógenos de la lesión a partir de los 30 minutos de su aplicación, manteniéndose dicho efecto hasta 7 días.

Indicaciones

Mepilex® Ag está indicado para lesiones con un amplio rango de exudado, infectadas y colonizadas críticamente, en las que la carga bacteriana impide el proceso normal de cicatrización, tales como úlceras en extremidades inferiores, úlceras por presión y quemaduras. Mepilex® Ag puede combinarse con vendaje compresivo.

Precauciones

- No utilizar en pacientes con sensibilidad conocida a la plata.
- No utilizar Mepilex® Ag durante tratamientos con radiación, ejemplo X, ultrasonidos, resonancias diatérmicas o magnéticas.
- No usar Mepilex® Ag junto a agentes oxidantes como soluciones de hipoclorito o peróxido de hidrógeno.



PRESENTACIONES MEPILEX® Ag

Nº Ref.	Tamaño cm	Uds./env.	Uds./TRP
287110	10 x 10	5	70
287310	15 x 15	5	25
287410	20 x 20	5	20
287510	20 x 50	2	12

Sobres estériles