

Mepilex® Border Sacrum

SafetaC
TECHNOLOGY

APÓSITO AUTOADHERENTE MULTICAPA PARA EL SACRO CON SAFETAC



1ª Capa - Film posterior de poliuretano

Anti virus y bacterias e impermeable a líquidos, pero altamente permeable al vapor de agua.

2ª Capa - Cuerpo de retención superabsorbente

- Fibras poliacrílicas
- Fibras de algodón
- Fibras de poliéster/polietileno/polipropileno

3ª Capa - Cuerpo de expansión del exudado


Compuesta de viscosa y poliéster. Distribuye el exudado para maximizar la superficie de retención.

4ª Capa - Cuerpo de absorción

Formado por una espuma hidrofílica de poliuretano que atrae la humedad y el exudado rápidamente y previene que retorne a la herida.

5ª Capa - Capa de contacto con SafetaC

Minimiza el dolor del paciente y el traumatismo de la herida durante los cambios de apósito, reduciendo el riesgo de maceración.

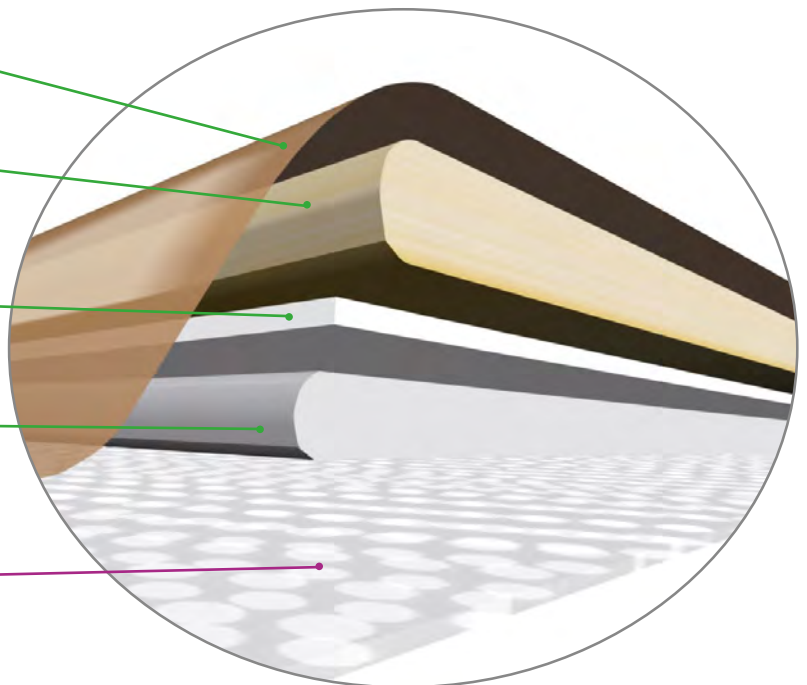

Los apósitos con SafetaC ofrecen mejores resultados

SafetaC, exclusiva de Mölnlycke, ofrece óptimos resultados. Acelera el proceso de cicatrización de las heridas y previene la aparición de nuevas. Los apósitos con SafetaC son la opción más segura para los pacientes, aportándoles los estándares más altos en el cuidado de las heridas.

Nuestro nivel y volumen de evidencia respalda los beneficios clínicos y económicos de los apósitos con SafetaC, incluyendo Mepilex®, Mepitel®, Mepiform® y Mepitac®¹⁻³. Los apósitos con SafetaC han ayudado a millones de pacientes en todo el mundo.

Sistema de papel protector en 3 partes para un fácil uso




1. Quitar el papel protector del centro



2. Colocar la cara adherente en la herida (no estirar)



3. Quitar los papeles protectores laterales

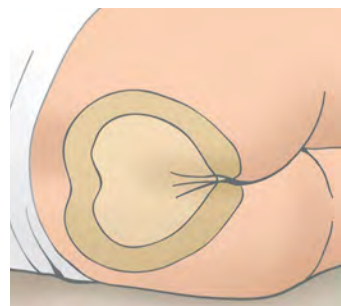

4. Alisar cada lado

Para una suave retirada, levantar una esquina y despegar lentamente el apósito. Puede ser recolocado sin perder sus propiedades adherentes.

Especialmente diseñado para el sacro y el paciente

El nuevo Mepilex® Border Sacrum es el único apósito adaptado a la zona sacra con todos los beneficios de Mepilex® Border y la capa de contacto Safetac.

Suave

- Fácil de usar y quitar.
- Menor traumatismo para la herida.
- Menor traumatismo para la piel perilesional.
- Menor dolor para el paciente.

Seguro

- Menor fricción con la ropa y las sábanas.
- La capa de suave silicona se amolda a la superficie irregular de la piel, lo que crea una microadherencia sobre una mayor superficie de contacto.
- Minimiza las fugas del exudado y la maceración.
- Gran manejo del exudado.

Anatómico

- Se adapta específicamente a la forma del área sacra.
- Es una cómoda alternativa a los tradicionales apósitos adhesivos.
- Permanece en el sitio.



Medidas Mepilex Border Sacrum

Ref.	Tamaño cm	Uds./Env.	Uds./TRP.
282500	15 x 15	5	50
282000	18 x 18	5	40
282400	23 x 23	5	25

Envase estéril

Referencias: 1. Davies P. et al. Evidence review: the clinical benefits of Safetac technology in wound care. *Journal of Wound Care*, 2008. 2. Santamaria N. et al. Clinical effectiveness of a silicone foam dressing for the prevention of heel pressure ulcers in critically ill patients: Border II Trial. *Journal of Wound Care*, 2015. 3. Santamaria N. et al. An estimate of the potential budget impact of using prophylactic dressings to prevent hospital-acquired PUs in Australia. *Journal of Wound Care*, 2014.

Más información en www.molnlycke.es

Molnlycke Health Care, Av. de la Vega 15, Edif. 3 - 3ª Planta - 28108 Alcobendas. Tel: 914841320. Molnlycke®, Mepilex® y Safetac® son marcas y logotipos registrados globalmente por una o más empresas del grupo Molnlycke Health Care. © 2017 Molnlycke Health Care AB. Todos los derechos reservados.