

APÓSITO ABSORBENTE DE POLIURETANO CON MICROADHERENCIA SELECTIVA Y FORMA ANATÓMICA PARA TALÓN

- Minimiza el dolor y el traumatismo durante los cambios de apósito^{1,2}
- Absorbe eficazmente, incluso bajo compresión
- Suave adherencia con una mejorada capacidad de permanencia y comodidad
- Con su exclusiva forma se adapta al talón perfectamente

Cuerpo de espuma de poliuretano

- Absorbe el exudado.
- Funciona bajo compresión.
- Muy adaptable.
- Se adapta perfectamente al talón.

Film posterior de poliuretano

- Permeable a gases.
- Impermeable a líquidos.
- Barrera efectiva contra virus y bacterias*.

Capa con Tecnología Safetac®

- Minimiza el dolor y el traumatismo antes, durante y después de la retirada del apósito.¹
- Se adhiere al lecho húmedo de la herida, no a la piel seca.
- Sella los márgenes de la herida y minimiza el riesgo de maceración.⁴

Safetac®
TECHNOLOGY


*Microbios mayores de 25 nm

Tecnología Safetac®

Safetac® Menos trauma. Menos dolor.™

La Tecnología Safetac® es una tecnología exclusiva y patentada. Los apósitos con Tecnología Safetac® son atraumáticos incluso durante su retirada. Estos apósitos minimizan el traumatismo en la herida y la piel perilesional, lo que minimiza el dolor en el paciente. El riesgo de maceración se minimiza al sellar herméticamente los bordes de la herida.

Para más información visite www.molnlycke.es

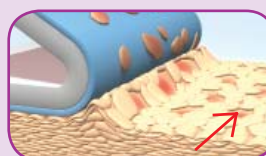


Desprendimiento de la piel con adhesivos convencionales



Sin desprendimiento de piel con la Tecnología Safetac

Modo de utilización Mepilex® Heel

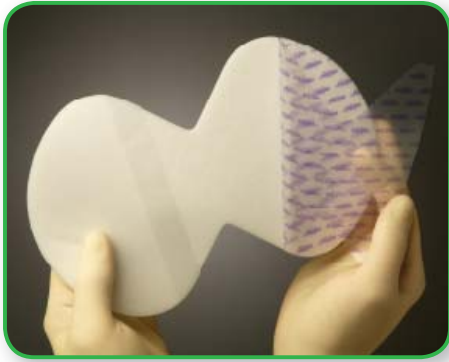

Limpiar la herida y retirar el papel protector.



Mepilex Heel debe cubrir al menos 2 cm de piel perilesional. Aplicar la cara adherente sobre la herida. No estirar.



Si fuera necesario, asegurar Mepilex Heel con un vendaje u otra fijación.

Cómo funciona Mepilex Heel

Mepilex Heel es un apósito de espuma suave y muy adaptable diseñado para la zona del talón. Absorbe el exudado y mantiene el medio ambiente húmedo de la lesión. La capa Safetac sella los bordes de la herida, previniendo la expansión del exudado hacia la piel perilesional, esto minimiza el riesgo de maceración. La capa Safetac asegura que el apósito pueda cambiarse sin dañar la lesión o la piel perilesional o exponer al paciente a un dolor adicional.

Beneficios de Mepilex Heel

- Minimiza el dolor y el traumatismo en los cambios de apósito.
- Su nivel de adherencia hace que el apósito permanezca en el sitio y facilita la aplicación de vendajes compresivos o de retención.
- Se puede usar bajo vendaje compresivo.
- Gracias a su exclusivo diseño se adapta perfectamente al talón.
- Proporciona confort al paciente durante su uso.
- Puede mantenerse en su sitio durante varios días, dependiendo de las condiciones de la herida.
- Puede retirarse y ajustarse sin perder sus propiedades adherentes.
- Hipoalérgico.

Indicaciones

Mepilex Heel está diseñado para el manejo de heridas con un nivel de exudado entre bajo y moderado. Mepilex Heel puede usarse con vendajes compresivos.

Para más detalles, por favor, consulte las instrucciones de uso.



PRESENTACIONES MEPILEX® HEEL

nº Ref.	Tamaño cm	Uds./env.	Uds./TRP
288100	13 x 20	5	25

Sobres estériles

PRESENTACIONES MEPILEX® TALON

C.N.	Tamaño cm	Uds./env.	Uds./TRP.
400105	13 x 21	3	15

Sobres estériles



Financiado
S.S.