


# Mepitel® One

## LA LÁMINA DE CONTACTO CON LA HERIDA MÁS EFECTIVA

- Minimiza el dolor y el traumatismo en los cambios de apósito<sup>1,2</sup>
- Puede permanecer en la herida hasta 14 días<sup>3-7</sup> lo que permite un coste efectivo<sup>1,8</sup> y una cicatrización sin interrupciones

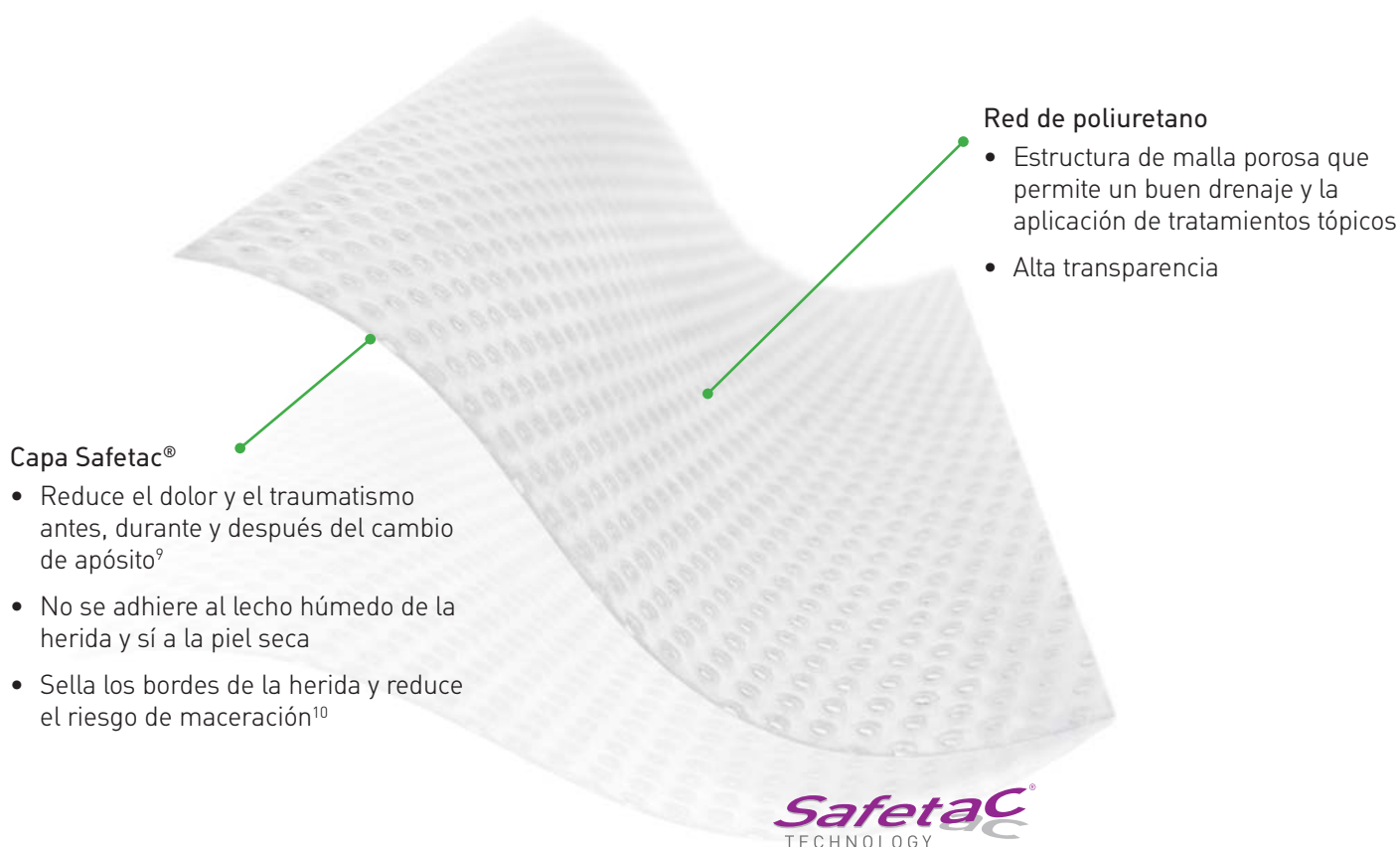


### Tecnología Safetac®


#### Safetac® Menos trauma. Menos dolor.™

La Tecnología Safetac® es una tecnología exclusiva de suave silicona. Los apósitos con Tecnología Safetac® son atraumáticos incluso durante su retirada. Estos apósitos minimizan el traumatismo en la herida y la piel perilesional, lo que minimiza el dolor en el paciente. El riesgo de maceración se minimiza al sellar herméticamente los bordes de la herida.

Para más información visite [www.safetac.com](http://www.safetac.com)

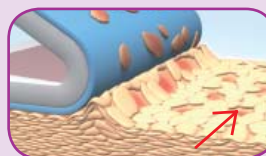


Desprendimiento de la piel con adhesivos convencionales

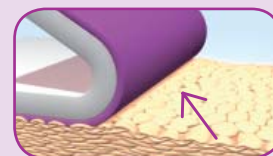


Sin desprendimiento de piel con la Tecnología Safetac


## Forma de utilización de Mepitel® One

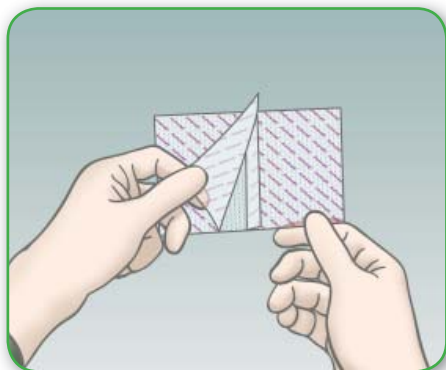

Limpiar la piel.  
Retirar el papel protector.

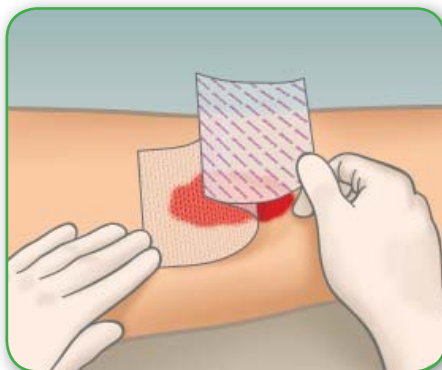

Aplicar Mepitel One sobre la herida.

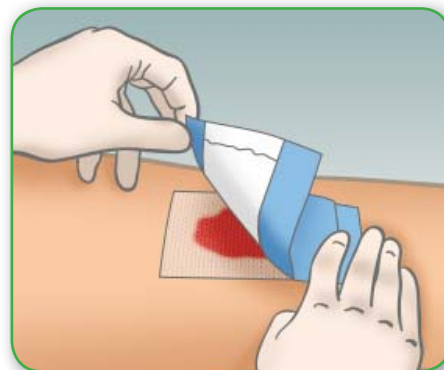

Coloque un apósito secundario absorbente.

## Cómo funciona Mepitel® One

**Mepitel One** puede permanecer en la herida hasta 14 días<sup>3-7</sup>, dependiendo de las condiciones de la herida, lo cual reduce los cambios de apósito primario. La estructura porosa de **Mepitel One** permite que el exudado pase a un apósito absorbente. La lámina con Tecnología Safetac previene la adhesión del apósito al lecho de la herida y asegura un cambio de apósito atraumático. Sella los bordes de la herida, evitando que el exudado se extienda por la piel perilesional, lo que minimiza el riesgo de maceración.

## Beneficios de Mepitel® One

- Minimiza el dolor y el traumatismo en los cambios de apósito.
- Puede permanecer en la herida hasta 14 días lo que asegura una cicatrización sin interrupciones.
- Reduce los cambios de apósito.
- Minimiza el riesgo de maceración.
- Mantiene las propiedades del producto en el tiempo – no deja residuos y no seca la herida.
- Transparente para una fácil inspección de la herida durante la aplicación y durante el tiempo de uso.
- Se adapta a los contornos del cuerpo, lo que aumenta la comodidad del paciente.
- Permanece en el sitio.
- Hipoalergénico.



## Indicaciones

**Mepitel One** ha sido diseñado para un amplio rango de heridas como abrasiones, cortes, quemaduras, heridas quirúrgicas, ampollas, laceraciones, heridas traumáticas, radiación, úlceras vasculares, etc. Puede ser también utilizado como lámina protectora en heridas no exudativas y en pieles frágiles.

## Precauciones

- La herida debe ser inspeccionada por si hubiera signos de infección.
- Si **Mepitel One** es usado en pacientes con Epidermolisis Bullosa, tener precaución en los cambios de apósito. El nivel de adhesión de **Mepitel One** es ligeramente mayor que el de Mepitel.
- Si usa **Mepitel One** en el tratamiento de quemaduras con injertos mallados evite la presión sobre el apósito.
- Si usa **Mepitel One** después de resurfacing facial, evitar presionar, levantar o reposicionar hasta pasado el segundo día.
- Cuando se usa en heridas sangrantes o con exudado viscoso, **Mepitel One** debe cubrirse con un apósito absorbente.
- En caso de utilizarse como fijación para injertos mallados no debe cambiar el apósito antes del quinto día después de la aplicación, pueden aparecer marcas si no se utiliza correctamente.

### PRESENTACIONES MEPITEL® ONE

nº Art.	Tamaño cm	Uds/env.	Uds/transp.
289170	6 x 7	5	70
289270	9 x 10	5	50
289470	13 x 15	5	50
289670	24 x 27,5	5	30

Sobres estériles