

**SILESSE™**  
***Protector cutáneo no irritante***  
***30 sobrecitos con toallita.***

***Memoria Técnica***

## **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Las toallitas Silesse™ están impregnadas de un fluido de silicona y contenidas en sobrecitos de un solo uso.

Cada sobrecito contiene una cantidad nominal de 3 ml de fluido de silicona. Este fluido es una mezcla de siliconas a base de copolímeros de siloxano no irritantes, que ejercen una función de película protectora sobre la piel frente a los efectos agresivos de los residuos corporales (humedad generada por el sudor, exudado de lesiones, heces y/o orina), enzimas y adhesivos.

La toallita es de poliéster con un grado de viscosidad de carácter médico.

La toallita es grande y suave, con dimensiones 120 x 160 mm (40 g/m<sup>2</sup>).

El fluido es claro e incoloro, de rápida evaporación y deja una resina de silicona protectora en la superficie de la piel. Esta película barrera que forma Silesse™ es transparente e incolora, hipoalergénica y libre de alcohol.

Silesse™ aporta una sensación suave y sedosa en la piel dejándola lista para la aplicación del siguiente dispositivo sin influir negativamente en la adhesión del mismo.

### **Información del envase:**

- Envase primario: sobrecito de hoja de aluminio de tres capas
- Envase secundario: caja plegable de 450 micras; 30 sobrecitos/caja

### **Caducidad**

Los sobrecitos Silesse™ tiene un período de validez de cuatro años, desde la fecha de su fabricación..

### **Miscelánea**

Los sobrecitos Silesse™ son un producto sanitario de Clase I no estéril y están autorizados para su comercialización en toda Europa bajo la marca CE, de acuerdo con la Directiva Comunitaria 93/42/CEE que regula los productos sanitarios en el ámbito europeo.

Este producto cumple con los requerimientos de seguridad biológica de acuerdo con EN ISO 10993.

## **COMPOSICIÓN**

Este producto está compuesto por una mezcla 100% de silicona a base de siloxanos:

- Hexamethyldisiloxane 0.65 cst
- Decamethylcyclopenta-siloxane / Trimethylated Silica (50:50)

## **INDICACIONES**

Los sobrecitos Silesse™ están indicados para crear una barrera cutánea, en forma de película, con una función protectora sobre la piel frente a los efectos agresivos de los residuos corporales (humedad generada por el sudor, exudado de lesiones, heces y/o orina), enzimas y adhesivos.

## **CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS**

- Silesse™, al evaporarse proporciona una barrera cutánea con resina de silicona de alto peso molecular que protege la piel periestomal en segundos, sin dejar residuos de acumulación, aceites u otros.
- Proporciona una barrera protectora resistente al agua que protege del exudado corporal
- Silesse™ forma una película barrera confortable y transpirable
- La formulación de Silesse™ no produce la acumulación de película protectora sobre la superficie cutánea
- No es irritante para la piel
- El secado es rápido
- Hipoalergénico
- Deja la piel suave, sedosa y lista para el siguiente dispositivo
- No-graso

## **MODO DE APLICACIÓN**

- En primer lugar, se debe limpiar y secar cuidadosamente la piel
- Rasgar el sobrecito para abrirlo y desplegar la toallita.
- Pasar la toallita suavemente por la zona que se desea proteger y esperar unos segundos hasta que se seque.
- Asegurarse de que Silesse™ se haya secado completamente antes de aplicar productos adhesivos, como dispositivos o apósitos.
- Es preciso realizar una nueva aplicación de Silesse™ con cada cambio de apósito o dispositivo para asegurar una protección completa.
- Si no se utiliza debajo de un producto adhesivo, es recomendable repetir la aplicación cada 12/72h, en función de las condiciones en las que se encuentre la superficie cutánea.

## **CONDICIONES DE CONSERVACIÓN**

Este producto no requiere precauciones especiales para su conservación.

## **PRECAUCIONES**

- Evitar su uso sobre superficies cutáneas delicadas o sensibles ( ojos, boca, oídos, nariz, vagina).
- En caso de duda, realizar una prueba en una pequeña zona antes de su utilización.
- Interrumpir su uso en caso de irritación.