


Sorbsan[®] Plus


Apósito de Alginato cálcico

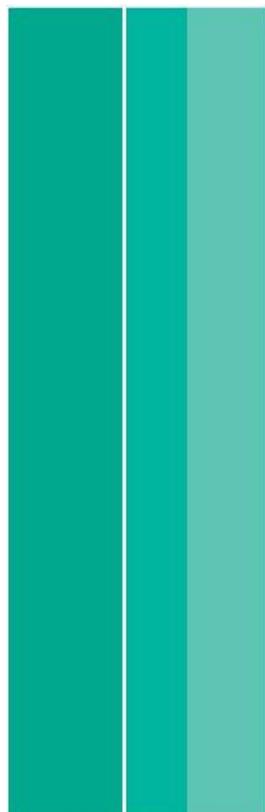

SORBSAN® PLUS

Descripción del producto

Apósito estéril de alginato cálcico, no adhesivo, para el recubrimiento de úlceras y heridas cutáneas exudativas, sumamente adaptable.

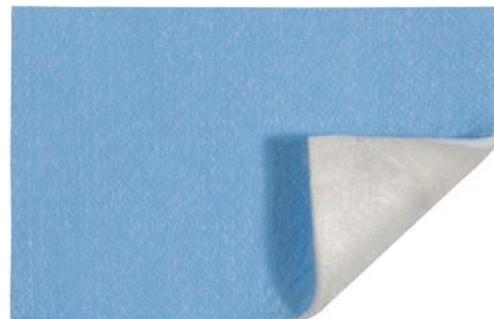

Composición

- Alginato cálcico (pureza 100%)
- Relación ácido manurónico-ácido glucurónico elevada (63% y 37%)

El alginato cálcico es un producto obtenido a partir de la liofilización de algas pardas marinas, capaz de absorber hasta 20 veces su propio peso en líquidos, permitiendo obtener rendimientos óptimos en cuanto a adaptación, absorción y formación de gel.

Indicaciones

El alginato cálcico es un producto obtenido a partir de la liofilización de algas pardas marinas permitiendo obtener rendimientos óptimos en cuanto a adaptación, absorción y formación de gel.

A través de un intercambio iónico con el exudado de la lesión, las fibras del apósito forman un gel uniforme que crea el ambiente húmedo adecuado para la regeneración de los tejidos.

El gel no rebasa los bordes de la herida, con lo que no macera la piel perilesional sana.

El gel formado se retira fácilmente con Solución Salina al 0.9%. No deja residuos.

Fácil manejo, permite su aplicación y adaptación en todo tipo de heridas que presentan un nivel medio-alto de exudado, incluso aquellas que presentan cavidades.

Gracias a que cuenta con Ca^{2+} en su composición presenta cierta capacidad hemostática.

Indicado en lesiones infectadas, bajo supervisión médica.

Instrucciones de Utilización

Sorbsan® plus es muy fácil de aplicar y no se precisan conocimientos ni equipos especiales:

- Limpiar la lesión con una solución para limpieza y descontaminación (PHMB+Betaina) o solución salina en su defecto.
- Secar la piel que rodea la herida.
- Seleccionar el tamaño apropiado de apósito **Sorbsan® plus** que cubra completamente la superficie de la herida, pudiéndose recortar para adaptarlo al lecho de la herida.
- Aplicar el apósito **Sorbsan® plus** de forma que la superficie de color blanco esté directamente sobre la superficie de la herida, dejando un margen de al menos 2 mm alrededor de la misma.
- Cubrir con un apósito secundario apropiado.



Condiciones de conservación

Almacenar a temperatura ambiente, en sitio seco.

Caducidad: 5 años



Presentaciones

Sorbsan 7.5x10 cm

Sorbsan 10x15 cm

C/5 unidades

C/3 unidades

Cód.Braun 0001420S

Cód.Braun 0001424S

Marca CE: 0086

B | BRAUN