

3M™ Tegaderm™ Hydrocolloid Thin

Apósito Hidrocoloide

Referencia 90021 - 90023 - 90024



○ DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

3M™ Tegaderm™ Hydrocolloid Thin Adhesivo Oval es un apósito absorbente para úlceras, estéril, que se compone de un hidrocoloide hipoalergénico adherente (carboximetilcelulosa sódica), protegido con una película protectora externa transparente y adhesiva que permite fijar el apósito a la piel, además de proporcionar un sellado de la úlcera que impide la fuga del exudado. Esta película es permeable al vapor de agua e impermeable al agua y a las bacterias.

Una vez colocado, interactúa con las secreciones de la úlcera para crear una masa blanda, absorbente y semitransparente. Mantiene húmeda la úlcera, lo cual se ha demostrado que mejora el proceso de cicatrización de la úlcera.

Los apósitos 3M™ Tegaderm™ Hydrocolloid Thin Adhesivo Oval se presentan de forma unitaria en bolsas de plástico impresas.

○ COMPOSICIÓN

- ✓ Composición Película Protectora y Adhesiva: Poliuretano.
- ✓ Composición Hidrocoloide: Croscarmellose de sodio, poliisopreno, poliisobutileno, carboximetil celulosa sódica, politerpeno sintético.
- ✓ Hipoalergénico, no tóxico y no irritante.
- ✓ No contiene látex.
- ✓ Esterilización mediante radiación gamma.
- ✓ Marcado CE en conformidad con la Directiva Europea 93/42/CEE, transposición a Legislación Nacional RD 414/1996.

○ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. Absorción.

- ✓ Los hidrocoloides en contacto con el exudado se disuelven formando un gel, una masa blanda, absorbente y semitransparente, que proporciona condiciones de humedad óptimas para la curación de la úlcera, ya que facilitan la migración y mitosis de las células epiteliales promoviendo el proceso de regeneración del lecho de la úlcera, al tiempo que se favorece la autólisis del tejido muerto.
- ✓ El gel formado, no se disgrega cuando absorbe el exudado de la úlcera. Demuestra excelente capacidad de absorción. Comparativamente frente a apósitos similares, presenta una capacidad de absorción superior en las primeras 48 horas.

2. Adhesividad.

- ✓ La lámina adhesiva permite fijar directamente el apósito sin necesidad de esparadrapo y, por tanto, minimiza el número de pasos durante la aplicación del apósito.
- ✓ Su diseño oval junto con el bajo perfil de la lámina adhesiva, minimiza la probabilidad de fugas del exudado y resulta extremadamente útil en regiones corporales problemáticas en cuanto a la forma y el moldeado de los apósitos, como por ejemplo, talones, codos y pechos.
- ✓ Su cierre resistente al agua permite la ducha y baño.
- ✓ Puede permanecer hasta 7 días, si es clínicamente apropiado.
- ✓ Requiere una menor frecuencia de cambio de apósito, dadas sus características.
- ✓ La suave superficie exterior protege el tejido regenerado y evita que se desgarre por fricción.
- ✓ Permite la retirada del apósito sin perturbar ni dañar el tejido regenerado en la úlcera.
- ✓ Bloquea y ayuda a controlar los olores que están característicamente asociados con algunas úlceras.

3. Apósito semioclusivo:

- a. **Permeable al oxígeno.** Permite la transmisión del vapor de agua a través de la lámina de Tegaderm reduciendo la humedad debajo del apósito a lo largo del tiempo.
Índice de transmisión del vapor húmedo:
650 - 700 g / m² / 24 horas
- b. **Impermeable a los líquidos.** Resistente al agua, posibilita el cuidado corporal diario.
Proporciona un ambiente húmedo y adecuado para la curación óptima de la úlcera. Favorece el control del exudado y minimiza la posibilidad de maceración de la piel perilesional.

4. Protección frente a infecciones.

- ✓ Impermeables frente a las bacterias y virus. *Las pruebas de laboratorio han demostrado que la película constituye una barrera frente a los virus VIH-1 y VHB, siempre y cuando el apósito permanezca intacto y no haya fugas.*
- ✓ No se genera proliferación bacteriana bajo el apósito. El número de microorganismos bajo el apósito no es mayor que el de las zonas cutáneas contiguas e inferior al que se observa bajo apósitos de gasa.

5. Flexibilidad.

- ✓ Es un apósito adaptable, moldeable, no voluminoso debido a su perfil fino. Es ligeramente elástico y se estira con una mínima tensión de la piel adaptándose a los movimientos naturales del paciente, lo cual disminuye los problemas por fricción.

6. Hidrocoloide transparente y adherente.

- ✓ Su transparencia permite la visualización de la úlcera para la correcta colocación del apósito y el control del estado de la úlcera, del exudado y de la piel circundante.

○ INDICACIONES

El apósito hidrocoloide 3M™ Tegaderm™ Hydrocolloid Thin Adhesivo Oval está indicado en úlceras por presión y úlceras vasculares de espesor parcial, con grado de exudación bajo.

Contraindicaciones: Ninguna conocida.

○ APLICACIÓN

Antes de utilizar el apósito:

- ✓ Recortar el exceso de vello para mayor comodidad del paciente.
- ✓ Limpiar bien la piel y la úlcera.
- ✓ Dejar que la piel se seque antes de aplicar el apósito.
- ✓ Si la piel del paciente se daña con facilidad o se prevé que las secreciones sobrepasen el borde de la úlcera, puede aplicarse un protector de la piel o una película barrera cutánea.
- ✓ Valorar la úlcera elegir la forma y el tamaño de apósito adecuado. El apósito debe cubrir 2,5 cm. más allá del borde de la úlcera.

Aplicación del apósito:

- ✓ Separar el revestimiento del papel soporte del apósito 3M™ Tegaderm™ Hydrocolloid Thin Adhesivo Oval, desprendiendo y tirando de una de las lengüetas cuadradas terminales marcadas "1" para exponer la superficie adhesiva. Procurar evitar el contacto con el borde o el lado adhesivo del apósito.
- ✓ Centrar el apósito encima de la úlcera. Presionar suavemente el lado adhesivo hacia abajo, y desde el centro hacia fuera. Evitar estirar el apósito o la piel.
- ✓ Presionar y alisar los bordes de la película, para garantizar una buena adhesión.
- ✓ Retirar la película superior desprendiendo y tirando de una de las lengüetas centrales marcadas "2" hacia el borde del apósito.
- ✓ Alisar los bordes del apósito conforme retira la película. Retirar el otro lado de la película superior de la misma manera
- ✓ Arrancar suavemente las lengüetas terminales cuadradas marcadas "1" tirando de ellas hacia abajo a nivel de las perforaciones, y desecharlas. Evitar despegar el borde de la película mientras retira las lengüetas. Presionar firmemente el borde de toda la película para afianzarla.

Aplicación del apósito a los talones o los codos:

- ✓ Rasgar el apósito 3M™ Tegaderm™ Hydrocolloid Thin Adhesivo Oval desde un extremo con lengüeta hasta el centro.
- ✓ Aplicar la mitad sin cortar del apósito a la parte inferior del talón o codo.
- ✓ Aplicar una de las mitades del lado cortado del apósito a la parte superior del talón o codo.
- ✓ Retirar la película superior y la lengüeta de la mitad del apósito que se encuentra en la parte superior del talón o codo
- ✓ Aplicar la otra mitad del lado cortado del apósito, solapándola a la parte que ya está colocada. Retirar la otra película superior y las lengüetas restantes.
- ✓ Presionar firmemente los bordes cortados para afianzarlos.

Retirada del apósito:

- ✓ Despegar cuidadosamente los bordes de la película de la piel. Si cuesta trabajo hacerlo, aplicar esparadrapo en el borde del apósito y utilizarlo para despegarlo.
- ✓ Seguir despegando la película por tracción lateral hasta que todos los bordes se hayan desprendido de la superficie cutánea.
- ✓ Retirar el apósito lentamente, doblándolo sobre sí mismo y tirando cuidadosamente en la dirección del crecimiento del vello.

○ PRECAUCIONES DE USO

- ✓ El tratamiento de cualquier úlcera cutánea debe formar parte de un protocolo terapéutico bien definido, vigilado por profesionales sanitarios.
- ✓ Al empezar a utilizar 3M™ Tegaderm™ Hydrocolloid Thin Adhesivo Oval, la úlcera aparenta ser más grande y profunda conforme se va eliminando el tejido de desecho. Este aumento en las dimensiones debe estar acompañado de una mejora en el aspecto de la úlcera. Si la úlcera aumenta de tamaño después de los primeros cambios de apósito, consultar con un profesional sanitario.
- ✓ Observar si hay señales de infección. Si se manifiesta una infección, cuyos signos pueden ser: fiebre, intensificación del dolor, enrojecimiento, sangrado, hinchazón, presencia de olores y pus, consultar al médico.

○ ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

- ✓ Almacenar a temperatura ambiente.
- ✓ Evitar calor y humedad excesivos.
- ✓ La fecha de caducidad figura impresa en cada envase (5 años desde la fecha de fabricación).

○ INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

CN	Referencias	Medidas (cm.)	Presentación Uds/Caja
498436	90021	10 x 12 (7 x 9) cm.	3
	90021	10 x 12 (7 x 9) cm.	10*
498444	90023	13 x 15 (10 x 12) cm.	3
	90023	13 x 15 (10 x 12) cm.	10*
**	90024	17 x 20 (14 x 17) cm.	6

* Envase hospitalario

3M

Dpto. Curación de Heridas Crónicas
3M España, S.A.
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid

3M Health Care
St. Paul, MN 55144-1000

 **Llamada Gratuita**
900 210 584
3M Centro de Información al Cliente